

bathmate®
J U S T A D D W A T E R

HYDROMAX

U S E R G U I D E

Die Bathmate Hydropumpe ist eine externe Vorrichtung, die mithilfe von Vakuumtechnik für eine für Geschlechtsverkehr ausreichende Penissteifigkeit sorgt. Lesen Sie die folgenden Anweisungen bitte sorgfältig durch.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Wichtige Sicherheitshinweise

- Konsultieren Sie vor der Nutzung dieser Vorrichtung Ihren Arzt, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft: Symptome einer erektilen Dysfunktion, Diabetes, Multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronische Niereninsuffizienz, Alkoholismus, erhöhte Herz- oder Atemfrequenz, Herz- oder Lungenerkrankung, hoher Blutdruck, Schlaganfall, Epilepsie, Erkrankung der Harnwege (z.B. Nieren-, Blasen- oder Genitalerkrankung) oder Leukämie.
- Diese Vorrichtung nicht verwenden, wenn:
 - Sie an einer Sichelzellenanämie leiden.
 - Sie bereits einmal eine länger anhaltende Erektion hatten.
 - Sie an einer Blutungsstörung leiden oder derzeit blutverdünkende Medikamente wie Aspirin zu sich nehmen.
- Die Hydropumpe ist für die Verwendung durch einen einzelnen Benutzer bestimmt.
- Die Bathmate Hydropumpe ist für den Gebrauch in Wasser bestimmt, deshalb wird die Verwendung von Gleitmittel zusammen mit dieser Vorrichtung nicht empfohlen.
- Für die Bedienung dieser Vorrichtung benötigen Sie beide Hände, mit der ausreichenden Kraft, den Vakuumfreisetzungsmechanismus zu betätigen. Verringerte Kraft in den Händen kann die sichere Entfernung von dieser Vorrichtung erschweren.
- Sie müssen stets die Kontrolle über die Vorrichtung haben und es vermeiden, während des Gebrauchs der Hydropumpe einzuschlafen.
- Verwenden Sie diese Vorrichtung nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss, da dies Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen und das Risiko von Verletzungen an Ihrem Penis erhöhen könnte.
- Sie dürfen diese Vorrichtung nicht verwenden, wenn Sie ein verringertes Schmerzempfinden im Penisbereich haben, da dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, mögliche Verletzungen durch die Vorrichtung zu erkennen.
- Der Gebrauch einer Vakuumpumpe kann zu Verletzungen oder Rissen der Blutgefäße im Penis oder im Hodensack führen, woraus Petechien, Blutungen oder Hämatombildungen resultieren können.
- Der Gebrauch einer Vakuumpumpe kann bestehende Erkrankungen wie die Peyronie-Krankheit, Priapismus oder Harnröhrenstrikturen verstärken.
- Die falsche Verwendung dieser Vorrichtung kann zu Verletzungen des Penis führen.
- Bei starken Schmerzen oder Unbehagen ist der weitere Gebrauch umgehend einzustellen und ein Arzt aufzusuchen.

INBETRIEBNAHME

Empfohlene Verwendung

Für den optimalen Nutzen aus der Hydropumpe und um einen unangemessenen Gebrauch, der Unannehmlichkeiten verursachen könnte, zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die nachstehenden Anweisungen zu befolgen:

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: Waschen Sie Ihre Hydropumpe mit warmem, sauberem Seifenwasser und spülen Sie sie gründlich ab.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Schambereich ausreichend gestützt ist. Dies erleichtert die Vakuumversiegelung gegen das Becken.
- Damit die Hoden erweichen, ist eine Entspannungsphase von wenigen Minuten unter einer warmen Dusche oder einem warmen Bad erforderlich. Dadurch werden sie vom Dichtungsbereich nicht betroffen und es kommt zu keinem Unbehagen.
- Nur einen minimalen Unterdruck ausüben, um eine Erektion zu erhalten. Übermäßiger Unterdruck und zu kräftiges Pumpen können zu Ergussbildungen oder Verletzungen am Penis führen.
- Um am meisten von einer harten Erektion und einer optimalen Durchblutung zu profitieren, ist es am besten, die Vorrichtung alle 2-3 Minuten zu entfernen, damit sich der Penis wieder entspannen kann. Massieren Sie den Penis im schlaffen Zustand für 2 Minuten, dann bringen Sie die Vorrichtung wieder an und wiederholen den Vorgang. Dies sollten Sie maximal 3 Mal in einer 15-minütigen Anwendung machen.
- Verwenden Sie die Hydropumpe nicht für mehr als 15 Minuten in einem Zeitraum von 24 Stunden.

Wie funktioniert die Hydropumpe

Die Hydropumpe erstellt im Schambereich des Anwenders ein Vakuum, indem sie den schlaffen Penis umschließt. Wenn die Pumpe nach unten gegen den Körper gedrückt wird, werden die Bälge zusammengepresst und Wasser wird aus dem Ende der Pumpe über das offene Ventil ausgestoßen. Beim Loslassen dehnen sich die Bälge wieder aus und das Ventil schließt sich, wodurch innerhalb der Pumpe Unterdruck erzeugt wird. Dadurch dehnt sich der Penis aus und er wird mit Blut gefüllt, es kommt zu einer Erektion. Erneutes Pumpen erhöht den Unterdruck, wodurch die Größe der Erektion erhöht wird.

Der Anwender steuert den Unterdruck, indem er das Ventil nach innen gegen die Feder drückt. Dadurch öffnet sich das Ventil und lässt Luft oder Wasser wieder zurück in das Pumpengehäuse, wodurch der Unterdruck teilweise oder vollständig aufgelöst wird.

In der Bathmate Hydropumpe wird der Unterdruck durch elastische Rückstoßkraft der Faltenbalgpumpe erzeugt, sodass der Anwender die sicheren Unterdruckniveaus gemäß europäischen und US-amerikanischen medizinischen Verordnungen nicht übersteigen kann.

WICHTIG

Der schwarze Kern oben auf dem Ventil wird durch Drücken nach innen und verschieben nach rechts oder links bewegt, wo er einrasten sollte und somit das Ventil verschließt. Die geschlossene Position sollte nur beim Befüllen der Hydropumpe mit Wasser unter der Dusche verwendet werden. Ansonsten sollte der schwarze Kern in der mittleren (geöffneten) Position sein. Wenn der schwarze Kern nicht in der mittleren Position ist, funktioniert die Hydropumpe gegebenenfalls nicht ordnungsgemäß.

Verwendung Ihrer Hydropumpe unter der Dusche

1. Entspannen Sie sich für wenige Minuten unter der Dusche.
2. Drücken Sie den schwarzen Kern mit Ihrem Finger in die geschlossene Position, entfernen Sie den Komforteinsatz (um eingeschlossene Luft zu vermeiden) und drehen Sie die Hydropumpe unter dem Duschkopf um, bis sie voll Wasser ist.
3. Bringen Sie den Komforteinsatz wieder an.
4. Platzieren Sie die Hydropumpe über Ihrem schlaffen Penis fest bis hin zum Becken. Dabei muss der schwarze Kern in geschlossener Position sein. Die Fase kann entweder nach oben oder nach unten gerichtet sein, je nach Ihrem Komfortniveau.
5. Dichten Sie die Pumpe gegen Ihren Körper ab und stellen Sie dabei sicher, dass die Platzierung angenehm ist und dass Ihre Hoden im Freien sind.
6. Mit einer leicht nach oben geneigten Hydropumpe das Ventil öffnen, indem Sie den schwarzen Kern in die mittlere Position drücken, und mit dem Pumpen beginnen.
7. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Kern beim Pumpen in der mittleren (geöffneten) Position ist.
8. Langsam und gleichmäßig pumpen, bis die Bälge in gedrückter Position bleiben. Dies weist darauf hin, dass ein optimaler Unterdruck erreicht wurde.
9. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Anweisungen zur richtigen Anwendung befolgen.
10. Um die Hydropumpe zu entfernen, lösen Sie den Unterdruck durch Eindrücken der Ventilkappe, um den Schnellfreisetzungsmechanismus zu aktivieren, und lassen Sie die Hydropumpe von Ihrem Penis herunter gleiten.

Verwendung Ihrer Hydropumpe in der Badewanne

1. Entspannen Sie sich für wenige Minuten in der Badewanne.
2. Entfernen Sie den Komforteinsatz (um eingeschlossene Luft zu verhindern) und füllen Sie die Hydropumpe mit Badewasser.
3. Bringen Sie den Komforteinsatz wieder an.
4. Platzieren Sie die Hydropumpe über Ihrem schlaffen Penis fest bis hin zum Becken. Dabei muss der schwarze Kern in mittlerer (geöffneter) Position sein. Die Fase kann entweder nach oben oder nach unten gerichtet sein, je nach Ihrem Komfortniveau.
5. Dichten Sie die Pumpe gegen Ihren Körper ab und stellen Sie dabei sicher, dass die Platzierung angenehm ist und dass Ihre Hoden im Freien sind.
6. Mit einer leicht nach oben geneigten Hydropumpe sicherstellen, dass der schwarze Kern in der mittleren (geöffneten) Position ist und mit dem Pumpen beginnen.
7. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Kern beim Pumpen in der mittleren (geöffneten) Position ist.
8. Langsam und gleichmäßig pumpen, bis die Bälge in gedrückter Position bleiben. Dies weist darauf hin, dass ein optimaler Unterdruck erreicht wurde.
9. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Anweisungen zur richtigen Anwendung befolgen.
10. Um die Hydropumpe zu entfernen, lösen Sie den Unterdruck durch Eindrücken der Ventilkappe, um den Schnellfreisetzungsmechanismus zu aktivieren, und lassen Sie die Hydropumpe von Ihrem Penis herunter gleiten.

Reinigung und Pflege

Waschen Sie Ihre Hydropumpe mit warmem Seifenwasser aus und spülen Sie sie gründlich ab. Lassen Sie Ihre Hydropumpe trocknen und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Kundenservice & Kundengarantie

Die Bathmate Hydropumpe wurde für einen langjährigen sorgenlosen Gebrauch entworfen. Das Gerät enthält eine zweijährige Garantie auf defekte Teile oder mangelhafte Verarbeitung. Der Kundenservice und Einzelheiten der Garantie können eingesehen werden unter: **www.bathmatedirect.com/support**




In dem unwahrscheinlichen Fall eines Garantieanspruchs behält sich DX Products Ltd das Recht vor, die Rückgabe der Hydropumpe oder den Nachweis eines Schadens zu verlangen.





Produktidentifikationscode (PID)



DX Products Ltd verwendet für alle Produkte einen Identifikationscode. Bathmate Hydropumpen haben einen PID-Code aus 6 Buchstaben, der auf dem Etikett der Hydropumpe zu finden ist. Dieser Code dient der Gewährleistung der Echtheit und dem Nachweis, dass Sie ein echtes Produkt und nicht eine minderwertig gefälschte Kopie kaufen. Verwenden Sie bitte Ihren PID-Code, um die Echtheit Ihres Produkts zu bestätigen und registrieren Sie Ihre Garantie online auf unserer Website:
www.bathmatedirect.com/support

Anleitung zur Problemlösung

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	ABHILFE	ANMERKUNGEN
Keine Erektion / Teilweise Erektion	Kein Unterdruck aufgrund Luftverlust durch unzureichende Abdichtung	Vergewissern Sie sich, dass die Schamhaare hinreichend gestutzt sind; entfernen und reinigen Sie das Ventil	Problem tritt meist mit Unerfahrenheit auf; je geschickter Sie bei der Verwendung der Vorrichtung werden, desto seltener tritt dieses Problem auf
Ziehen an der Haut des Hodensacks	Die Hoden befinden sich zu nah an der Öffnung.	Lassen Sie die Hoden weich werden, indem Sie sich vor dem Pumpen einige Minuten in einem warmen Bad oder unter der Dusche entspannen	Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn das Problem weiterhin besteht: support@bathmatedirect.com
Unbehagen oder Schmerzen			
Beim Pumpen	Zu schnelles Pumpen; Ziehen am Hodensack	Langsamer pumpen; Vorrichtung weiterhin verwenden	Das Problem löst sich in der Regel, da Sie bei der Verwendung der Vorrichtung geschickter werden
Rötungen, Reizungen oder Ergussbildungen	Zu schnelles Pumpen; übermäßiges Pumpen	Langsamer pumpen; weniger Pumpvorgänge	Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn dieses Problem nach den ersten Trainingseinheiten weiterhin besteht

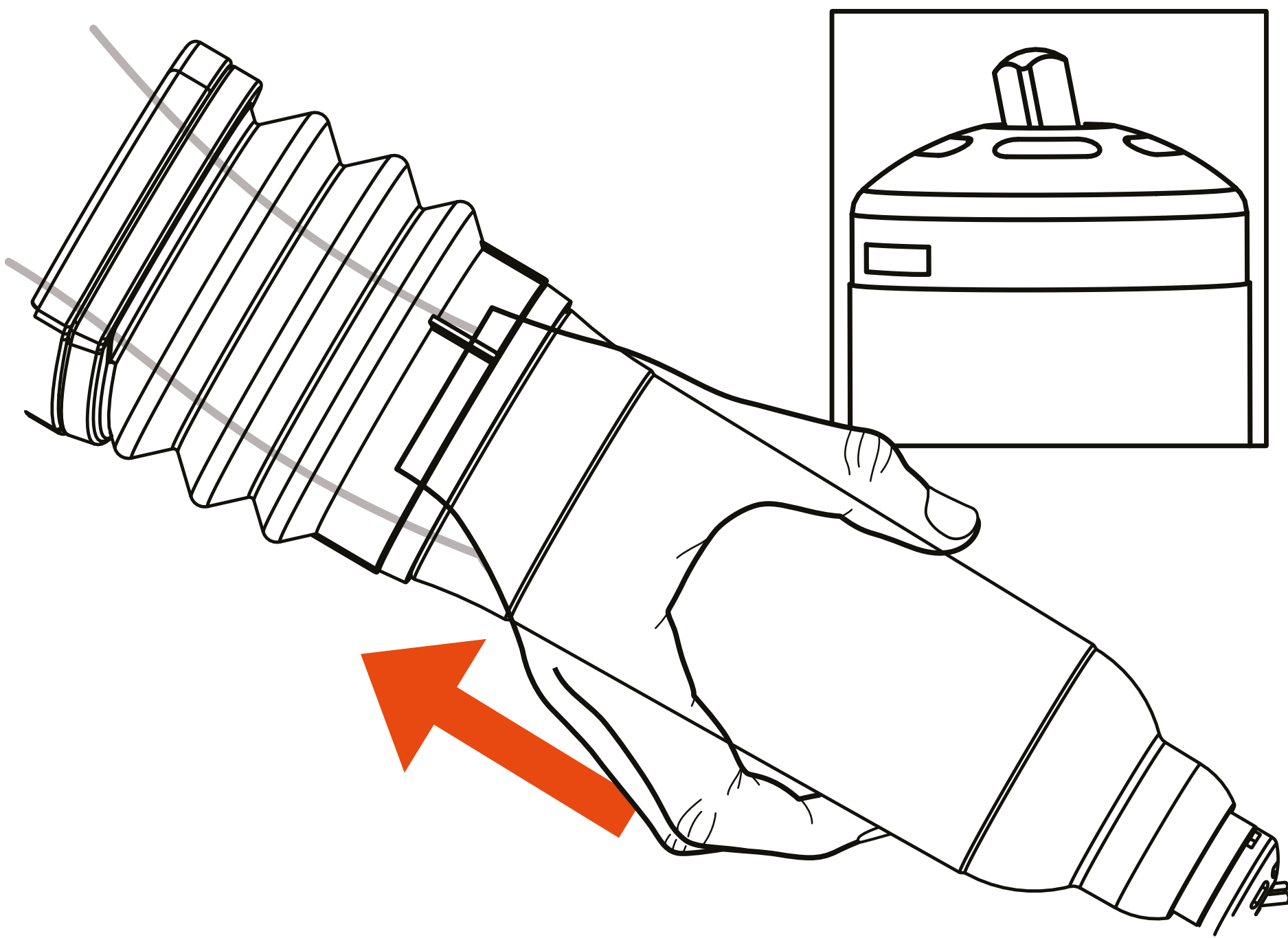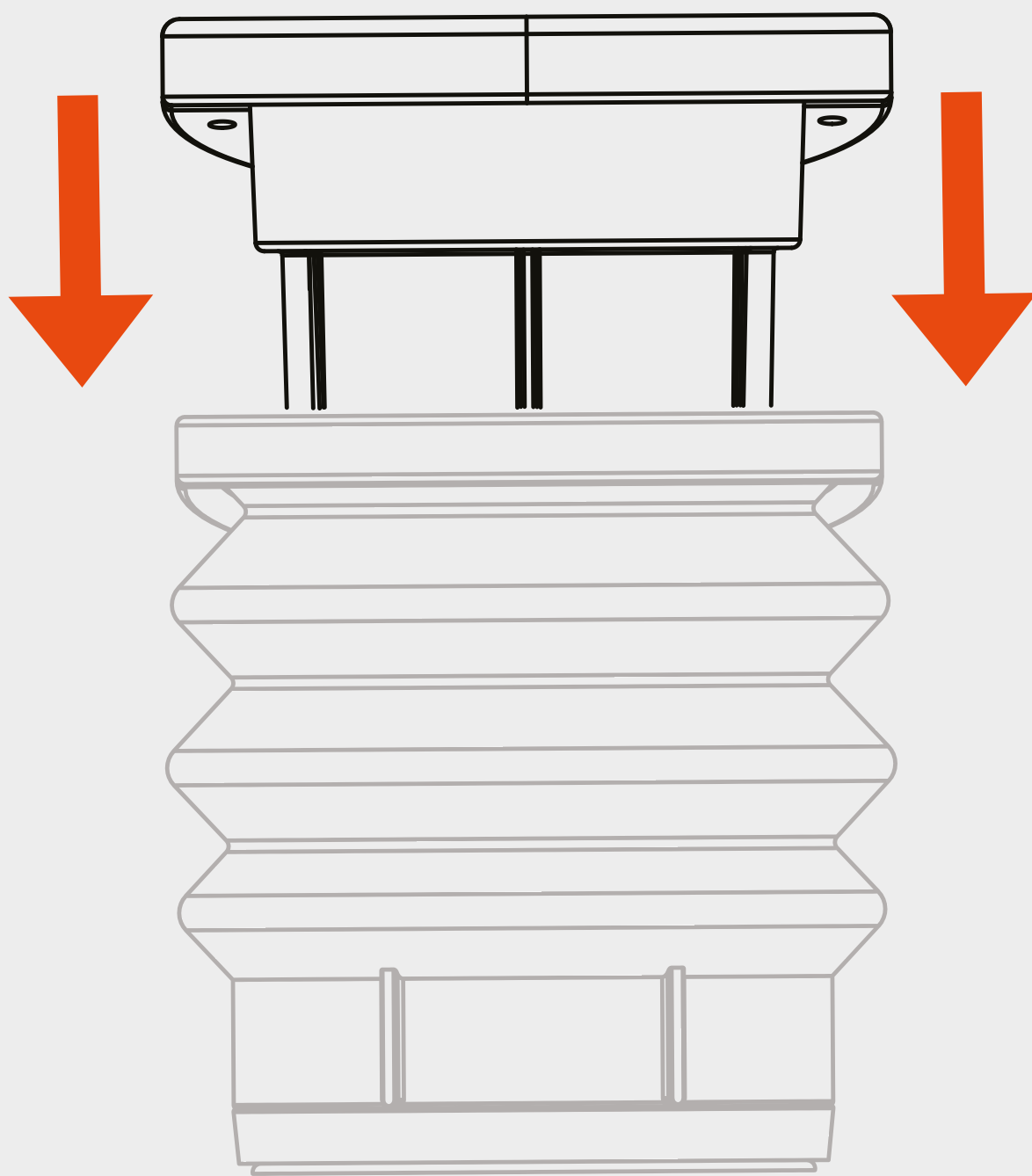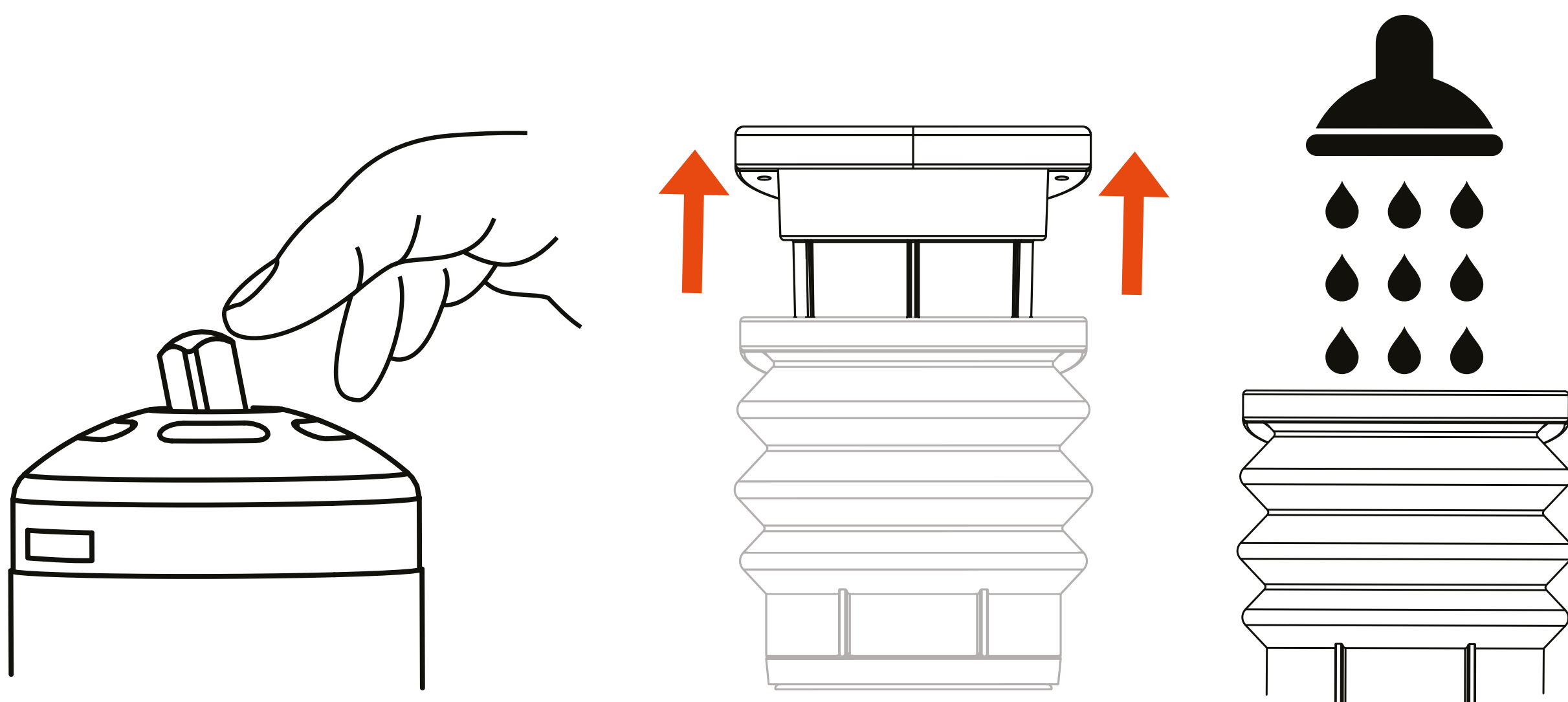

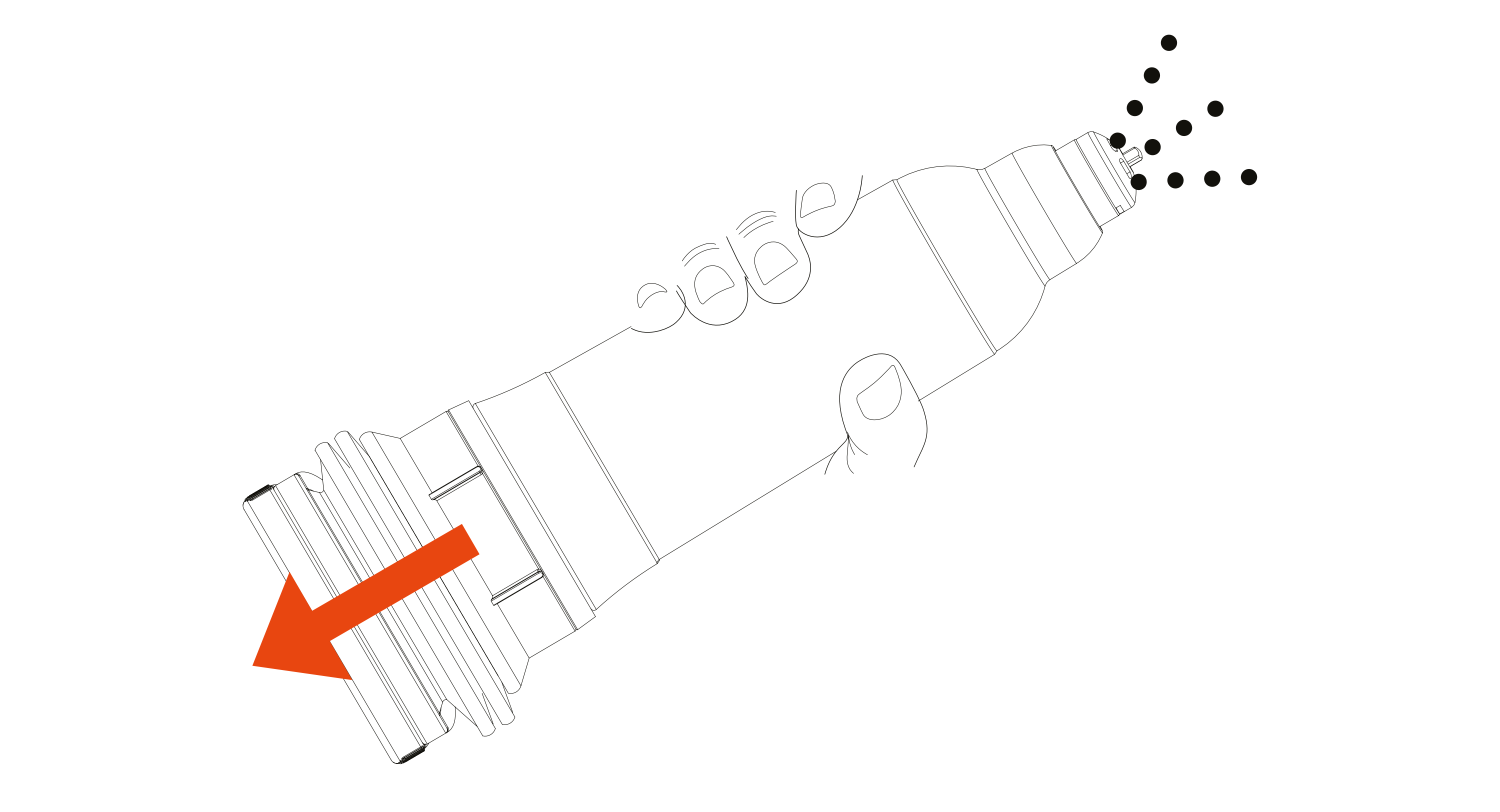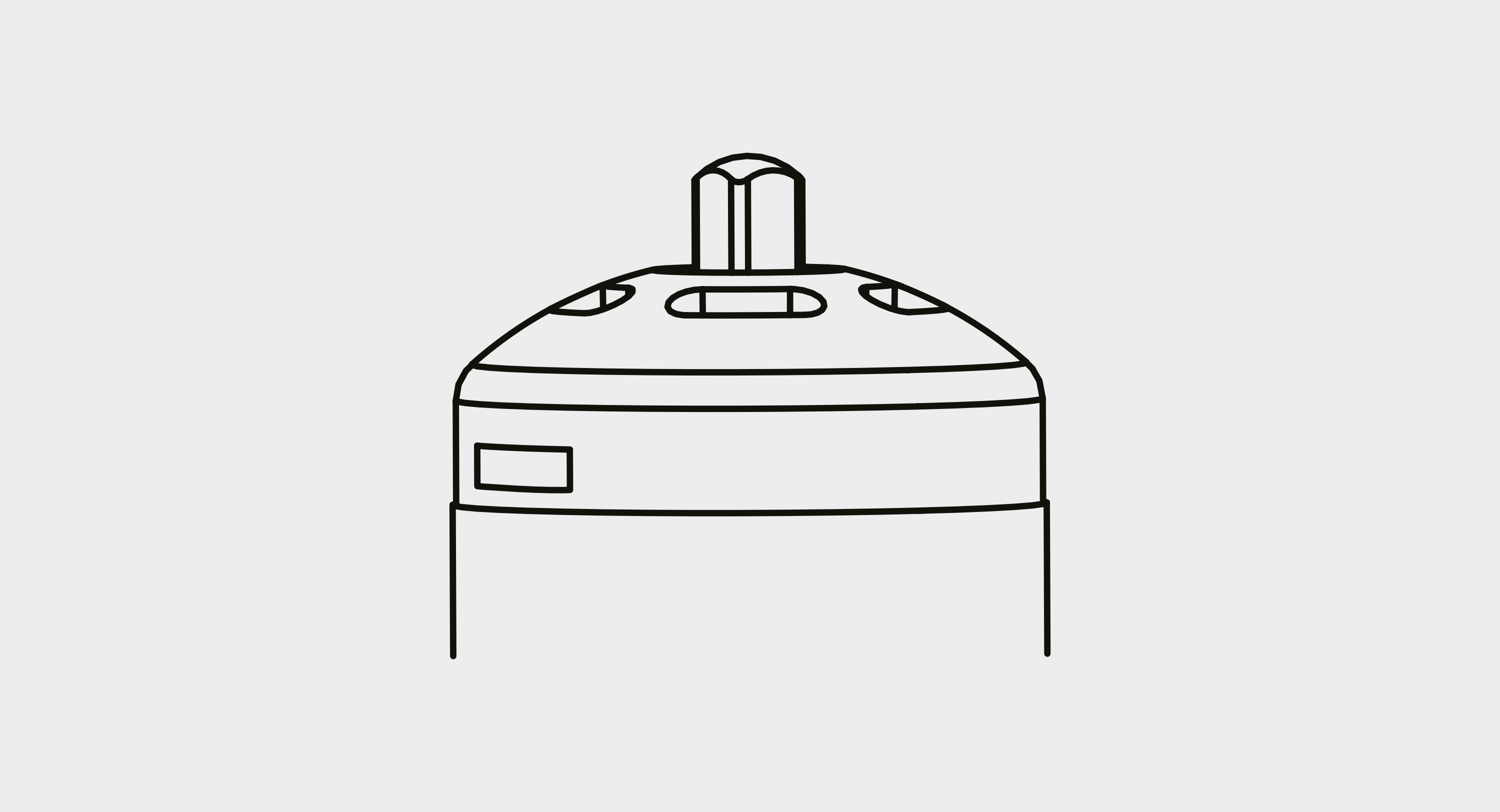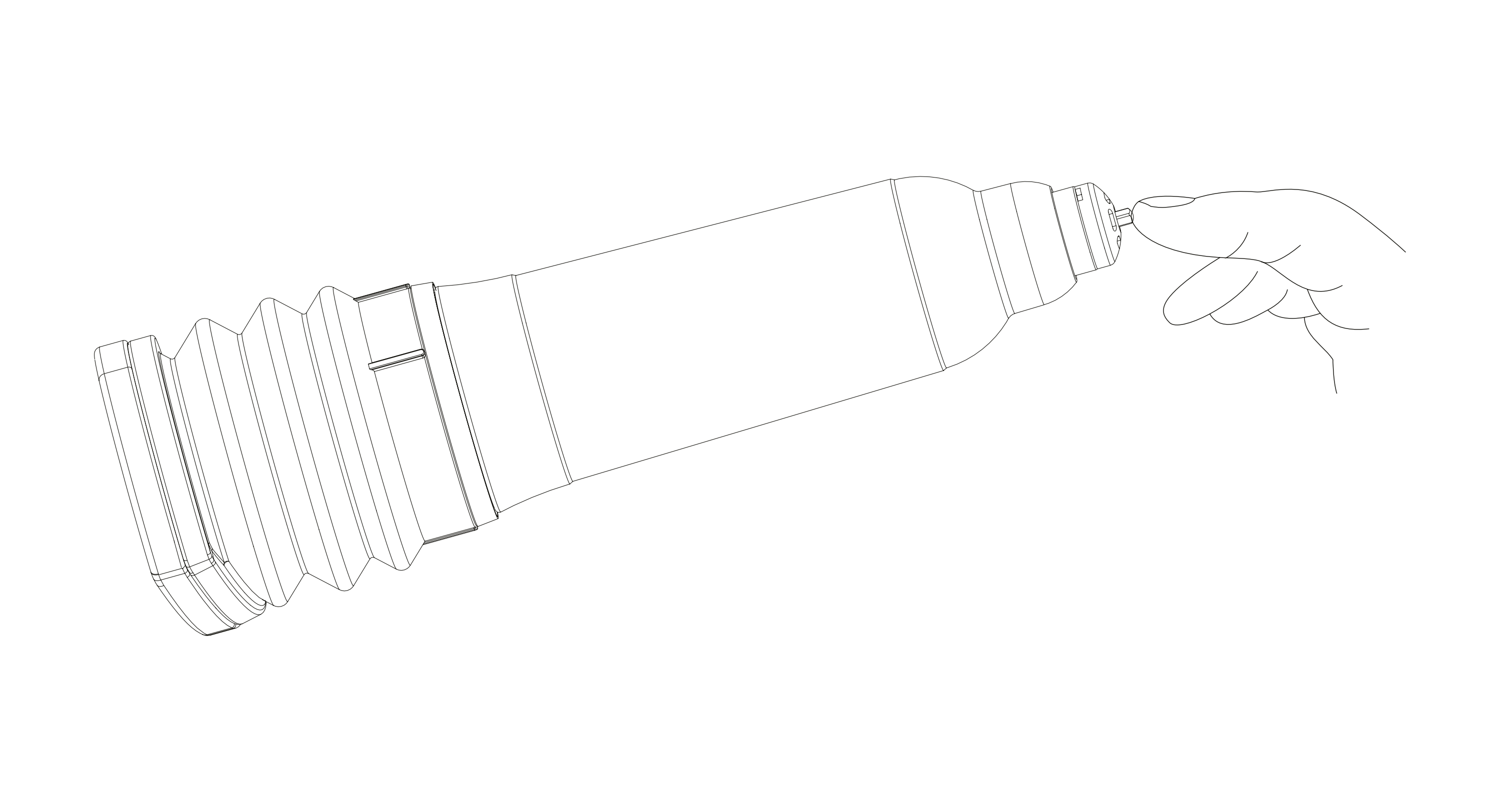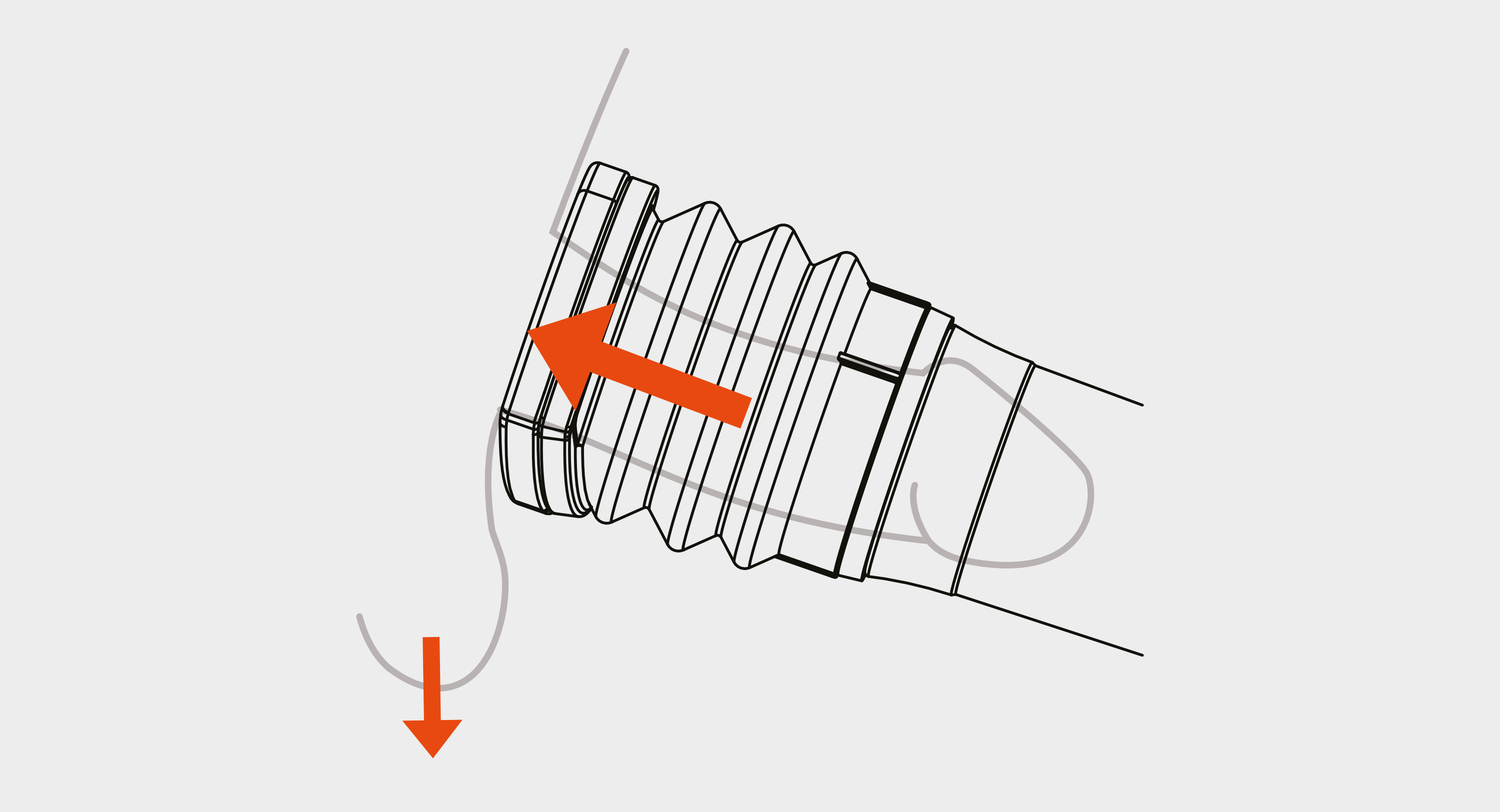

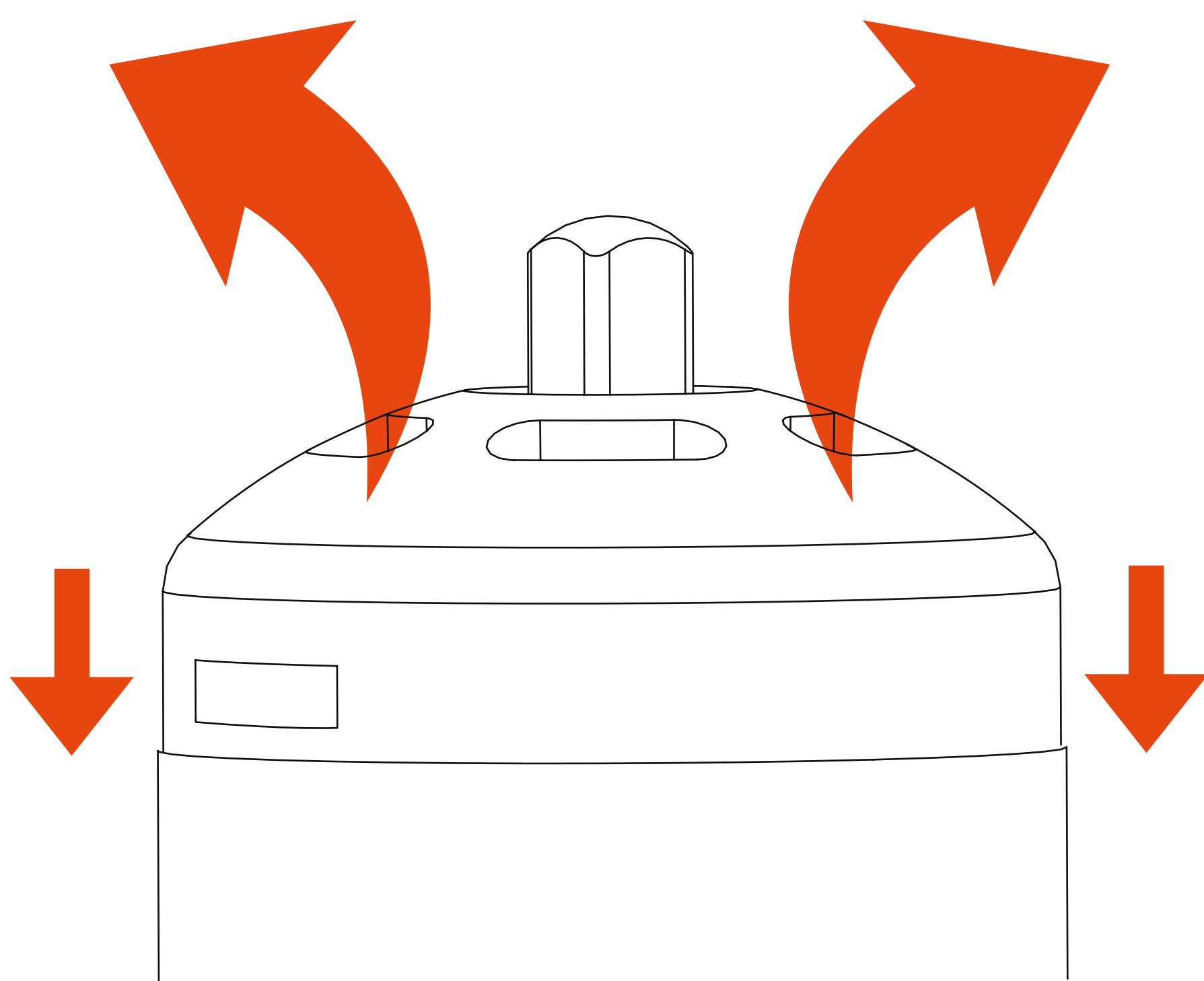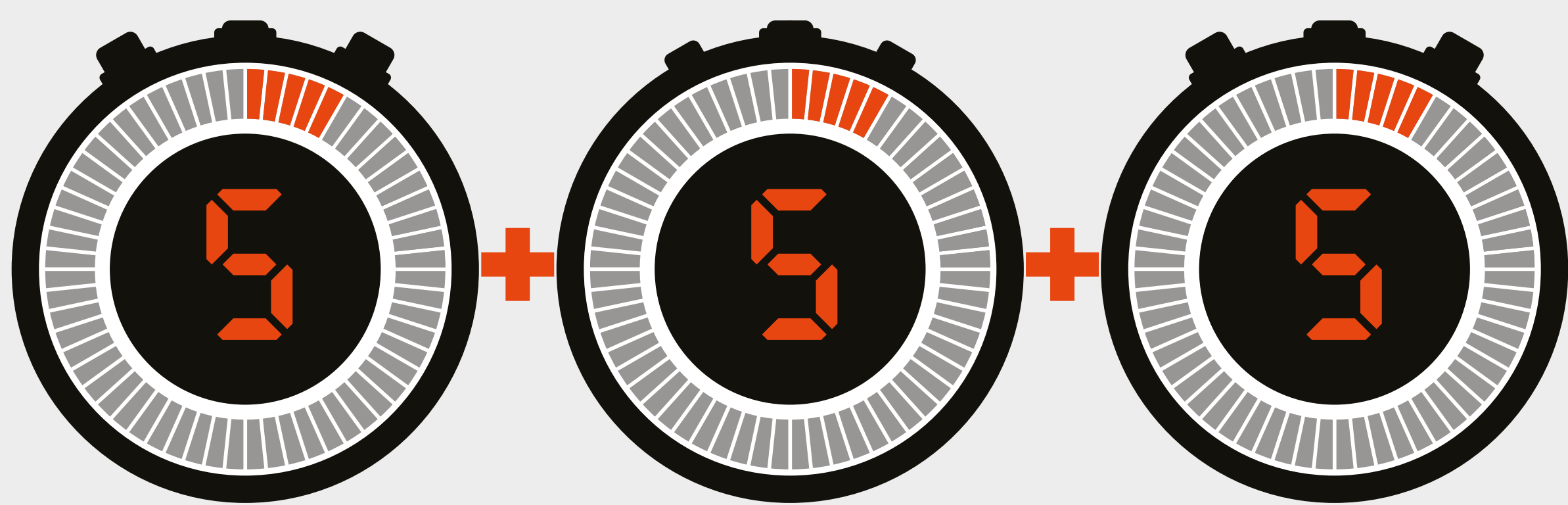

How to remove the valve cap correctly

Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to ensure that it functions to its full potential.

When removing your valve cap for cleaning ensure that the screwdriver is twisted and NOT prised.

