

bathmate®
J U S T A D D W A T E R

HYDROMAX

U S E R G U I D E

La Hidrobomba de Bathmate es un dispositivo externo que facilita la rigidez del pene. Utiliza tecnología de vacío para crear una rigidez suficiente del pene que permita el coito. Lea detenidamente las siguientes instrucciones.

ANTES DE COMENZAR

Instrucciones de seguridad importantes

- Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo si padece alguno de los siguientes síntomas: Síntomas de disfunción eréctil, diabetes, esclerosis múltiple, cirrosis de hígado, insuficiencia renal crónica, alcoholismo, aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, cardiopatía o enfermedad pulmonar, presión arterial elevada, enfermedad vascular cerebral, epilepsia, trastorno urinario (por ejemplo, problemas de riñón, vejiga o genitales) o leucemia.
- No utilice este dispositivo si:
 - padece anemia falciforme.
 - tiene un historial de erecciones prolongadas.
 - padece alteraciones hemorrágicas o actualmente toma alguna medicación de reducción de la hemorragia como aspirina.
- La Hidrobomba está diseñada para su uso personal e intransferible.
- Las Hidrobombas de Bathmate están diseñadas para ser utilizadas en agua, por lo que no se recomienda el uso de ningún tipo de lubricante con este dispositivo.
- Debe tener ambas manos libres y con fuerza para hacer funcionar el mecanismo de liberación del vacío. La falta de fuerza en las manos podría dificultar la retirada segura de este dispositivo.
- Debe mantener el control del producto en todo momento. Evite quedarse dormido mientras utiliza la Hidrobomba.
- No utilice este dispositivo mientras se encuentre bajo los efectos del alcohol o las drogas, ya que ello podría alterar su capacidad de juicio y aumentar el riesgo de lesión del pene.
- No utilice nunca este dispositivo si tiene una sensación de dolor cada vez menor en la zona del pene, ya que ello podría disminuir su capacidad para detectar cualquier lesión potencial provocada por el dispositivo.
- La utilización de una bomba de vacío podría contusionar o romper los vasos sanguíneos del pene o el escroto, provocando petequias, hemorragias o la formación de un hematoma.
- La utilización de una bomba de vacío podría agravar los padecimientos existentes, tales como la enfermedad de Peyronie, el priapismo o la estrechez uretral.
- El mal uso de este dispositivo podría causar una lesión en el pene.
- Si siente dolor agudo o malestar, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y consulte a su médico.

PRIMEROS PASOS

Uso recomendado

Con el fin de obtener un beneficio óptimo de la Hidrobomba y evitar un uso inadecuado que pueda provocar malestar, se recomienda encarecidamente que siga las instrucciones descritas a continuación:

ANTES DEL PRIMER USO: Lave la Hidrobomba con agua jabonosa caliente y limpia y aclárela abundantemente.

- Asegúrese de que la zona púbica esté bastante bien afeitada. Esto facilitará el sello de vacío contra la base pélvica.
- Es necesario un periodo de relajación de unos minutos en una ducha o baño calientes para que los testículos se ablanden, lo que permite mantenerlos apartados de la zona de sellado y evitar cualquier malestar.
- Aplique solo la cantidad mínima de presión de vacío necesaria para lograr la erección. Una presión de vacío excesiva y un bombeo demasiado fuerte podrían causar contusiones o lesionar el pene.
- Para lograr los mejores resultados en la rigidez de la erección y un flujo sanguíneo óptimo, lo mejor es retirar el dispositivo cada 2-3 minutos y dejar que el pene se retraiga. Masajee el pene flácido durante 2 minutos y, a continuación, vuelva a aplicar el dispositivo y repita el proceso. Debe hacerlo un máximo de 3 veces en una sesión 15 minutos.
- No utilice la Hidrobomba más de 15 minutos cada 24 horas.

Cómo funciona la Hidrobomba

La Hidrobomba funciona creando un sello de vacío en la zona púbica del usuario que rodea al pene flácido. Cuando la bomba se presiona hacia abajo contra el cuerpo, los fuelles se comprimen y el agua es expulsada desde el extremo de la bomba a través de la válvula abierta. Al soltarse, los fuelles se expanden y la válvula se cierra, creándose un vacío parcial dentro de la bomba. Esto hace que el pene se expanda y se llene de sangre, lo que provoca una erección. Al bombear de nuevo, el vacío aumenta y también lo hace el tamaño de la erección.

El usuario controla el nivel de vacío presionando la válvula hacia dentro contra el muelle, abriendo la válvula y permitiendo que el aire o el agua vuelvan a entrar en el cuerpo de la bomba, de forma que el vacío se libera de forma parcial o completa.

El vacío de las Hidrobombas Bathmate se crea por la fuerza de retroceso elástica de la bomba de fuelles, de forma que el usuario no puede superar los niveles de vacío parcial seguro permitidos por las normativas médicas de Europa y EE. UU.

IMPORTANTE

La punta negra de la parte superior de la válvula se mueve presionando hacia dentro y moviendo hacia la derecha o la izquierda, donde debe hacer “clic” para colocarse en su posición y cerrar la válvula. La posición cerrada solo debe usarse cuando se llena la Hidrobomba de agua en la ducha. El resto del tiempo, la punta negra debe estar en la posición central (abierta). Si la punta negra no está en la posición central, la Hidrobomba no funcionará correctamente.

Uso de la Hidrobomba en la ducha

1. Relájese unos minutos en la ducha.
2. Presione la punta negra con el dedo hasta la posición cerrada, retire el disco de inserción de confort (que evita que el aire quede atrapado) y, a continuación, vuelque la Hidrobomba bajo la ducha hasta que se llene de agua.
3. Vuelva a colocar el disco de inserción de confort.
4. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición cerrada. El fuelle puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
5. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
6. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, abra la válvula presionando la punta negra hacia la posición central y empiece a bombear.
7. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
8. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se queden comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
9. Asegúrese de seguir las instrucciones de uso correcto recomendadas.
10. Para quitarse la Hidrobomba, libere el vacío presionando hacia dentro la tapa de la válvula, para activar el mecanismo de liberación rápida, y deslice la Hidrobomba para extraerla.

Uso de la Hidrobomba en la bañera

1. Relájese unos minutos en la bañera.
2. Retire el disco de inserción de confort (para evitar que el aire quede atrapado) y llene la Hidrobomba con agua de la bañera.
3. Vuelva a colocar el disco de inserción de confort.
4. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición central (abierta). El fuelle puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
5. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colo-

cación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.

6. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, asegúrese de que la punta negra se encuentra en posición central (abierta) y empiece a bombear.
7. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
8. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se mantengan comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
9. Asegúrese de seguir las instrucciones de uso correcto recomendadas.
10. Para quitarse la Hidrobomba, libere el vacío presionando hacia dentro la tapa de la válvula, para activar el mecanismo de liberación rápida, y deslice la Hidrobomba para extraerla.

Limpieza y mantenimiento

Lave la Hidrobomba con agua jabonosa caliente y aclárela abundantemente. Déjela secar y guárdela en un lugar seco alejado de la luz solar.

Garantía y Atención al cliente

La Hidrobomba Bathmate está diseñada para ser utilizada durante muchos años. Está cubierta por 1 año de garantía en caso de piezas defectuosas o fallos en la fabricación. Para consultar todos los detalles de la garantía y contactar con Atención al cliente, visite: **www.bathmatedirect.com/support**




En el caso improbable de una reclamación de la garantía, DX Products Ltd se reserva el derecho de solicitar la devolución de la Hidrobomba o pruebas de los daños.





Código de identificación del producto (PID)



DX Products Ltd utiliza un código de identificación para todos sus productos. Todas las Hidrobombas Bathmate llevan un código PID único de 6 letras que encontrará en la etiqueta de su hidrobomba. Dicho código es la garantía de autenticidad. Le demuestra que está comprando un producto genuino, y no una copia falsa de peor calidad. Utilice su PID para autenticar su producto y registrar en línea la garantía en nuestra página web: **www.bathmatedirect.com/support**

Guía de resolución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN	COMENTARIOS
No se produce la erección / Erección parcial	No se está creando vacío por una fuga de aire causada por un sellado deficiente	Asegúrese de que el pelo púbico esté suficientemente bien recortado; extraiga y limpie la válvula	Este problema suele estar relacionado con la falta de experiencia; se soluciona a medida que se vaya acostumbrando al uso del dispositivo
Tirones en la piel del escroto	Testículos muy juntos del área sellada	Deje que los testículos se ablanden relajándolos con un baño o ducha caliente durante unos minutos antes de bombear	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si persiste el problema: support@bathmatedirect.com
Malestar o dolor			
Durante el bombeo	Bombeo demasiado rápido; tirones en el tejido del escroto	Bombee más despacio; siga practicando	El problema suele solucionarse a medida que se adapta al uso del dispositivo
Enrojecimiento, irritación o contusiones	Bombeo demasiado rápido; bombeo excesivo	Bombeo más lento; menos bombeo	Consulte a su médico si el problema persiste después de las primeras sesiones prácticas

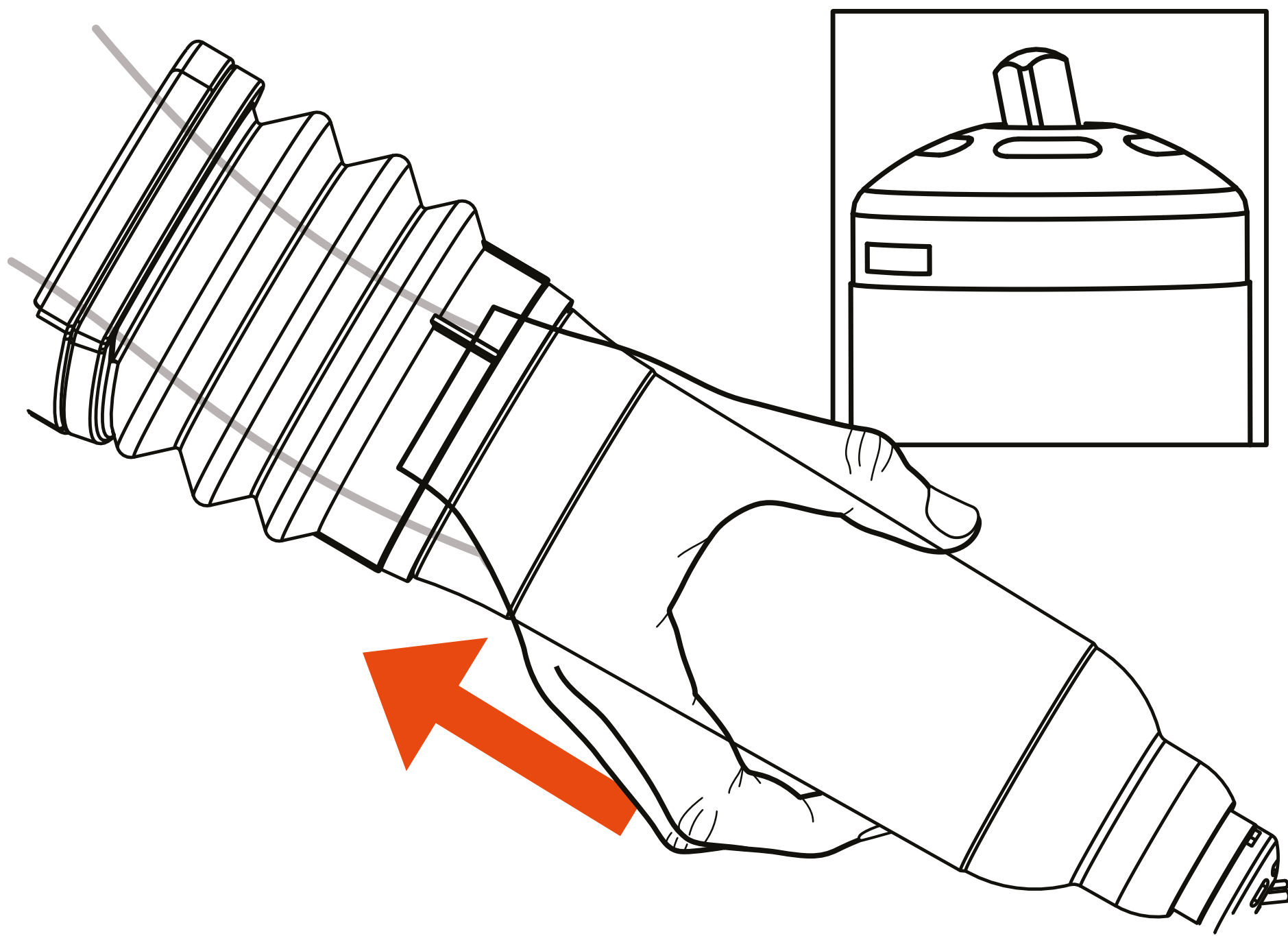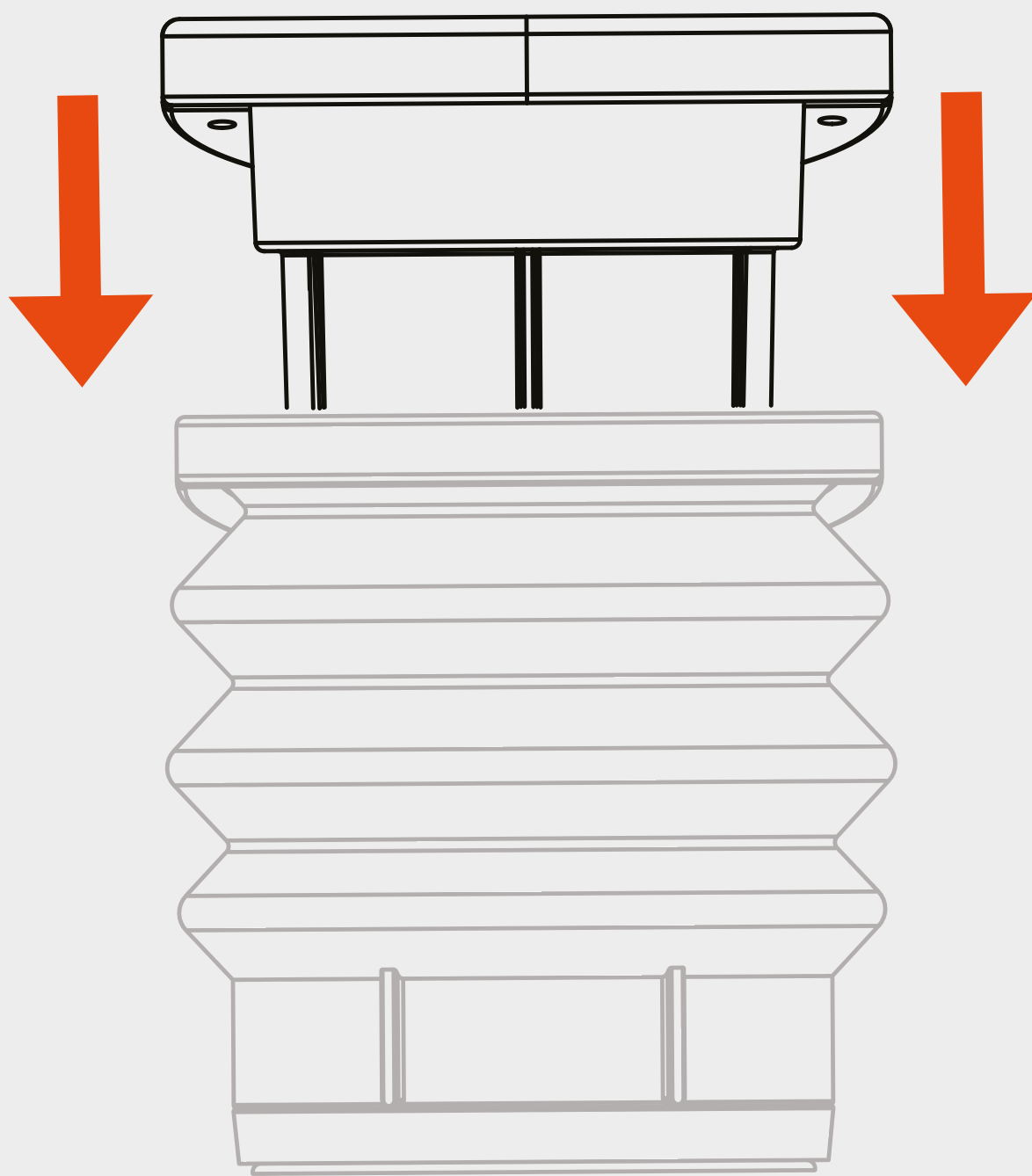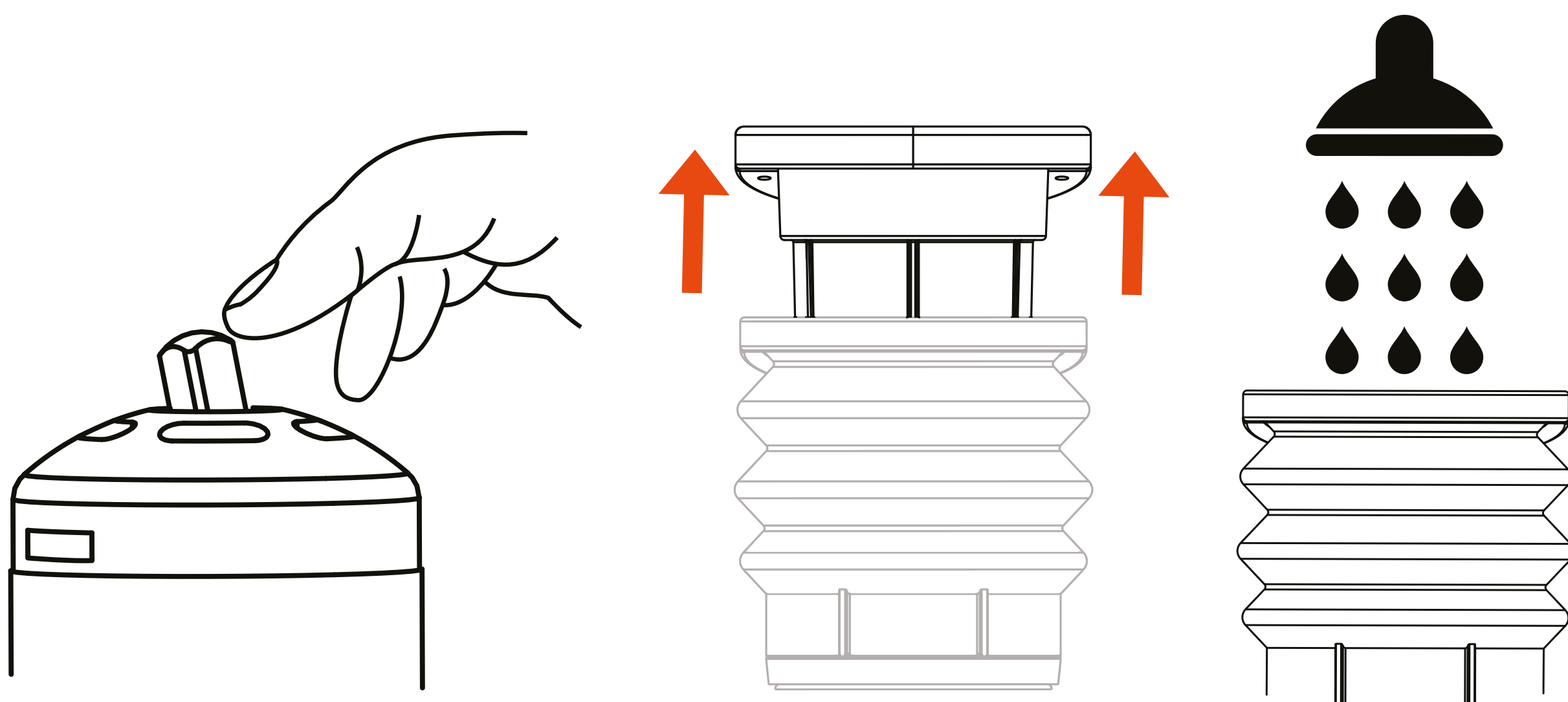

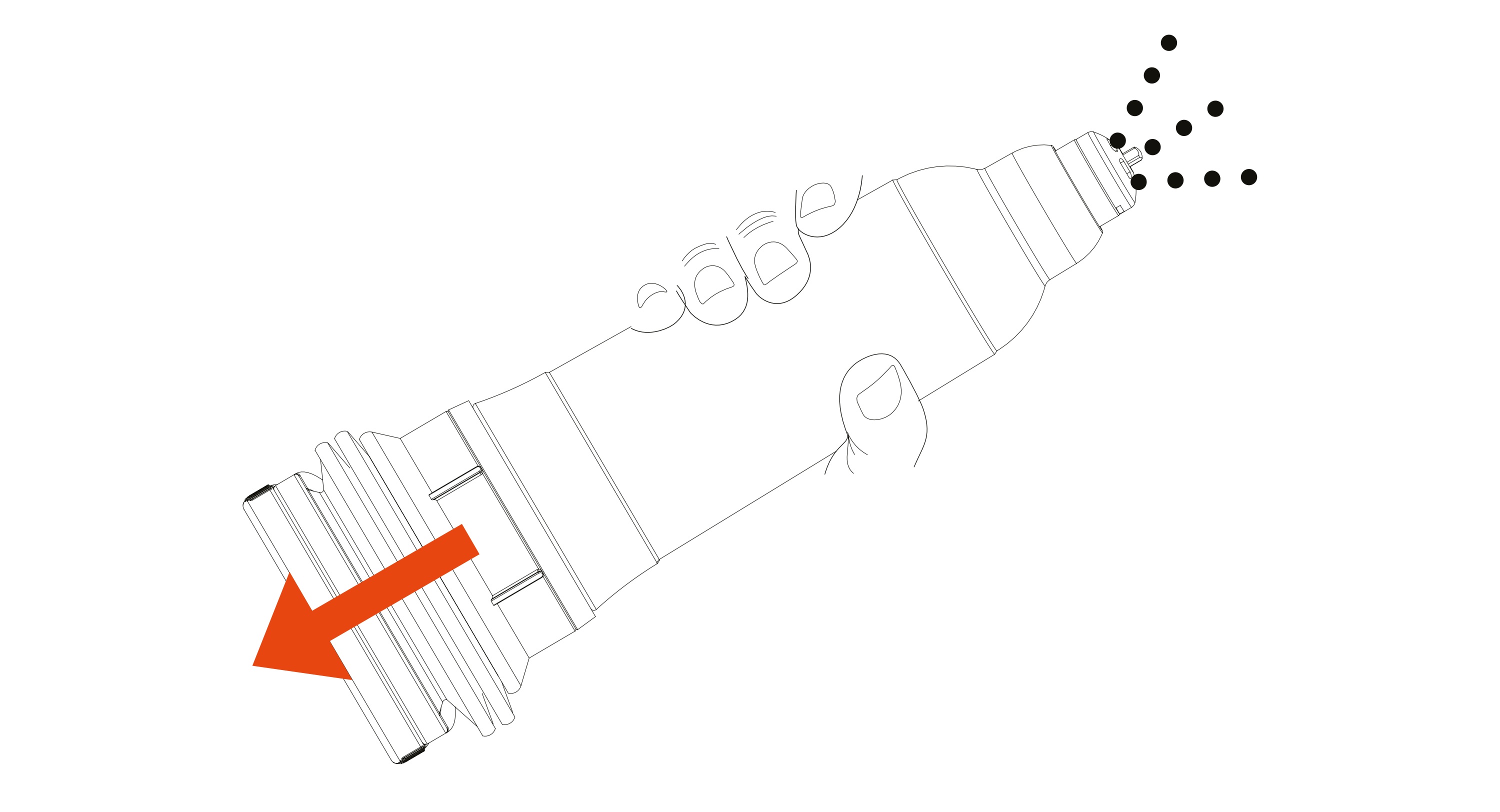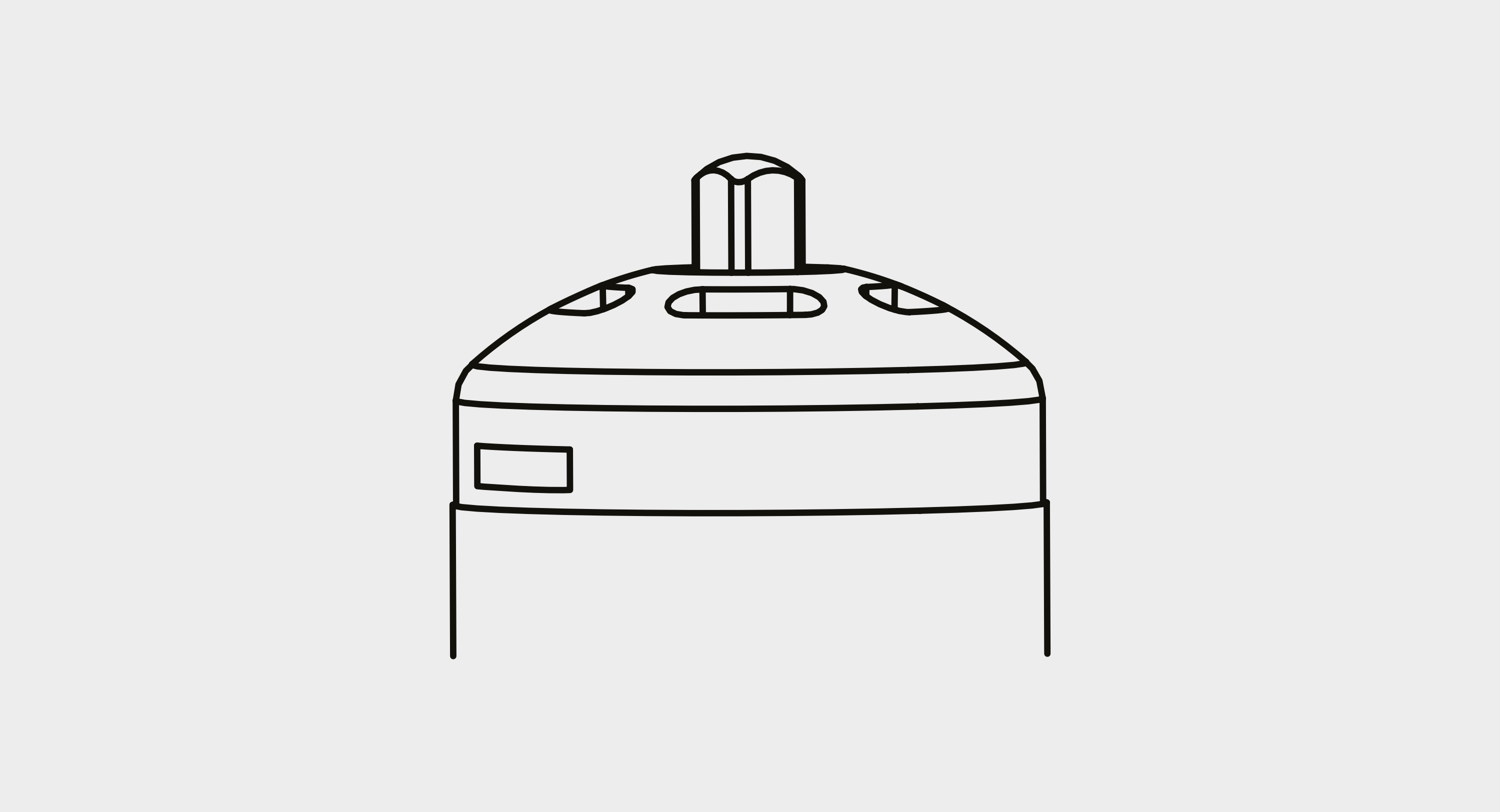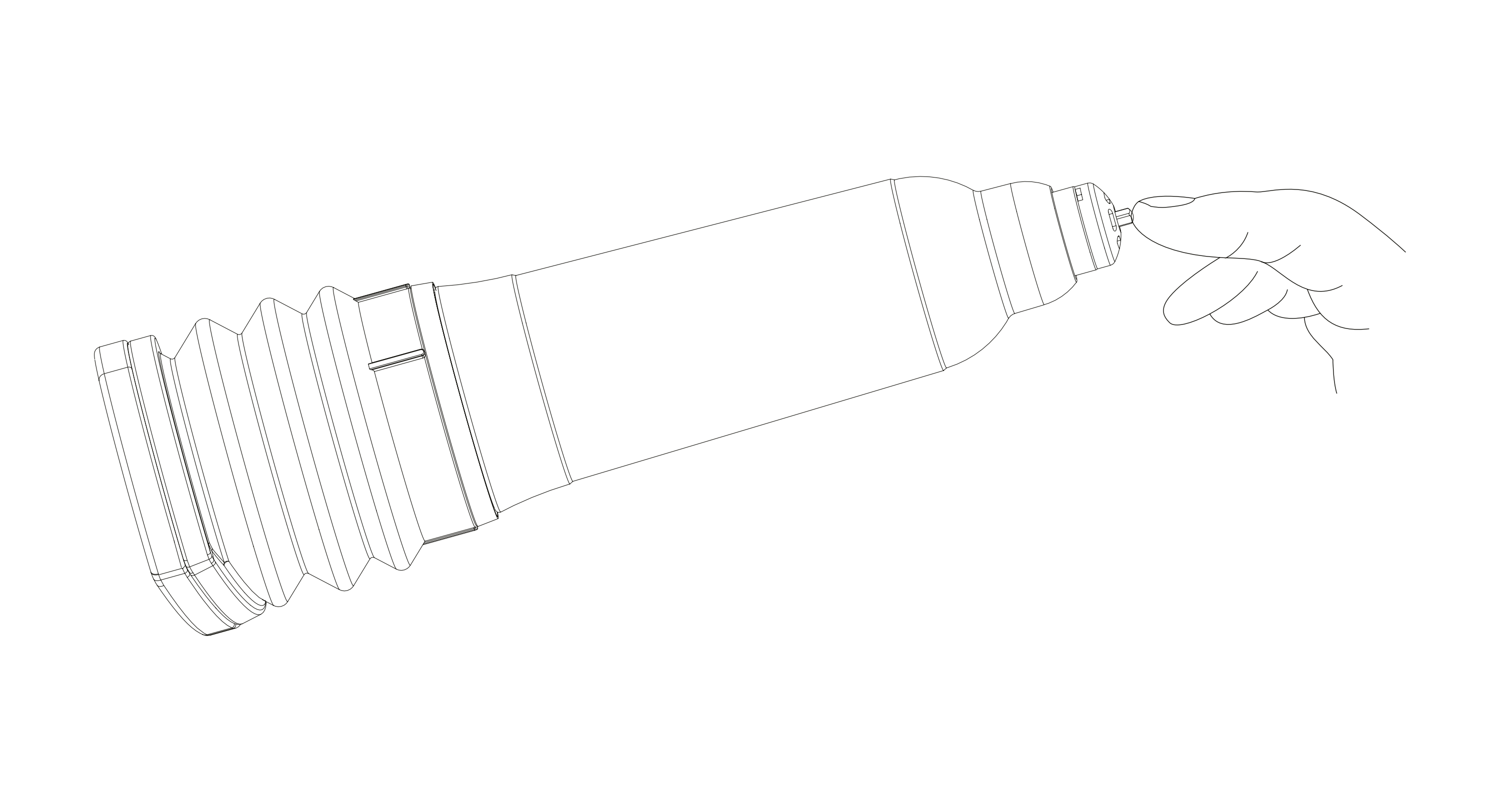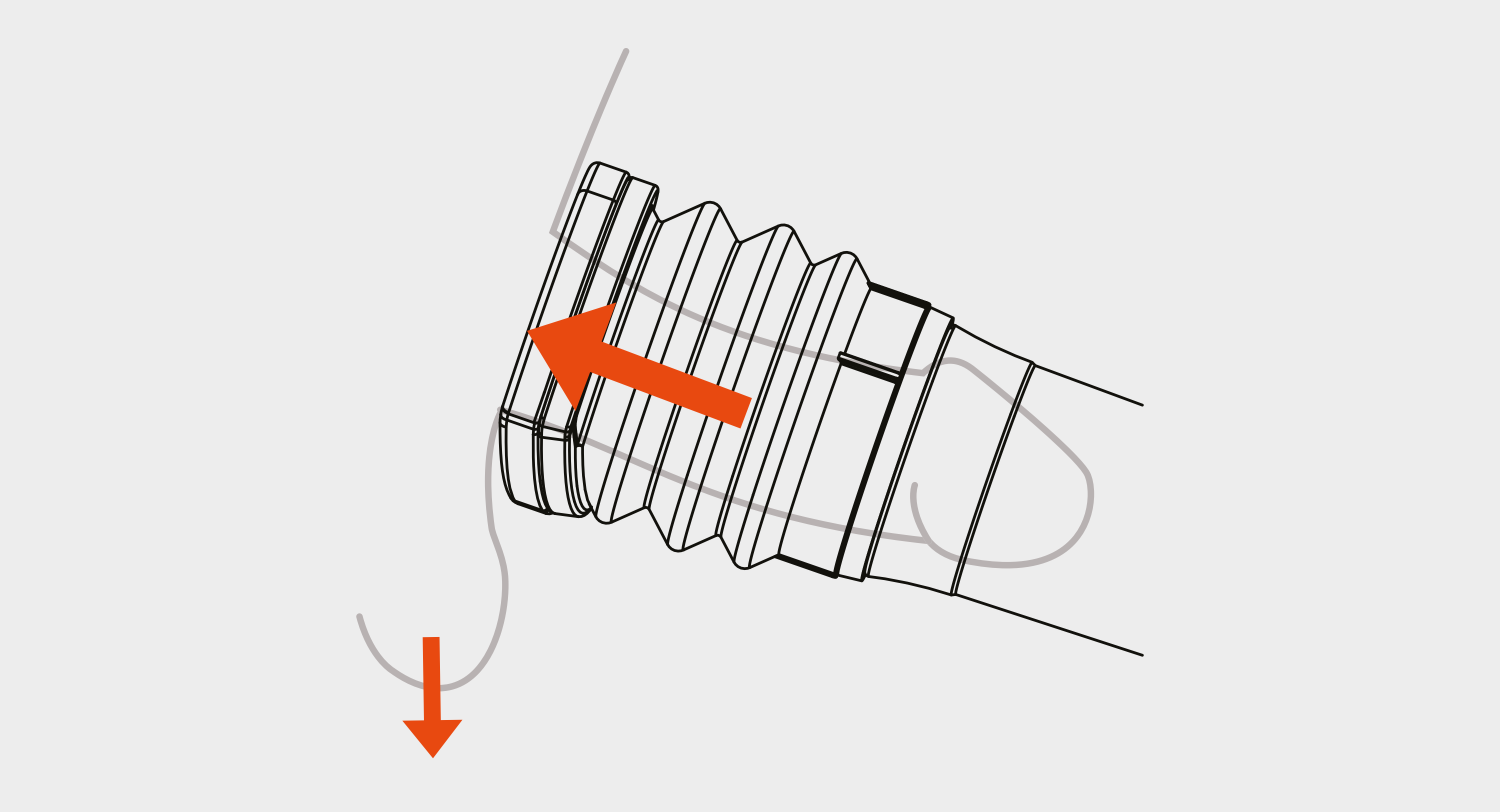

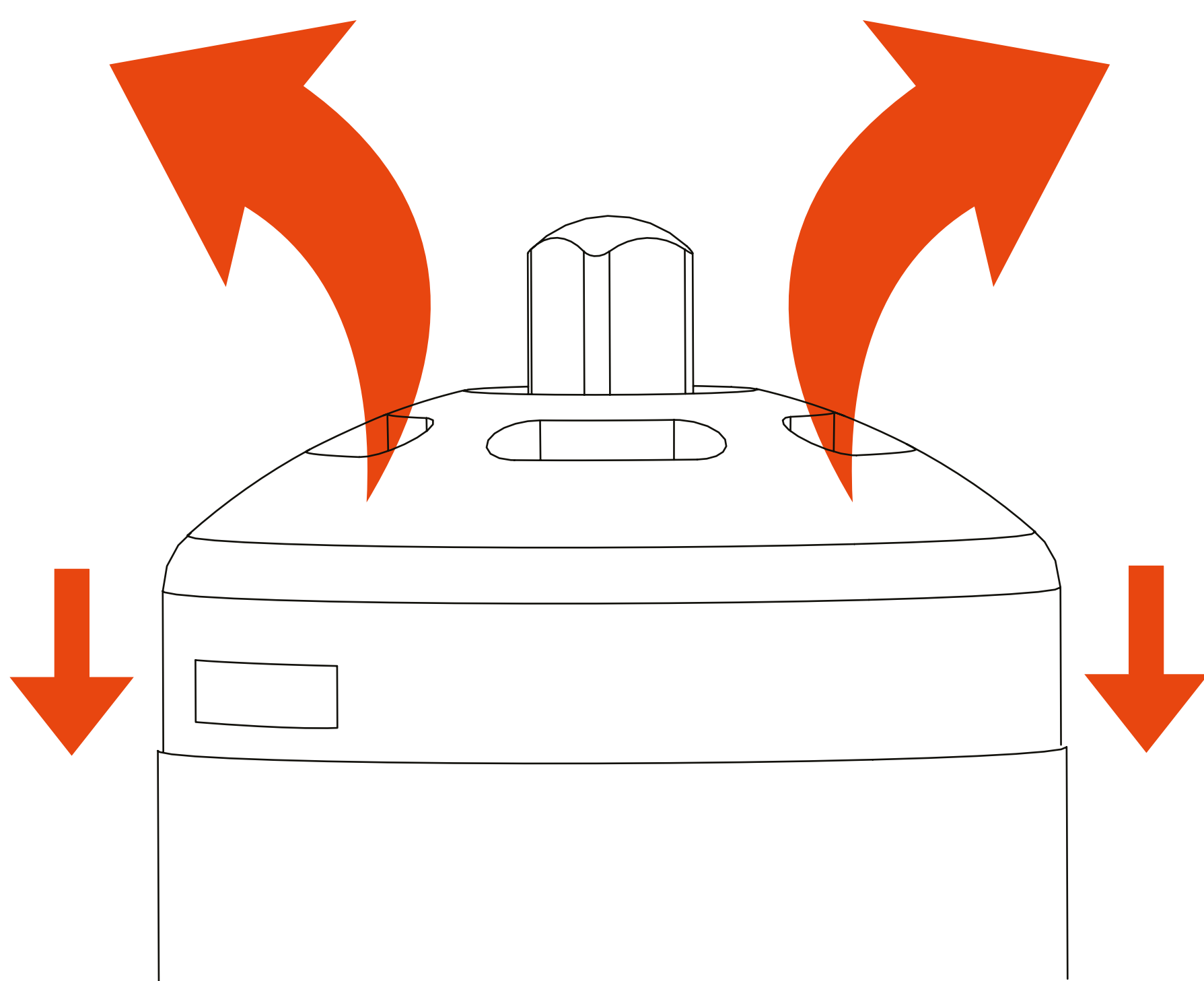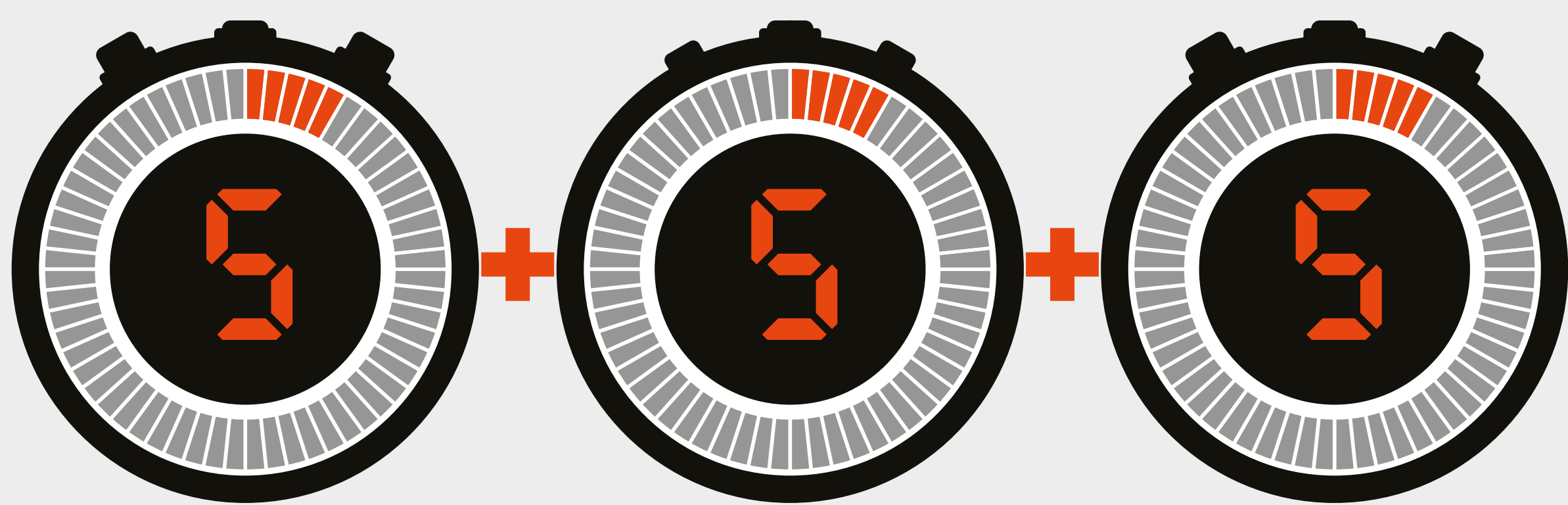

How to remove the valve cap correctly

Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to ensure that it functions to its full potential.

When removing your valve cap for cleaning ensure that the screwdriver is twisted and NOT prised.

