


bathmate®
J U S T A D D W A T E R

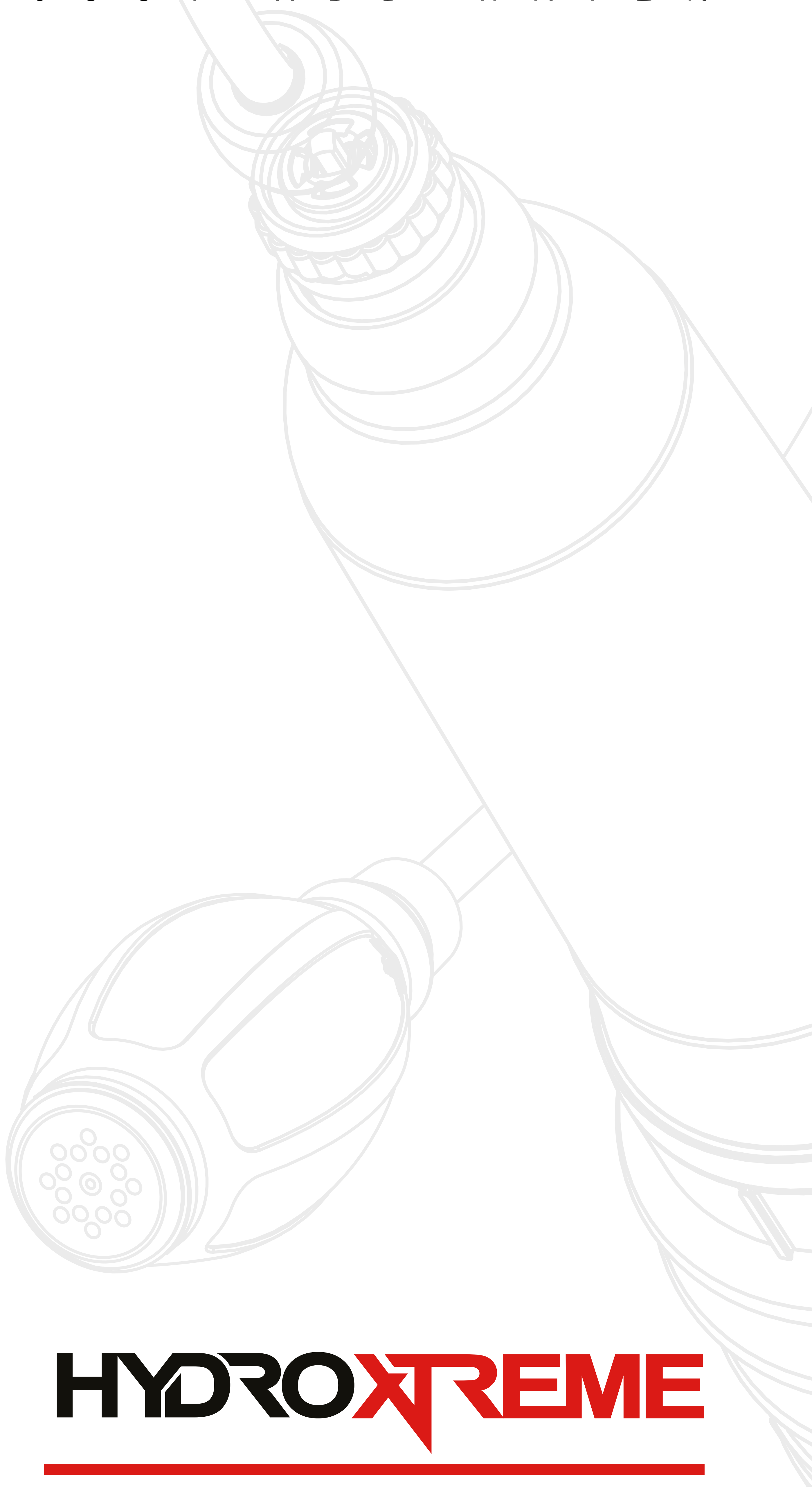

HYDROXTREME

U S E R G U I D E

バスメイト ハイドロポンプは、ペニスの外部に取り付け、吸引技術を使用することで勃起状態を起こし、性交時に必要なペニスの硬さが得られるようにする装置です。以下の指示をよくお読みください。

始める前に

安全に関する重要な警告

- 以下の疾患のうちいずれかに該当する場合は、使用前に医師に相談してください：勃起不全、糖尿病、多発性硬化症、肝硬変、慢性腎不全、アルコール依存症、心拍数や呼吸速度の増加、心臓または肺の疾患、高血圧、脳卒中、てんかん、泌尿器疾患（例：腎臓、膀胱、生殖器の疾患）、または白血病。
- 以下の内容に該当する場合は、本製品を使用しないでください：
 - 鎌状赤血球症を患っている。
 - 勃起が長時間続いたことがある。
 - 出血性疾患を患っている、または現在抗凝血薬（例：アスピリン）を服用している。
- ハイドロポンプは、一人での使用に向けて設計されています。
- バスメイト ハイドロポンプは水で使用するよう設計されているため、潤滑剤の使用は推奨されません。
- 手が完全に空いており、真空吸引装置を操作する力がある状態で使用してください。手の力が弱いと、装置の安全な取り外しが困難になる場合があります。
- 必ず、常に製品をコントロールできる状態を維持してください。ハイドロポンプの使用中に眠らないようにしてください。
- アルコールやドラッグを摂取している状態で、本製品を使用しないでください。判断力が鈍っていることで、ペニスが負傷するリスクがあります。
- ペニス周辺部において痛みに対する感覚が鈍っている場合、本製品を決して使用しないでください。本製品の使用によるけがの可能性に気付かない危険があります。
- バキュームポンプの使用により、ペニスまたは陰嚢内の血管が傷つくことや、破裂することがあります。その結果として、点状出血や大量出血、または血腫の形成が起こる場合があります。
- ペイロニー病、持続勃起症、尿道狭窄の症状がある場合、バキュームポンプの使用によりその症状が悪化することがあります。
- 本製品を適切に使用しないと、ペニスの負傷につながる可能性があります。
- 強い痛みや不快感を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

使用方法

使用にあたっての推奨事項

ハイドロポンプの効果を最大限に得ると同時に、不適正な使用により不快感が生じることを防ぐため、以下の指示に従うことを強くおすすめします。

初めて使用する場合:石鹸を含んだ清潔なお湯でハイドロポンプを洗浄し、よく洗い流してください。

- 陰部の毛がある程度短く手入れされていることを確認してください。これにより、骨盤部分にバキュームがよく密着するようになります。
- 睾丸を柔らかくするため、数分間温かいシャワーを浴びるか、浴槽に浸かりリラックスすることが必要です。これにより、バキュームの密着部に睾丸が入り込むことを防ぎ、使用時における不快感を避けることができます。
- 勃起状態を起こすのに必要な、最小限の真空圧力のみかけるようにしてください。過度な真空圧力をかけ、ポンプの力が強くなり過ぎると、ペニスの傷やけがに繋がる恐れがあります。
- 勃起の方さや血液の流れにおいて最良の結果を得るために、装置を2〜3分ごとに取り外し、ペニスを勃起していない状態に戻すことが推奨されます。勃起していない状態を2分間保ち、再度装置を取り付けてプロセスを繰り返してください。15分間の中でこれを繰り返すのは、最大3回にしてください。
- ハイドロポンプを、24時間以内に15分以上使用しないでください。

ハイドロポンプの仕組み

ハイドロポンプは、使用者の局部に真空で密着し、勃起していない状態のペニスを囲み込むことで機能します。ポンプを体に押し付けるとベローズが圧縮され、ポンプの先端で開いているバルブから水が排出されます。排出されるとベローズが広がってバルブが閉まり、ポンプ内の一部が真空状態になります。これによりペニスが増大して充血し、勃起状態になります。再度ポンピングを行うことでより真空状態となり、勃起の大きさも大きくなります。

真空レベルは、使用者がバルブをスプリングに対して内側に押し込むことでコントロールできます。バルブを開けると空気や水がポンプの本体に再度入り、これにより部分的または完全に真空状態がなくなります。

バスメイト ハイドロポンプの真空状態は、ベローズゲートルポンプの弾性収縮力により生じるものであるため、使用者の操作により、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国の医療規制で認められている安全な部分的真空レベルを超えることはありません。

重要

バルブの上部についている黒いピップは、内側に押し込んだり、左右に動かしたりすることで移動させます。バルブを閉じる位置に、カチッと音がするまではめてください。閉じ位置は、シャワー内でไฮドロポンプに水を満たす際のみ使用してください。それ以外の時は、黒いピップは常に中央（開き）位置にあるようにしてください。黒いピップが中央位置にないと、ไฮドロポンプが正しく作動しないことがあります。

ไฮドロポンプのシャワーでの使用

1. シャワーを浴びながら数分間リラックスします。
2. バルブのキャップを時計回りに回転させ、バルブをロックします。
3. 黒いピップを指で閉じ位置の方へ押し、コンフォートインサートを取り外します（空気の侵入を防ぐため）。それから、ไฮドロポンプを逆さにし、一杯になるまでシャワーの水で満たします。
4. コンフォートインサートを取り替えます。
5. ไฮドロポンプを勃起していない状態のペニスにかぶせ、黒いピップが閉じ位置にある状態で骨盤部分に押し付けます。チャンファーはつけ心地に応じて、上向きまたは下向きにすることができます。
6. 体にしっかりと密着させ、快適な位置が保たれ、睾丸が完全に外に出ていることを確認します。
7. ไฮドロポンプがわずかに上を向いた状態で、黒いピップを中央位置に押し、バルブを開き、ポンピングを開始します。
8. ポンピングを行う際は、黒いピップが中央（開き）位置にあることを確認してください。
9. ゆっくりと均等にポンピングを行います。ベローズの圧力が抜ければ、最適な真空状態が得られていることになります。
10. ハンド ボールポンプをホースとともに使用するか、ポンプに直接接合すると、より真空状態になりコントロールできるようになります。ハンドボールポンプとไฮドロポンプのバルブは、継続的な接合を行うよう設計されていませんのでご注意ください。そのため、ハンドボールの使用中は正しい位置に維持されており、最適な真空状態が得られたら取り外す必要があります。より継続的に接合させたい場合は、ホースコネクターを使用してください。
11. 推奨事項に従っていることを確認してください。
12. ไฮドロポンプを取り外すには、バルブのキャップを反時計回りに回転させてロック解除し、キャップを内側に押し込むことでクイックリリース装置を有効にします。これにより真空状態がなくなり、ペニスからไฮドロポンプを取り外すことができます。

ハイドロポンプの浴槽での使用

1. バスタブの中で、数分間リラックスします。
2. コンフォートインサートを取り外し(空気の侵入を防ぐため)、浴槽の水でハイドロポンプを満たします。
3. コンフォートインサートを取り替えます。
4. ハイドロポンプを勃起していない状態のペニスにかぶせ、黒いピップが中央(開き)位置にある状態で骨盤部分に押し付けます。チャンファーはつけ心地に応じて、上向きまたは下向きにすることができます。
5. 体にしっかりと密着させ、快適な位置が保たれ、睾丸が完全に外に出ていることを確認します。
6. ハイドロポンプがわずかに上を向いた状態で、黒いピップが中央(開き)位置にあることを確認してポンピングを開始します。
7. ポンピングを行う際は、黒いピップが中央(開き)位置にあることを確認してください。
8. ゆっくりと均等にポンピングを行います。ベローズの圧力が抜ければ、最適な真空状態が得られていることになります。
9. ハンド ボールポンプをホースとともに使用するか、ポンプに直接接合すると、より真空状態になりコントロールできるようになります。ハンドボールポンプとハイドロポンプのバルブは、継続的な接合を行うよう設計されていませんのでご注意ください。そのため、ハンドボールの使用中は正しい位置に維持されており、最適な真空状態が得られたら取り外す必要があります。より継続的に接合させたい場合は、ホースコネクターを使用してください。
10. 推奨事項に従っていることを確認してください。
11. ハイドロポンプを取り外すには、バルブのキャップを反時計回りに回転させてロック解除し、キャップを内側に押し込むことでクイックリリース装置を有効にします。これにより真空状態がなくなり、ペニスからハイドロポンプを取り外すことができます。

洗浄とメンテナンス

ハイドロポンプを、石鹼を含んだ温かい水で洗浄し、よく洗い流します。直射日光の当たらない乾燥した場所で乾燥させ、保管してください。

カスタマーケアおよび保証

バスメイト ハイドロポンプは、何年にもわたり問題が起きることなくご使用いただけるよう設計されています。部品が欠けている、または製品が正しく作動しない場合は、2年間の保証が適用されます。カスタマーケアおよび保証に関するすべての情報は、こちらよりご覧いただけます：[**www.bathmatedirect.com/support**](http://www.bathmatedirect.com/support)






万が一保証の利用をご希望の場合、DX Products Ltdはハイドロポンプの返品、または損傷の証拠の提供を求める権利を有します。





製品識別コード (PID)





DX Products Ltdは、すべての製品に対し識別コードを使用しています。バスメイト ハイドロポンプの製品一つひとつに6桁のPIDコードがつけられており、ご利用のハイドロポンプのラベルに記載されています。このコードは製品が真正であることを保証するものであり、偽造製品ではなく真正のものを購入されていることを証明するものです。当社ウェブサイトにて、PIDコードを使用してお持ちの製品を認証し、オンラインで保証の登録を行ってください：
www.bathmatedirect.com/support

トラブルシューティング ガイド

考えられる原因	考えられる原因	解決法	コメント
勃起が起きない 部分的にしか勃起しない	体に密着していな いため空気が漏れ ており、真空状態に なっていない	陰毛が適度に手入 れされていることを 確認します。バルブ を取り外し、掃除し ます	この問題は、使い慣れていないた めに生じることが多いため、装置 の使用に慣れるにつれて改善さ れます
陰囊の肌が引っ張 られる	睾丸がシーリング・ エリアに近すぎる	ポンピングの前に、 適温の入浴やシャ ワーで数分間リラッ クスし、睾丸を柔ら かくします	問題が解決しない場合は、カスタ マーサポート (support@bathmatedirect.com) までご連絡ください
不快感や痛み			
ポンピング中	ポンピングが速す ぎる、陰囊の組織が 引っ張られている	ポンピングの速度 を落とす、装置の使 用を継続する	装置の使用に慣れるにつれ、問題 が解決する場合はほとんどです
赤くなる、炎症が起 きる、傷ができる	赤くなる、炎症が起 きる、傷ができる	ポンピングの速度 を落とす、ポンピン グの回数を減らす	始めの練習セッションを終えた後 もこの問題が続く場合は、医師に 相談してください

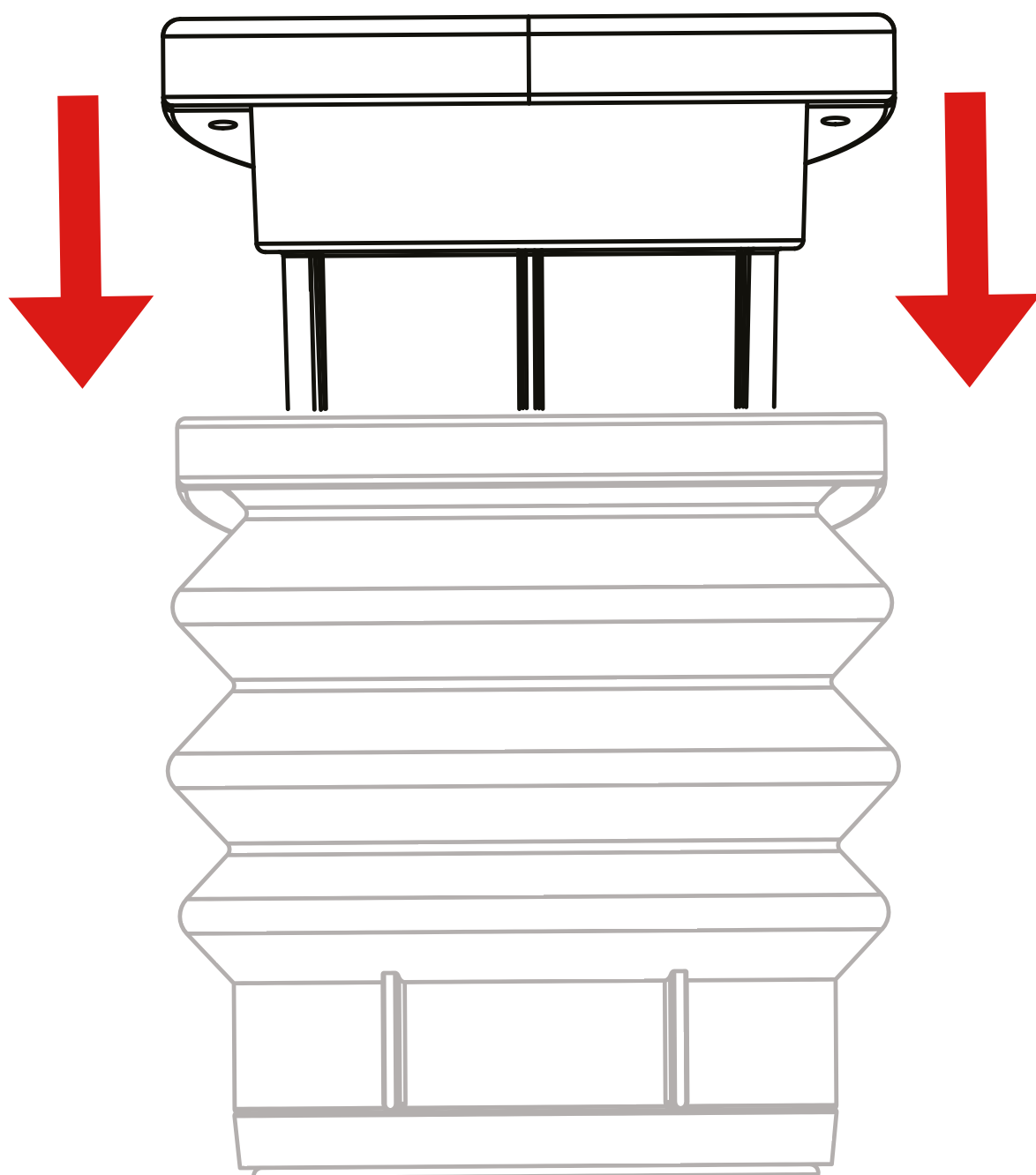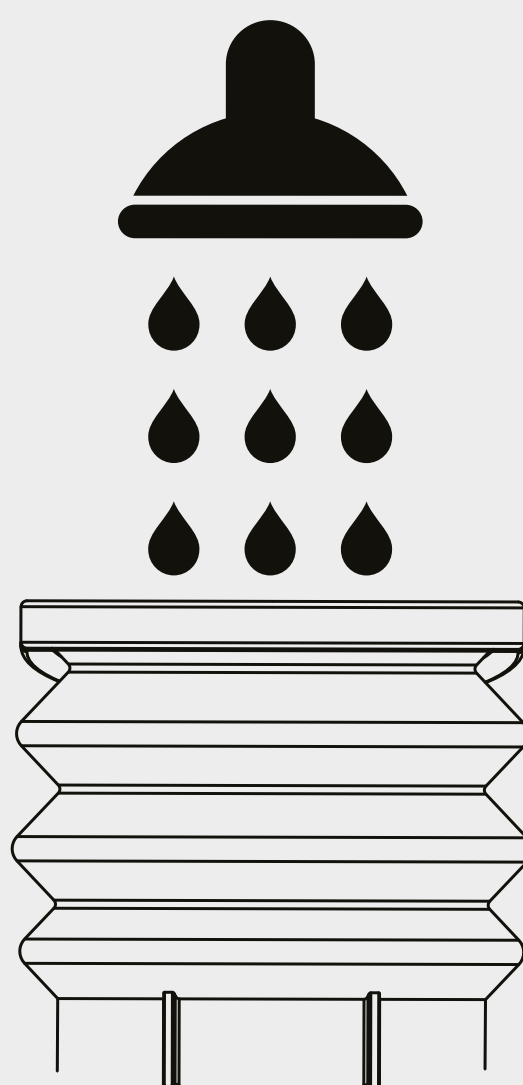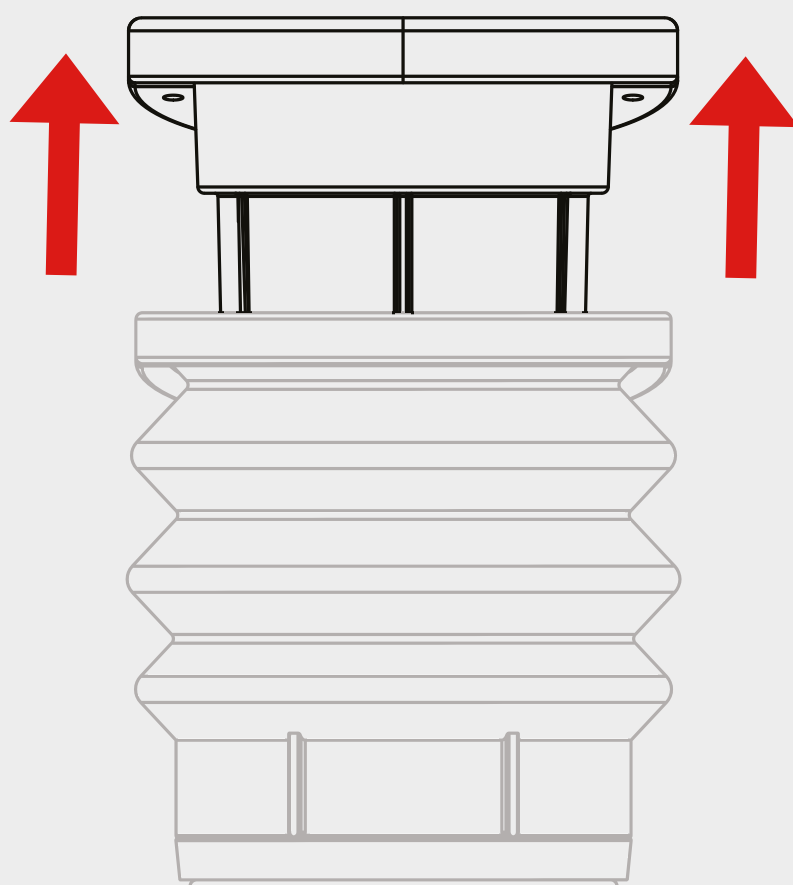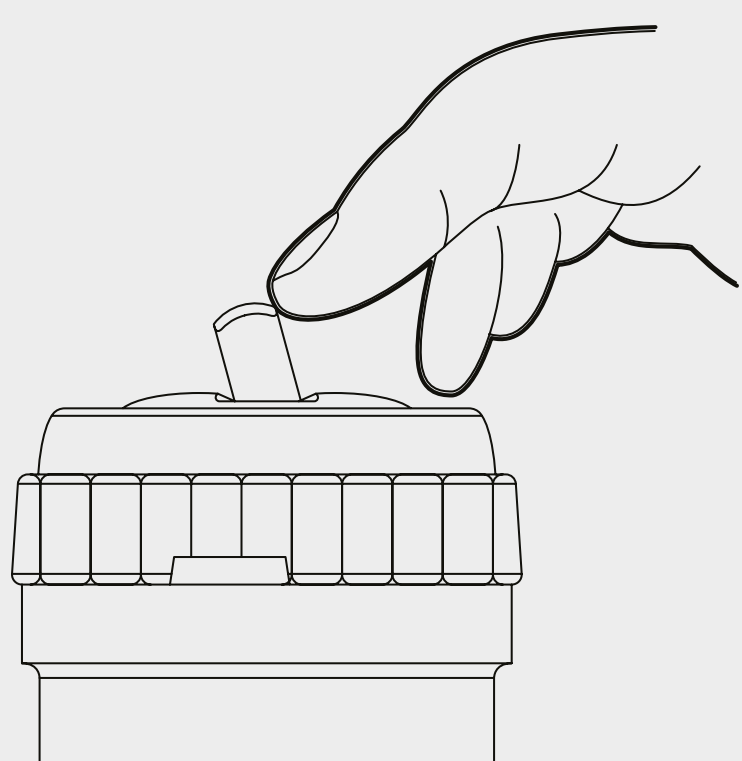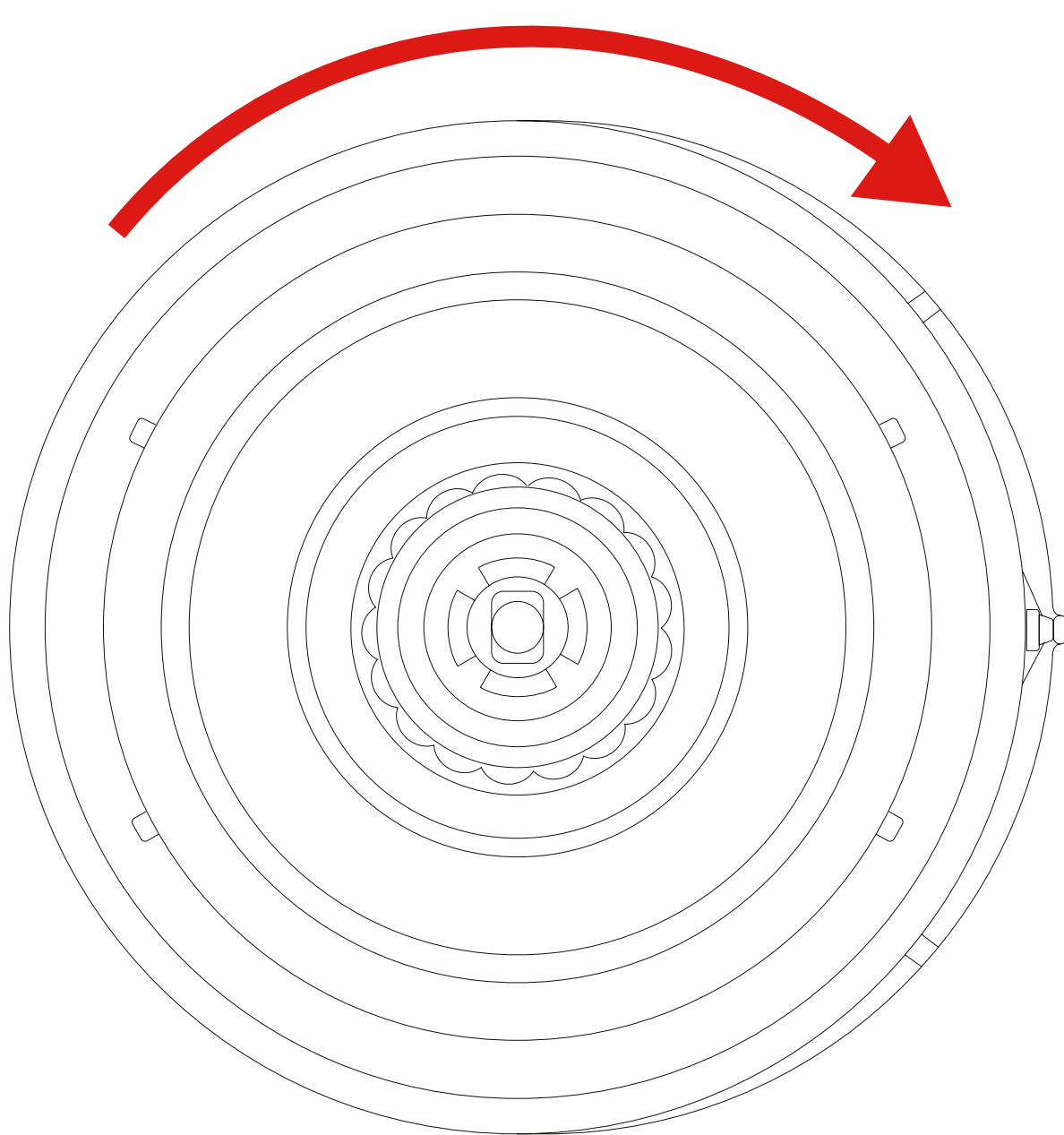

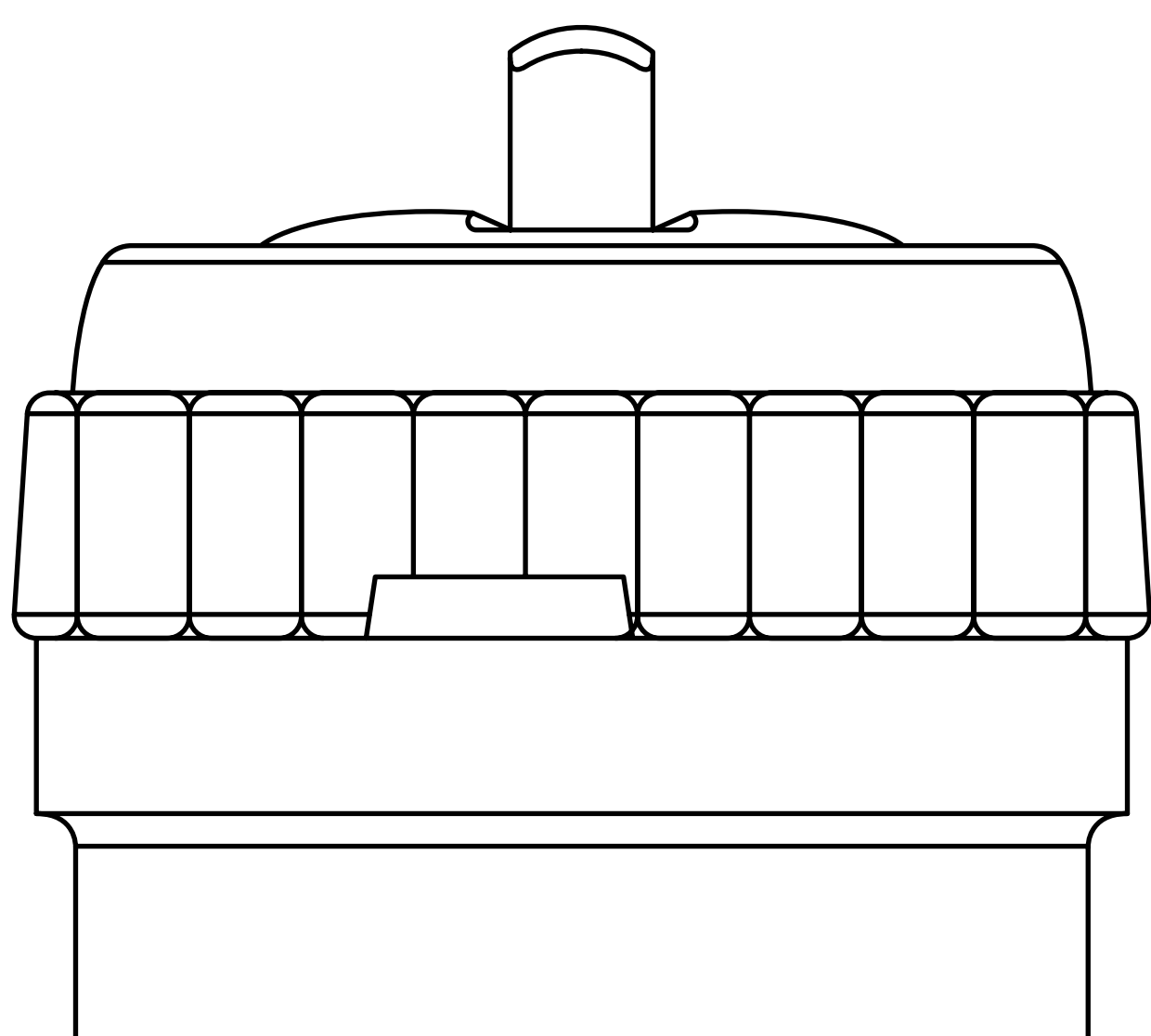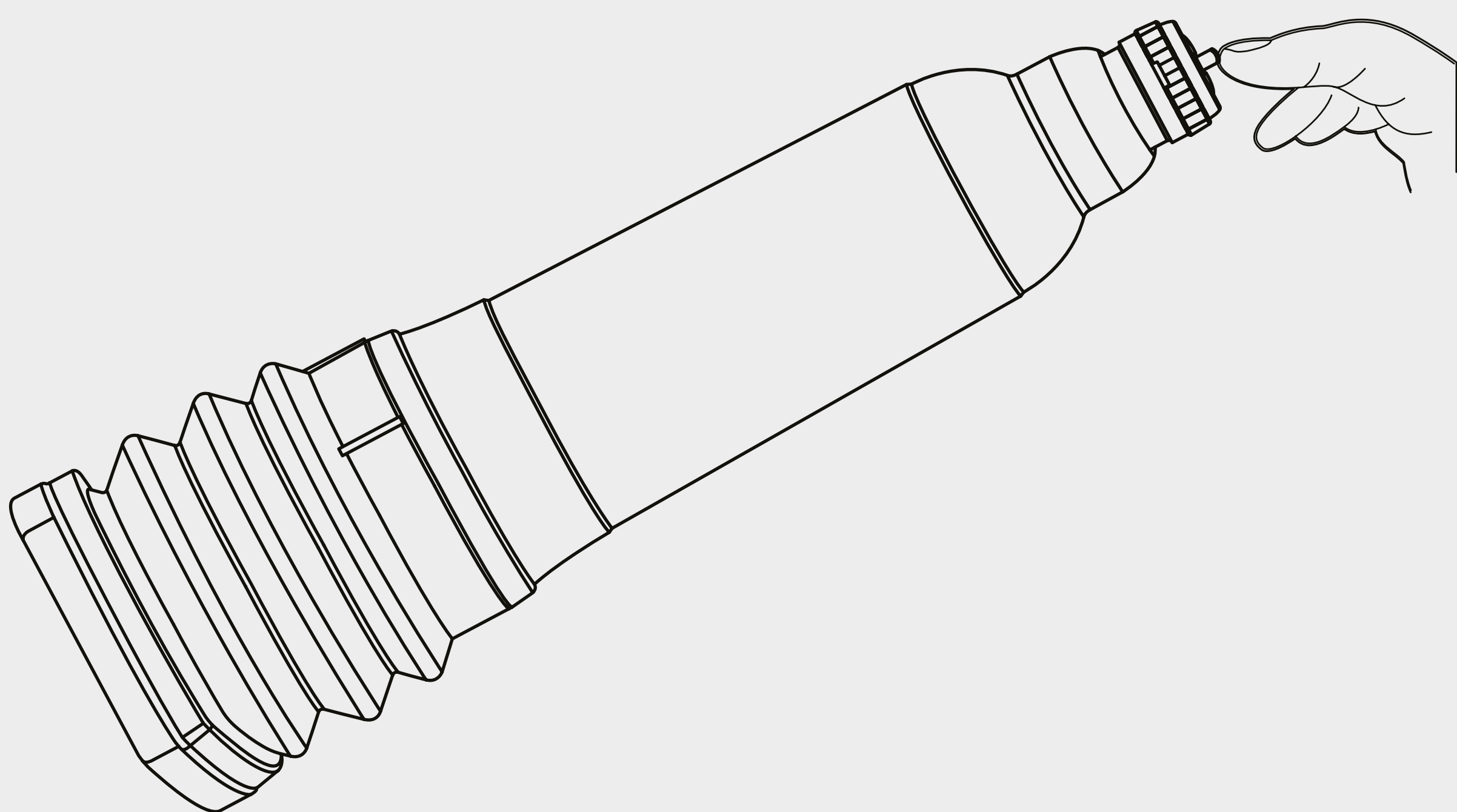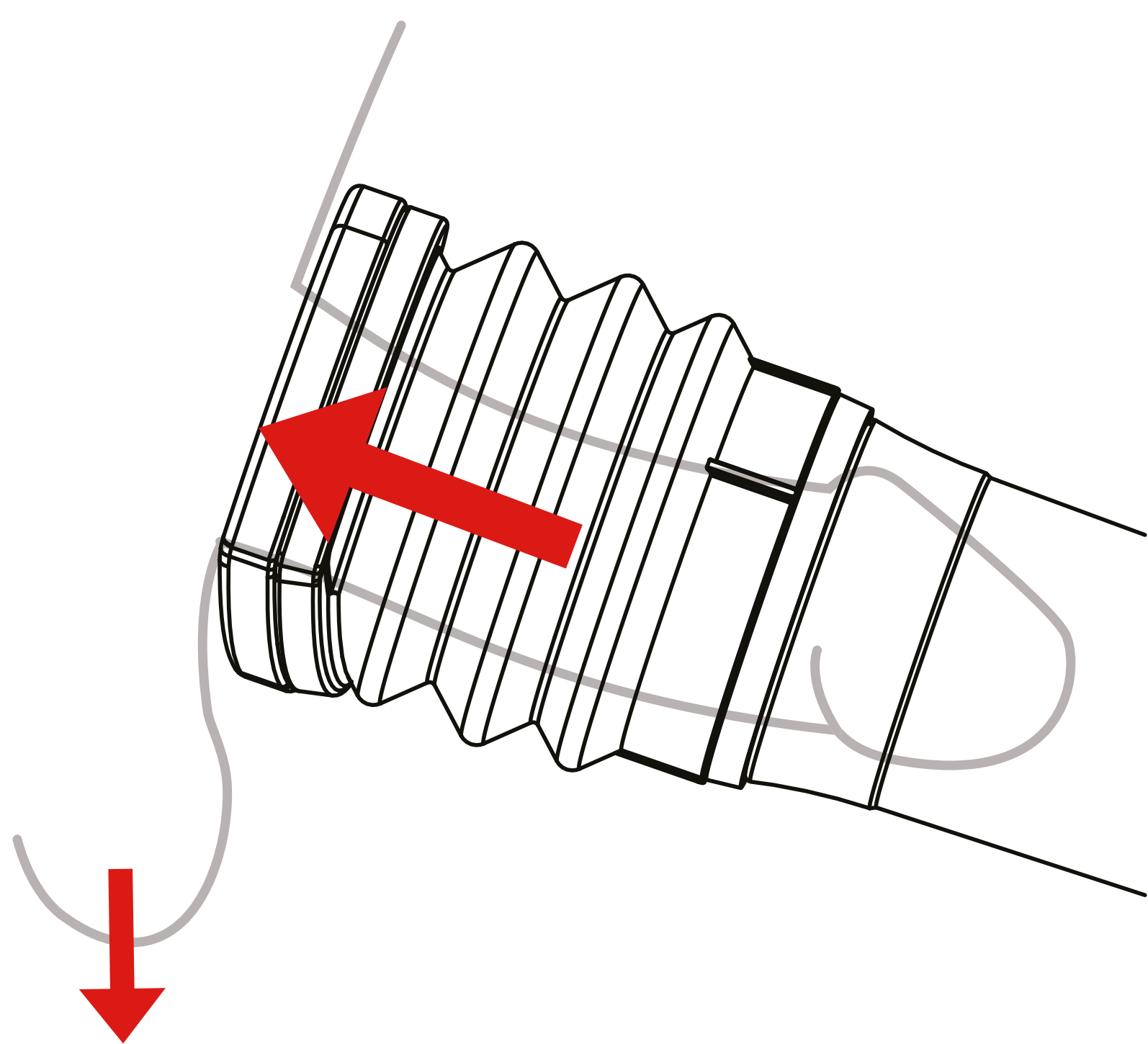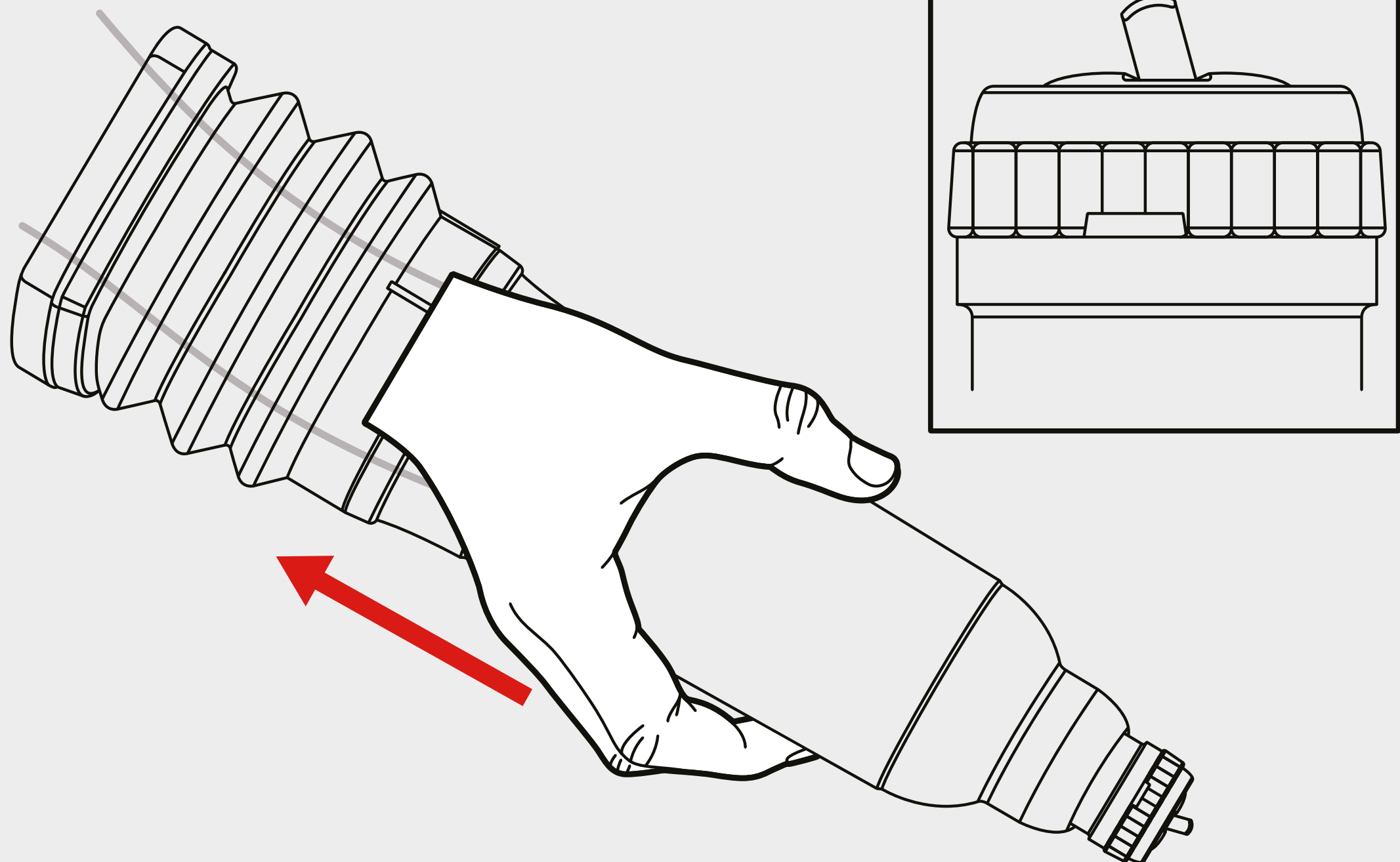

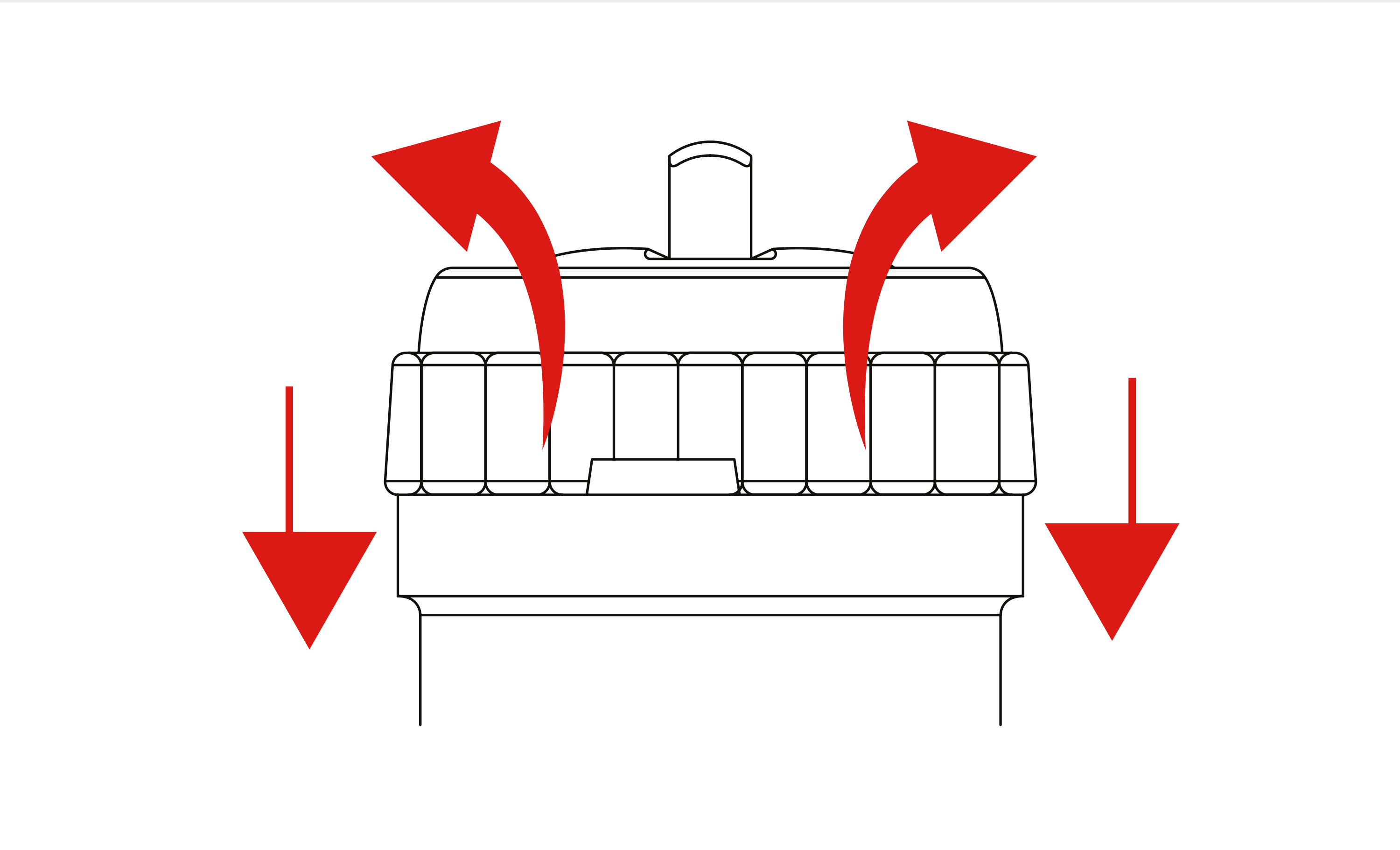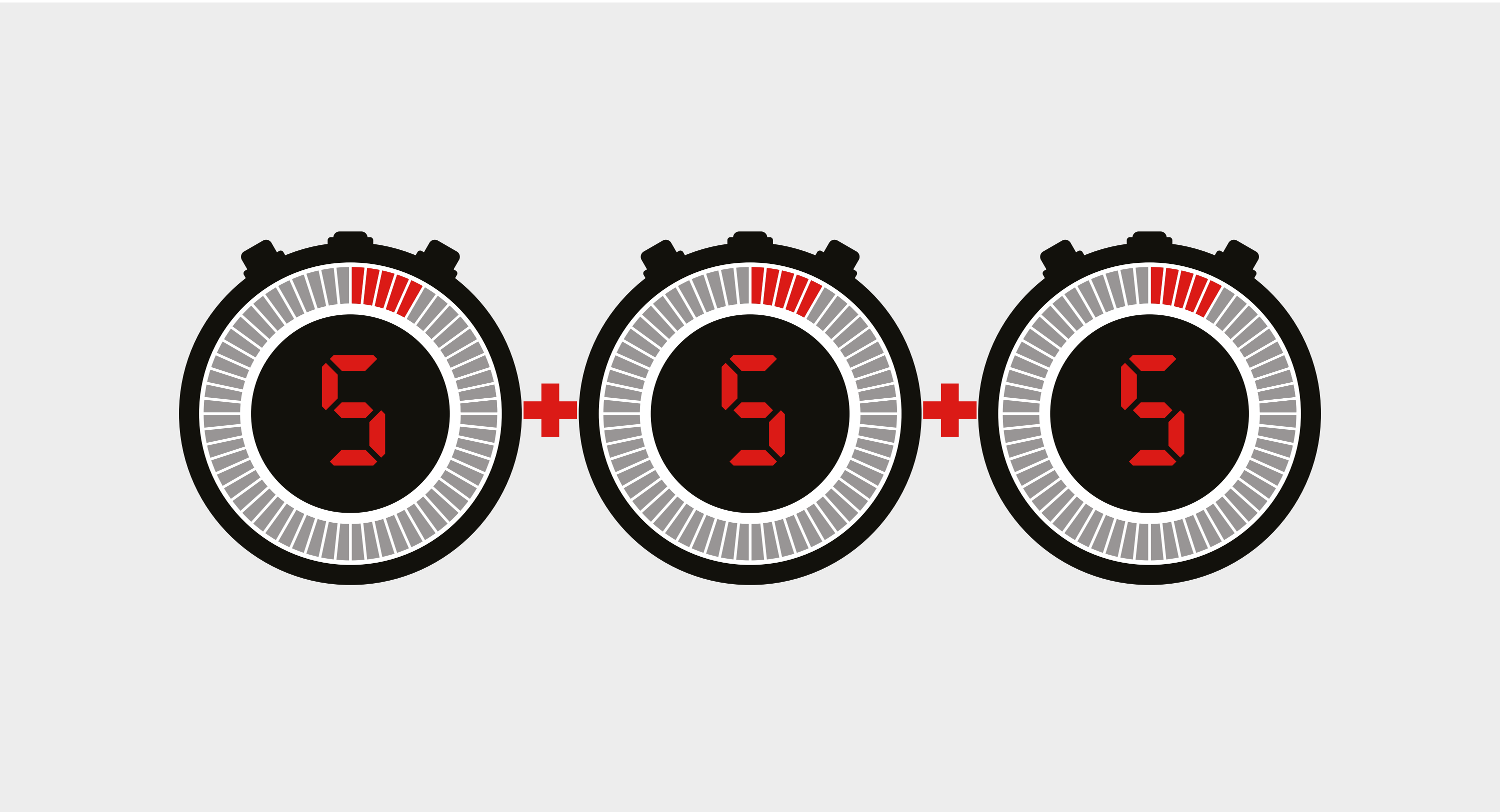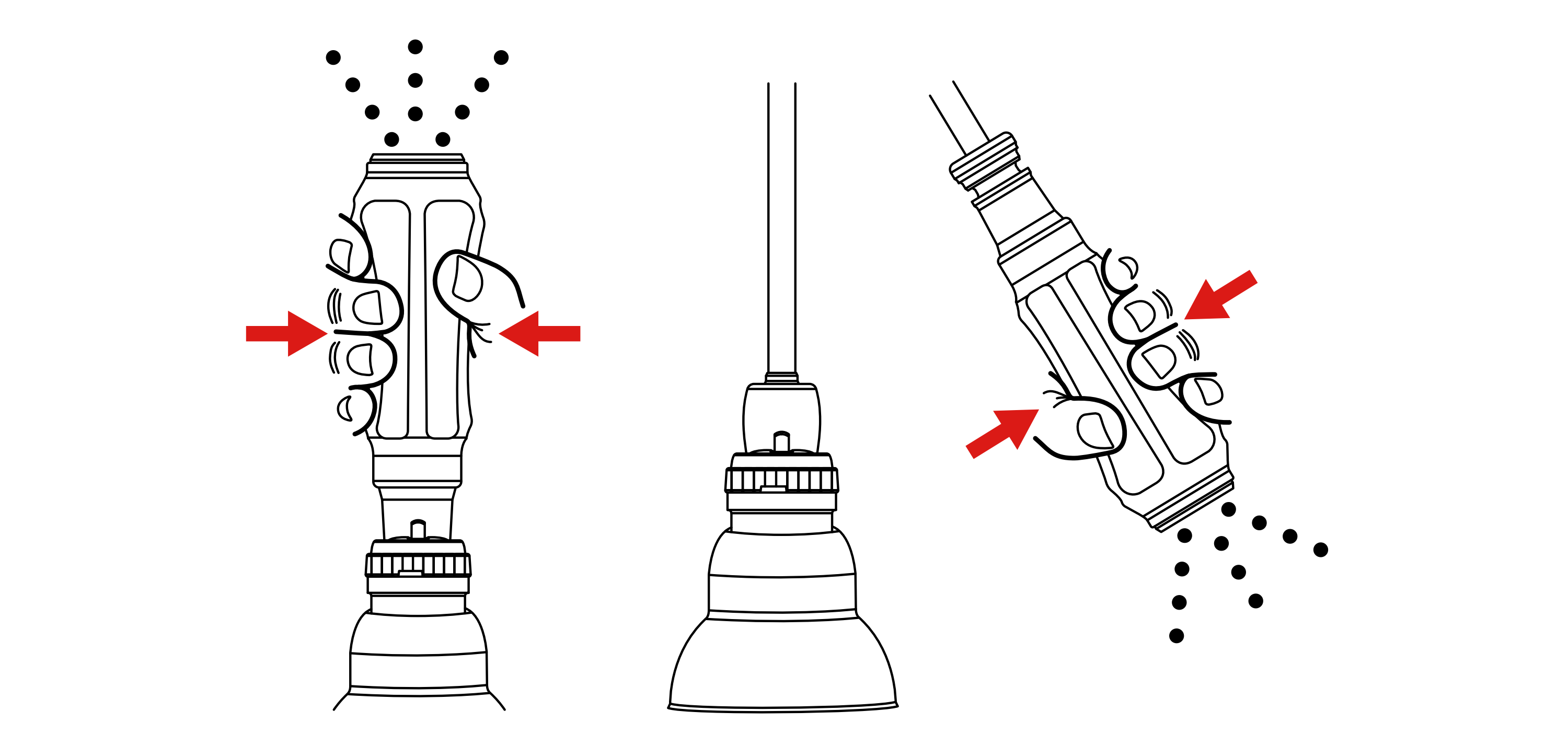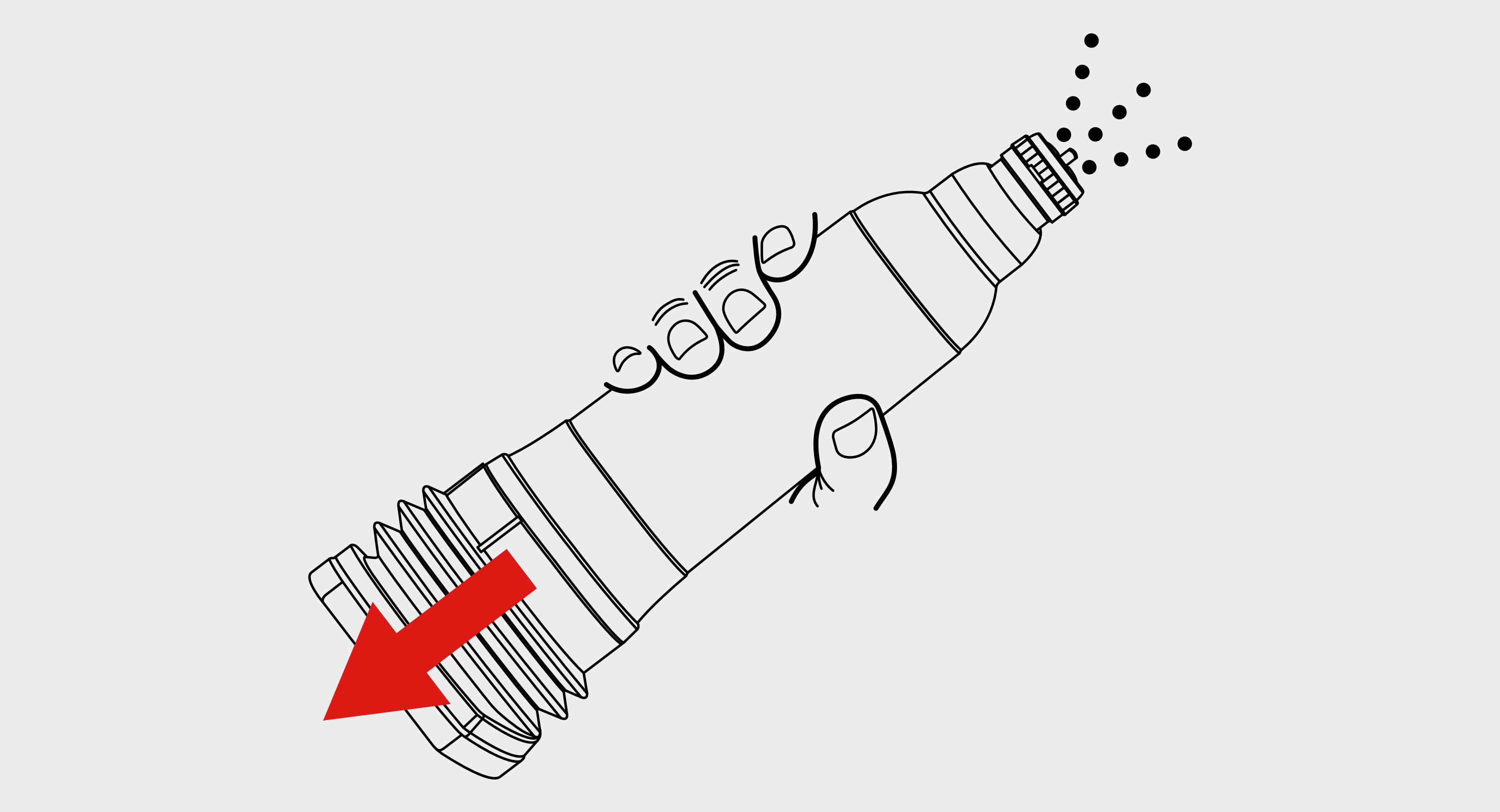

How to remove the valve cap correctly

Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to ensure that it functions to its full potential.

When removing your valve cap for cleaning ensure that the screwdriver is twisted and NOT prised.

