


bathmate®
J U S T A D D W A T E R

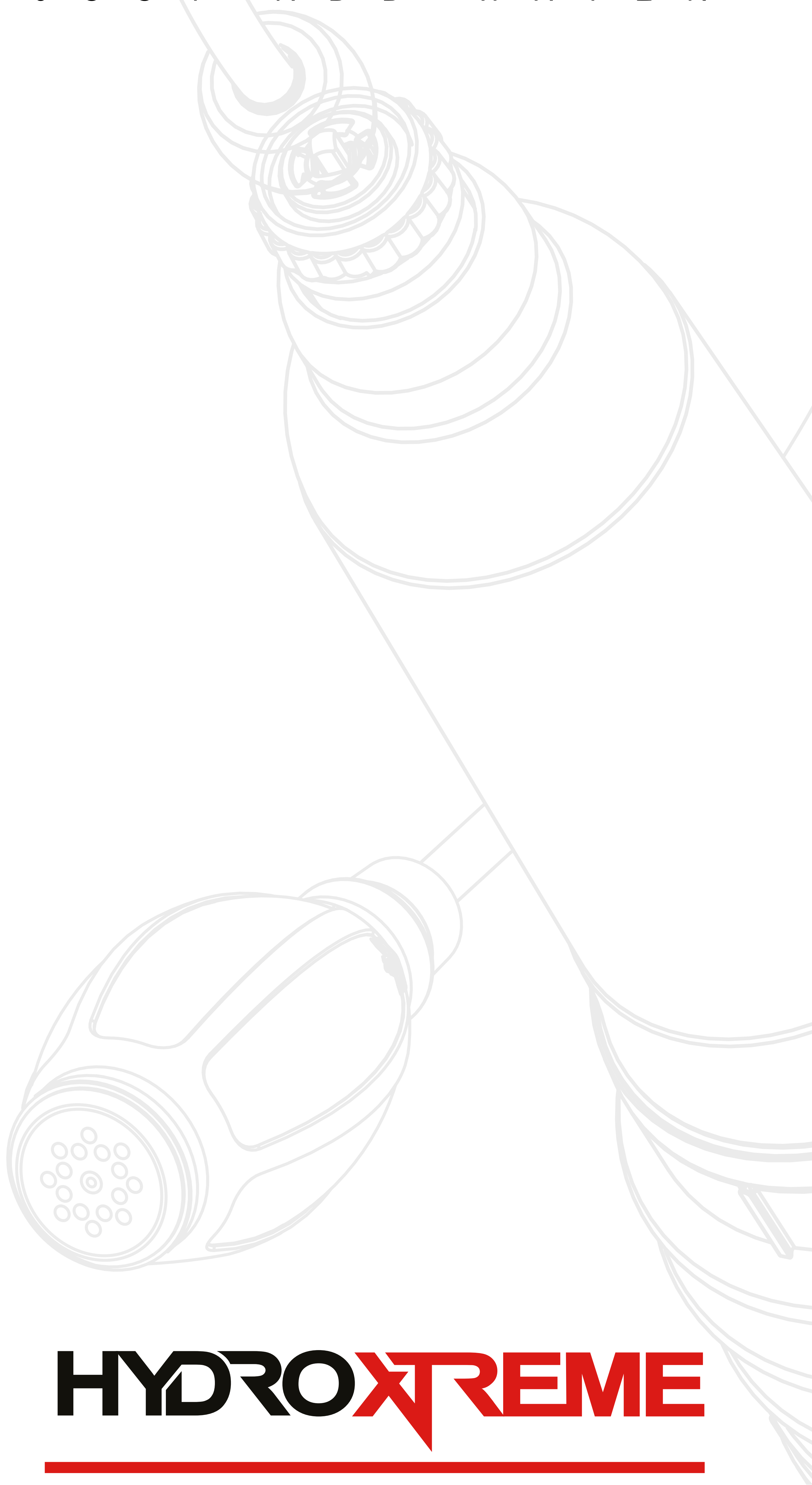

HYDROXTREME

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompka Bathmate Hydropump to zewnętrzne urządzenie do usztywniania prącia wykorzystujące technologię podciśnieniową w celu uzyskania wystarczającej sztywności prącia umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia, jeśli użytkownik cierpi na: Objawy zaburzeń erekcji, cukrzycę, stwardnienie rozsiane, marskość wątroby, przewlekłą niewydolność nerek, chorobę alkoholową, przyśpieszone tętno lub oddech, choroby serca lub płuc, wysokie ciśnienie krwi, udar, padaczkę, zaburzenia oddawania moczu (np. problemy z nerkami, pęcherzem lub narządami płciowymi) bądź białaczkę.
- Nie używać tego urządzenia, jeśli użytkownik:
 - Cierpi na anemię sierpowatą.
 - Miewał nadmiernie przedłużone erekcje.
 - Cierpi na jakiegokolwiek zaburzenia krzepnięcia lub przyjmuje leki rozrzedzające krew, takie jak aspiryna.
- Pompka Hydropump jest przeznaczona do użytku przez jednego użytkownika.
- Pompki Bathmate Hydropump są przeznaczone do stosowania w wodzie, dlatego nie zaleca się użycia lubrykantów.
- Użytkownik musi być w pełni sprawny manualnie i mieć wystarczającą siłę do obsługi mechanizmu zwalniania podciśnienia. Zmniejszona siła rąk może utrudnić bezpieczny demontaż urządzenia.
- Należy kontrolować produkt przez cały czas. Nie zasypiać podczas używania pompki Hydropump.
- Nie używać tego urządzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ponieważ może to zaburzyć ocenę sytuacji i zwiększyć ryzyko urazu prącia.
- Nie wolno używać tego urządzenia w przypadku zaburzeń czucia w okolicy prącia, ponieważ może to pogorszyć zdolność do wycucia potencjalnych obrażeń spowodowanych przez urządzenie.
- Użycie pompy podciśnieniowej może spowodować siniaki lub pęknięcie naczyń krwionośnych w prąciu lub mosznie, powodując wybroczyny, krwotok bądź krwiaki.
- Stosowanie pompy podciśnieniowej może nasilić istniejące wcześniej schorzenia, takie jak choroba Peyroniego, priapizm i zwężenie cewki moczowej.
- Niewłaściwe użycie tego urządzenia może doprowadzić do urazu prącia.
- W przypadku wystąpienia silnego bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Zalecane użycie

W celu uzyskania optymalnych korzyści z pompki Hydropump i użycia jej we właściwy sposób, aby uniknąć dyskomfortu, zaleca się przestrzeganie podanych poniżej instrukcji:

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: Umyć pompkę wodną przy użyciu ciepłej, czystej wody z mydłem i dokładnie opłukać.

- Upewnić się, że włosy w okolicach łonowych są w miarę dobrze przycięte. Ułatwi to zadbanie o szczelność przy nasadzie prącia.
- Wymagana jest kilkuminutowa relaksacja w ciepłej wodzie pod prysznicem lub wannie, aby jądra zmiękły, dzięki czemu pozostaną z dala od obszaru uszczelnienia, co pozwoli uniknąć dyskomfortu.
- Należy zastosować tylko minimalne podciśnienie niezbędne do osiągnięcia erekcji. Nadmierne podciśnienie i zbyt energiczne pompowanie mogą spowodować siniaki lub obrażenia prącia.
- Aby uzyskać najlepszą twardość erekcji i optymalny przepływ krwi, najlepiej jest zdejmować urządzenie co 2–3 minuty, pozwalając, aby prącie wróciło do wcześniejszego stanu. Masować zwiotczałe prącie przez 2 minuty, a następnie ponownie nałożyć urządzenie i powtórzyć proces. Należy to robić maksymalnie 3 razy podczas każdej 15-minutowej sesji.
- Nie należy używać pompki Hydropump dłużej niż 15 minut w ciągu 24 godzin.

Jak działa pompka Hydropump

Pompka Hydropump działa poprzez uszczelnienie obszaru łonowego użytkownika i wytworzenie podciśnienia wokół zwiotczonego prącia. Gdy uchwyt pompki przesuwany jest w dół względem ciała, mieszki ściskają się, a woda jest odprowadzana z końca pompy przez otwarty zawór. Po zwolnieniu mieszki rozszerzają się i zawór się zamyka, tworząc podciśnienie wewnątrz pompy. Powoduje to rozszerzenie i napełnienie prącia krwią, skutkując erekcją. Dalsze pompowanie zwiększa podciśnienie, a co za tym idzie wielkość erekcji.

Użytkownik steruje zaworem, obracając nasadkę zaworu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować zawór, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować. Gdy zawór jest zablokowany, wewnętrzne podciśnienie nie może zostać uwolnione. Pozycja ta jest stosowana podczas pompowania lub używania ręcznej pompki gumowej. Po odblokowaniu nasadka zaworu może zostać dociśnięta do wewnątrz względem sprężyny. Powoduje to otwarcie zaworu i umożliwia powrót powietrza lub wody do korpusu pompy, tym samym częściowo lub całkowicie zwalniając podciśnienie.

Podciśnienie w pompkach Bathmate Hydropump jest tworzone przez sprężystą siłę odrzutu pompki mieszkowej, więc użytkownik nie może przekroczyć bezpiecznych poziomów podciśnienia dozwolonych przez europejskie i amerykańskie przepisy medyczne.

WAŻNE

Czarna końcówka na górze zaworu przemieszczana jest poprzez wciśnięcie do środka i przesunięcie w prawo lub w lewo. Gdy zawór znajdzie się w pozycji zamkniętej, sygnalizowane jest to kliknięciem. Pozycja zamknięta powinna być używana tylko podczas napełniania pompki Hydropump wodą pod prysznicem. We wszystkich innych przypadkach czarna końcówka powinna znajdować się w pozycji środkowej (otwartej). Nieprzestawienie czarnej końcówki w pozycję środkową uniemożliwi prawidłowe działanie pompy wodnej.

Korzystanie z pompki Hydropump pod prysznicem

1. Zrelaksować się pod prysznicem przez kilka minut.
2. Zablokować zawór, obracając nasadkę zaworu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Wcisnąć palcem czarną końcówkę do pozycji zamkniętej, wyjąć wkładkę zwiększającą komfort (aby zapobiec uwięzieniu powietrza), a następnie odwrócić pompkę Hydropump pod głowicą prysznica, czekając aż napełnieni się wodą.
4. Włożyć z powrotem wkładkę zwiększającą komfort.
5. Umieścić pompkę Hydropump na zwiotczalym prąciu, tak żeby dobrze przylegała do nasady przy miednicy, a czarna końcówka znajdowała się w pozycji zamkniętej. Faza może być ustawiona do góry lub do dołu, w zależności od poziomu komfortu.
6. Upewnić się, że pompka szczelnie przylega do ciała i przyjąć wygodną pozycję, sprawdzając, czy jądra znajdują się poza pompką.
7. Przechylić pompkę Hydropump lekko w górę, otworzyć zawór poprzez wciśnięcie czarnej końcówki do pozycji środkowej i rozpocząć pompowanie.
8. Upewnić się, że podczas pompowania czarna końcówka znajduje się w pozycji środkowej (otwartej).
9. Pompować powoli i równomiernie, aż mieszki pozostaną w pozycji wciśniętej, co oznacza, że osiągnięto optymalne podciśnienie.
10. Aby jeszcze bardziej zwiększyć podciśnienie i uzyskać większą kontrolę, należy użyć gumowej pompki podłączonej węzem lub bezpośrednio do pompki. Należy pamiętać, że mocowanie między gumową pompką ręczną a zaworem Hydropump nie zostało zaprojektowane jako połączenie trwałe. Z tego powodu gumowa pompka ręczna powinna być trzymana w odpowiedniej pozycji podczas użytkowania i usuwana po osiągnięciu optymalnego podciśnienia. Jeśli potrzebne jest bardziej trwałe połączenie, należy użyć złączki do węża.
11. Upewnić się, że wszystkie zalecenia są przestrzegane.
12. Aby zdjąć pompkę Hydropump, należy odblokować zawór, przekręcając nasadkę zaworu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zwolnić podciśnienie, naciskając nasadkę zaworu do wewnątrz w celu aktywowania mechanizmu szybkiego zwalniania podciśnienia, a następnie zsunąć pompkę Hydropump z prącia.

Używanie pompki Hydropump w wannie

1. 1. Zrelaksować się w wannie przez kilka minut.
2. 2. Wyjąć wkładkę zwiększającą komfort (aby zapobiec uwięzieniu powietrza) i napełnić pompkę Hydropump wodą z wanny.
3. 3. Włożyć z powrotem wkładkę zwiększającą komfort.
4. 4. Umieścić pompkę Hydropump na zwiotczalym prąciu, tak żeby dobrze przylegała do nasady przy miednicy, a czarna końcówka znajdowała się w pozycji środkowej (otwartej). Faza może być ustawiona do góry lub do dołu, w zależności od poziomu komfortu.
5. 5. Upewnić się, że pompka szczelnie przylega do ciała i przyjąć wygodną pozycję, sprawdzając, czy jądra znajdują się poza pompką.
6. 6. Skierować pompkę Hydropump lekko do góry, upewniając się, że czarna końcówka znajduje się w pozycji środkowej (otwartej), a następnie rozpocząć pompowanie.
7. 7. Upewnić się, że podczas pompowania czarna końcówka znajduje się w pozycji środkowej (otwartej).
8. 8. Pompować powoli i równomiernie, aż mieszki pozostaną w pozycji wciśniętej, co oznacza, że osiągnięto optymalne podciśnienie.
9. 9. Aby jeszcze bardziej zwiększyć podciśnienie i uzyskać większą kontrolę, należy użyć gumowej pompki podłączonej węzem lub bezpośrednio do pompki. Należy pamiętać, że mocowanie między gumową pompką ręczną a zaworem Hydropump nie zostało zaprojektowane jako połączenie trwałe. Z tego powodu gumowa pompka ręczna powinna być trzymana w odpowiedniej pozycji podczas użytkowania i usuwana po osiągnięciu optymalnego podciśnienia. Jeśli potrzebne jest bardziej trwałe połączenie, należy użyć złączki do węża.
10. 10. Upewnić się, że wszystkie zalecenia są przestrzegane.
11. 11. Aby zdjąć pompkę Hydropump, należy odblokować zawór, przekręcając nasadkę zaworu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zwolnić podciśnienie, naciskając nasadkę zaworu do wewnątrz w celu aktywowania mechanizmu szybkiego zwalniania podciśnienia, a następnie zsunąć pompkę Hydropump z prącia.

Czyszczenie i konserwacja

Umyć pompkę Hydropump ciepłą wodą z mydłem i dokładnie opłukać. Pozostawić pompkę Hydropump do wyschnięcia i przechowywać ją w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Obsługa klienta i gwarancja






Pompka Bathmate Hydropump została zaprojektowana z myślą o wielu latach bezproblemowego użytkowania. Jest objęta dwuletnią gwarancją na wadliwe części lub nieodpowiednie wykonanie. Obsługa klienta i pełne szczegóły gwarancji dostępne są na stronie: **www.bathmatedirect.com/support**





W mało prawdopodobnym przypadku reklamacji gwarancyjnej DX Products Ltd zastrzega sobie prawo do zażądania odesłania pompki Hydropump lub dostarczenia dowodów uszkodzenia.





Kod identyfikacyjny produktu (PID)

DX Products Ltd stosuje kod identyfikacyjny w odniesieniu do wszystkich produktów. Pompki Bathmate Hydropump mają unikatowy 6-literowy kod PID, który można znaleźć na etykiecie pompki. Kod ten jest gwarancją autentyczności i dowodem zakupu oryginalnego produktu, a nie gorszej jakościowo podróbki. Należy użyć kodu PID, aby uwierzytelnić produkt i zarejestrować gwarancję online na naszej stronie internetowej:

www.bathmatedirect.com/support

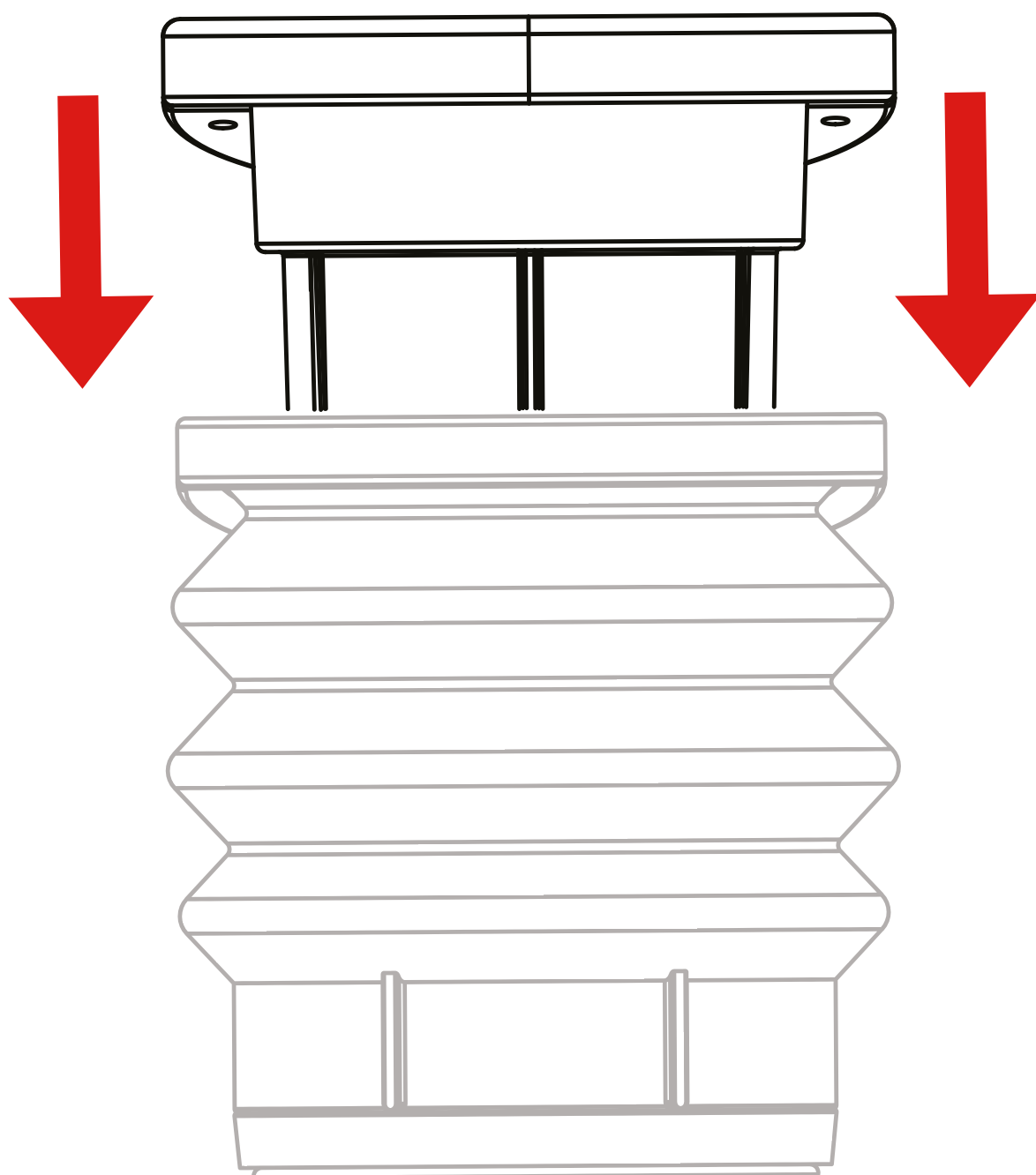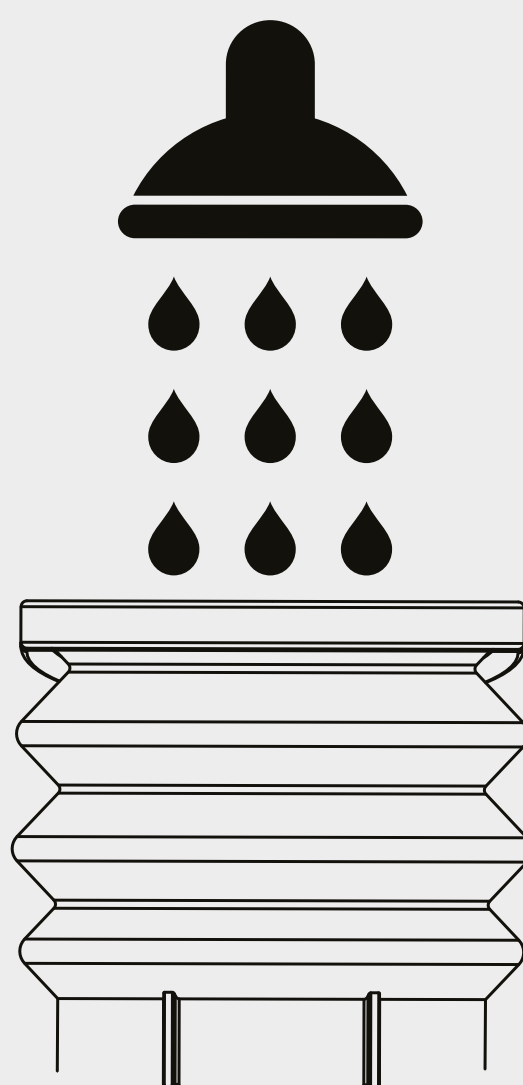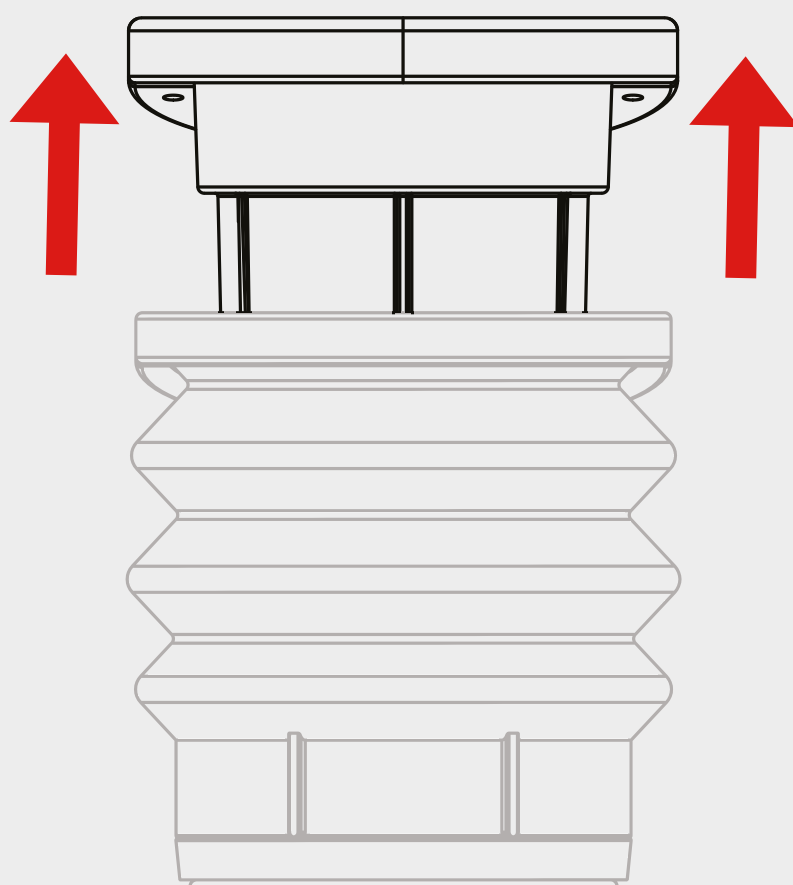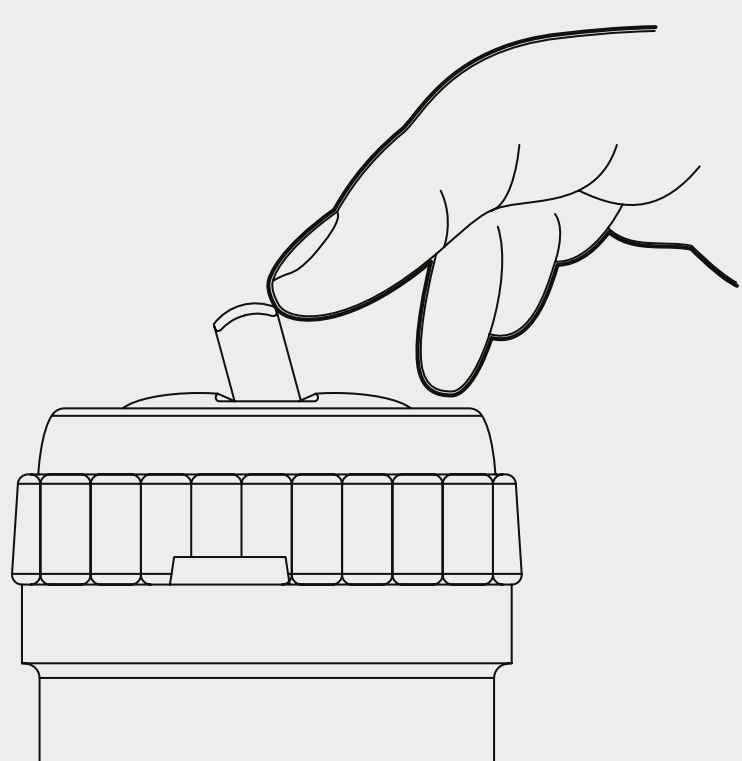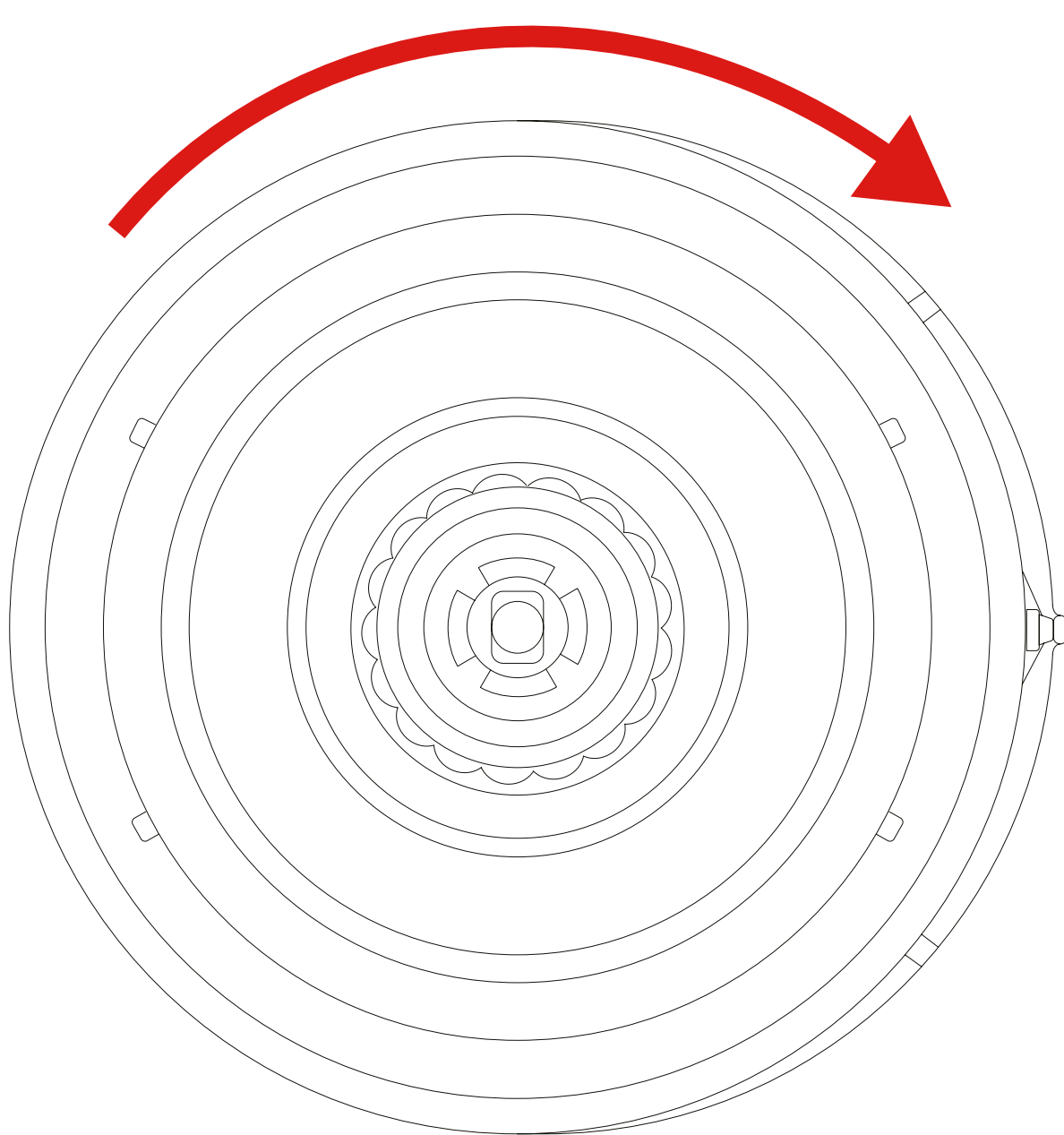

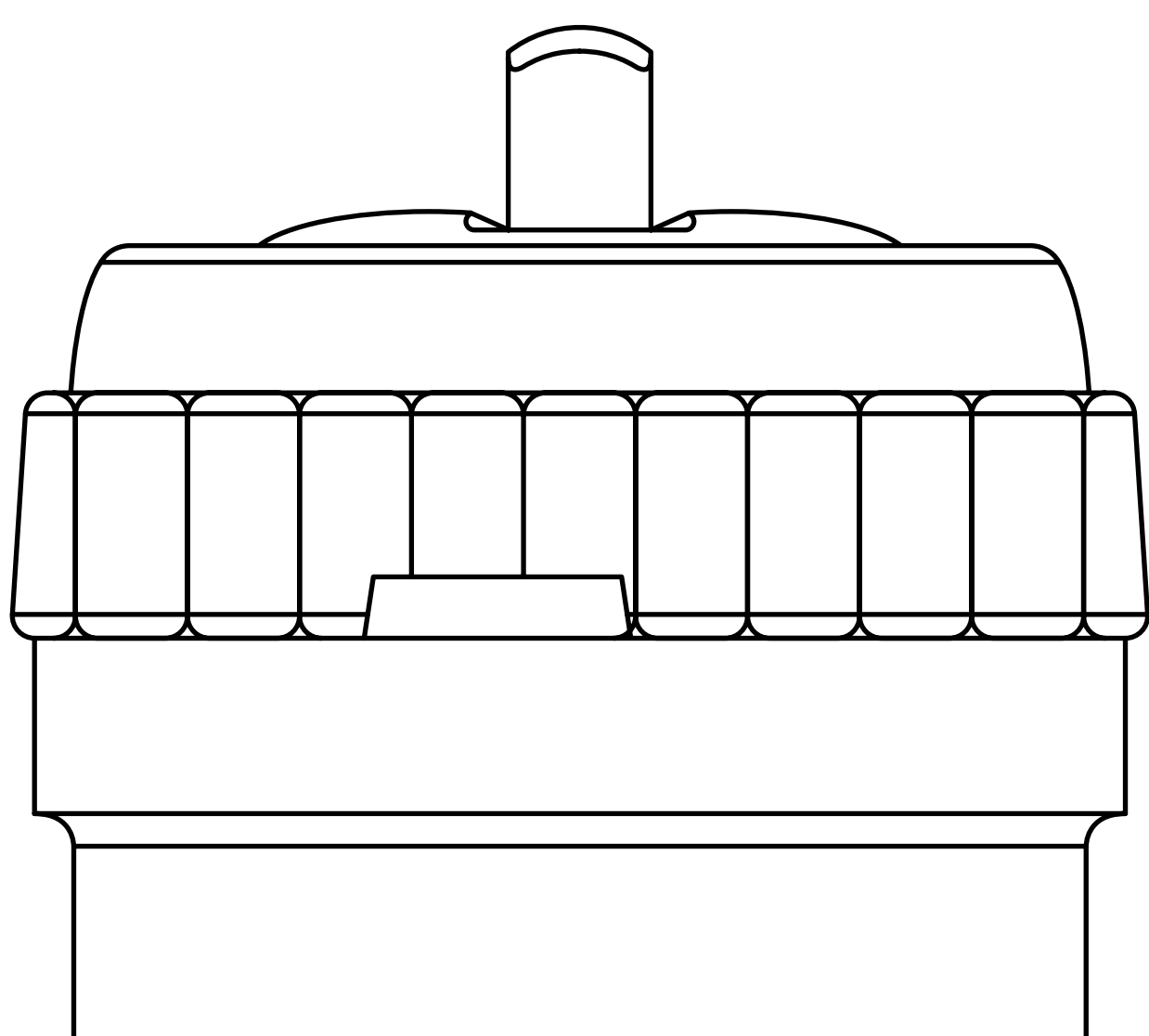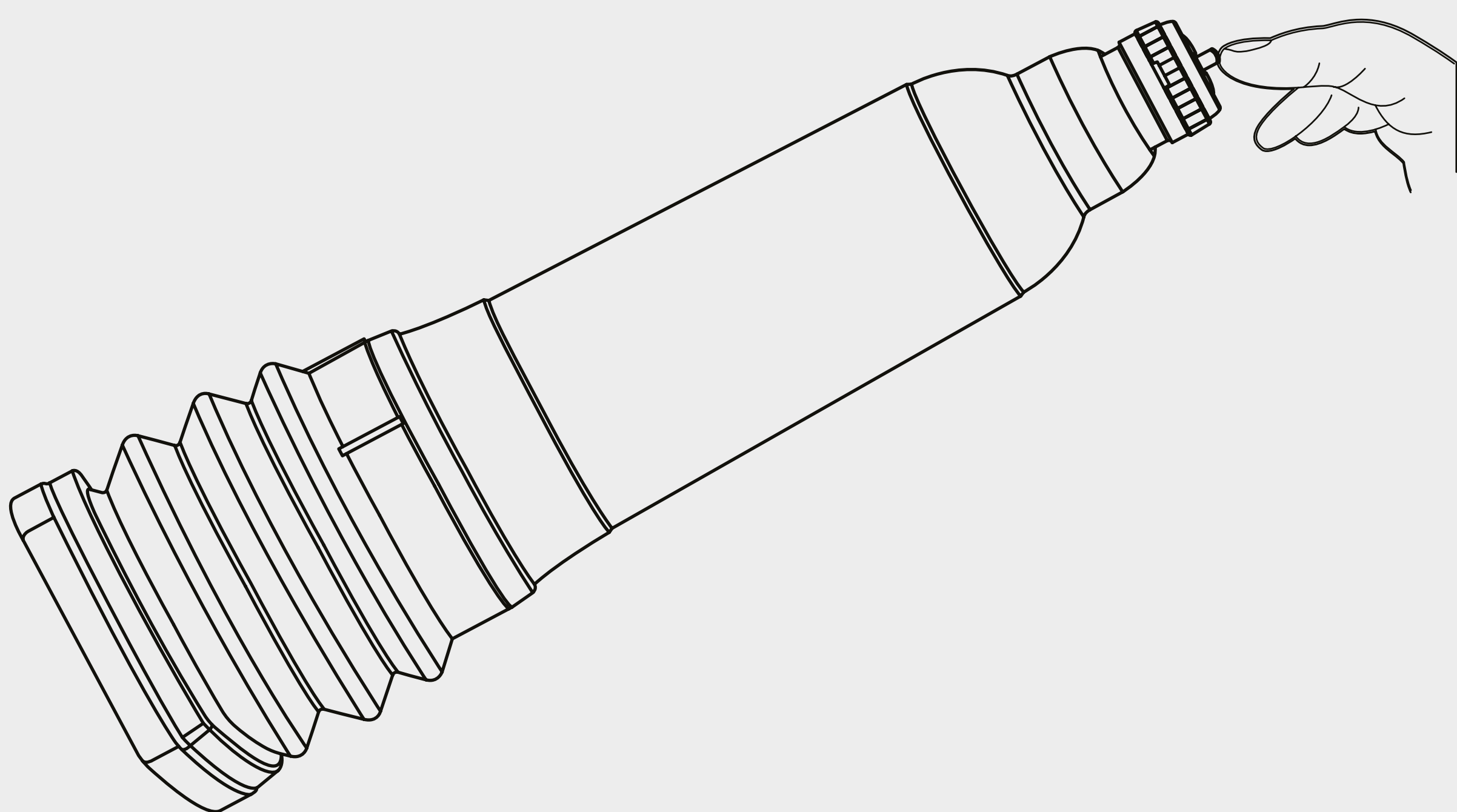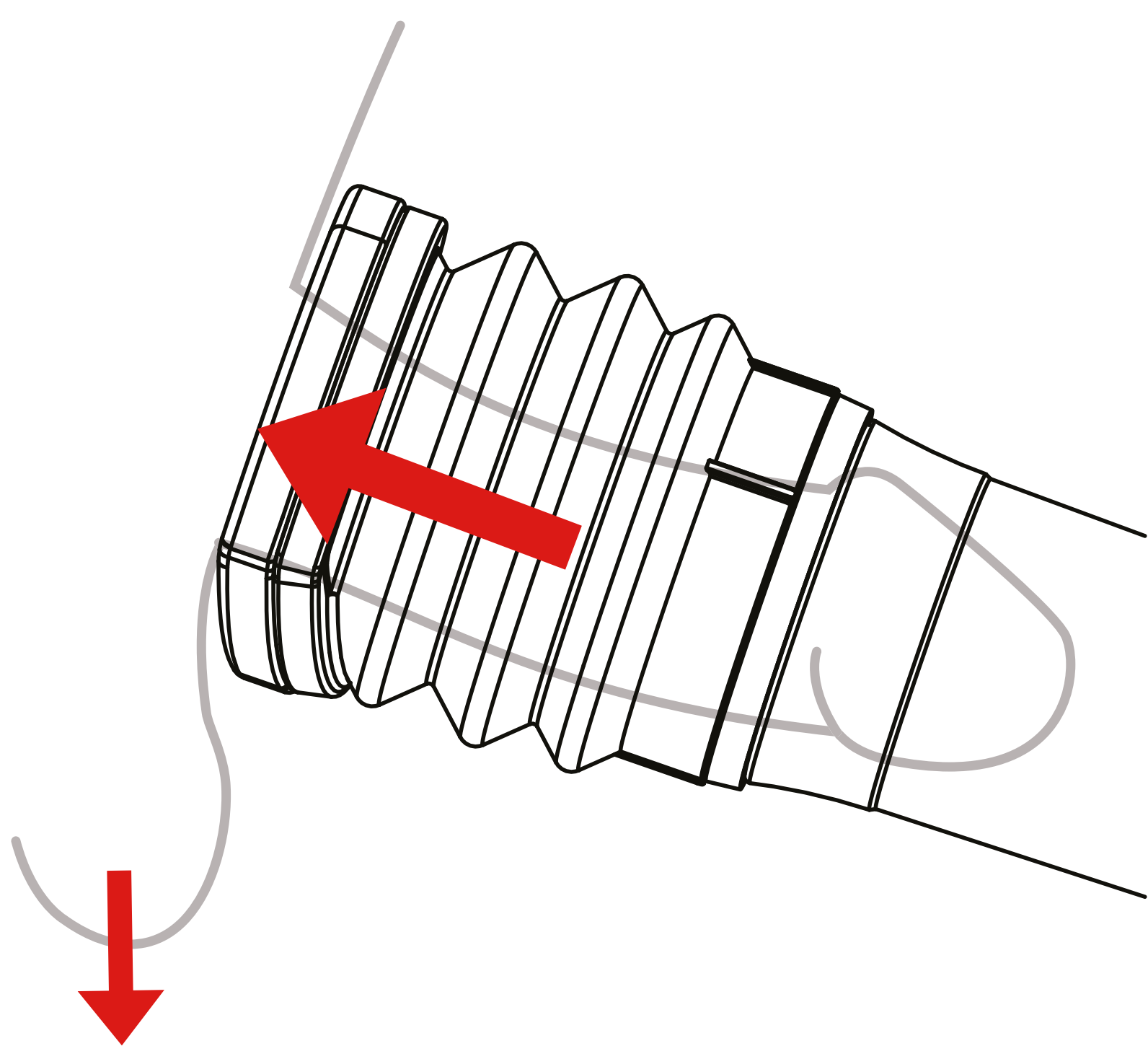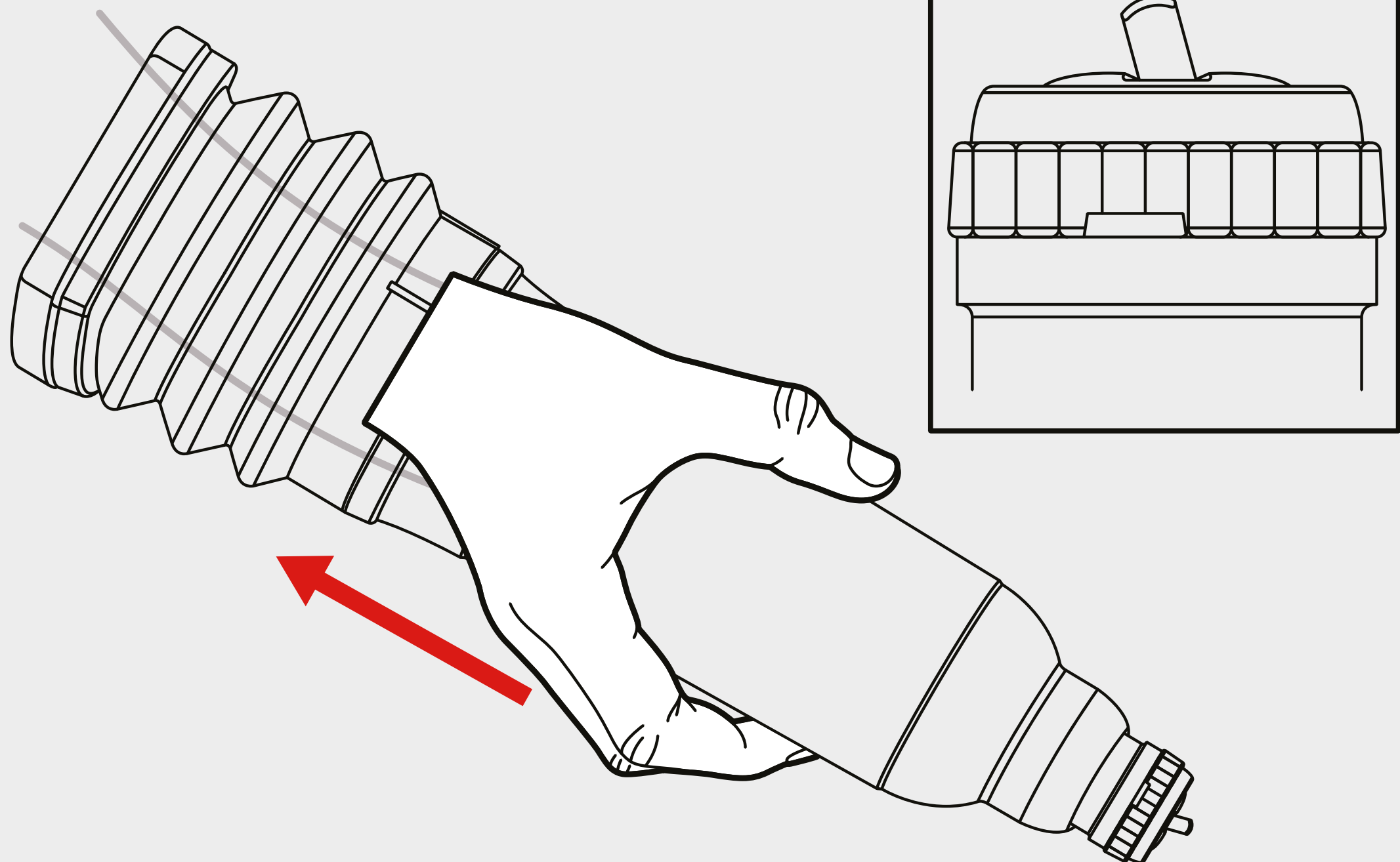

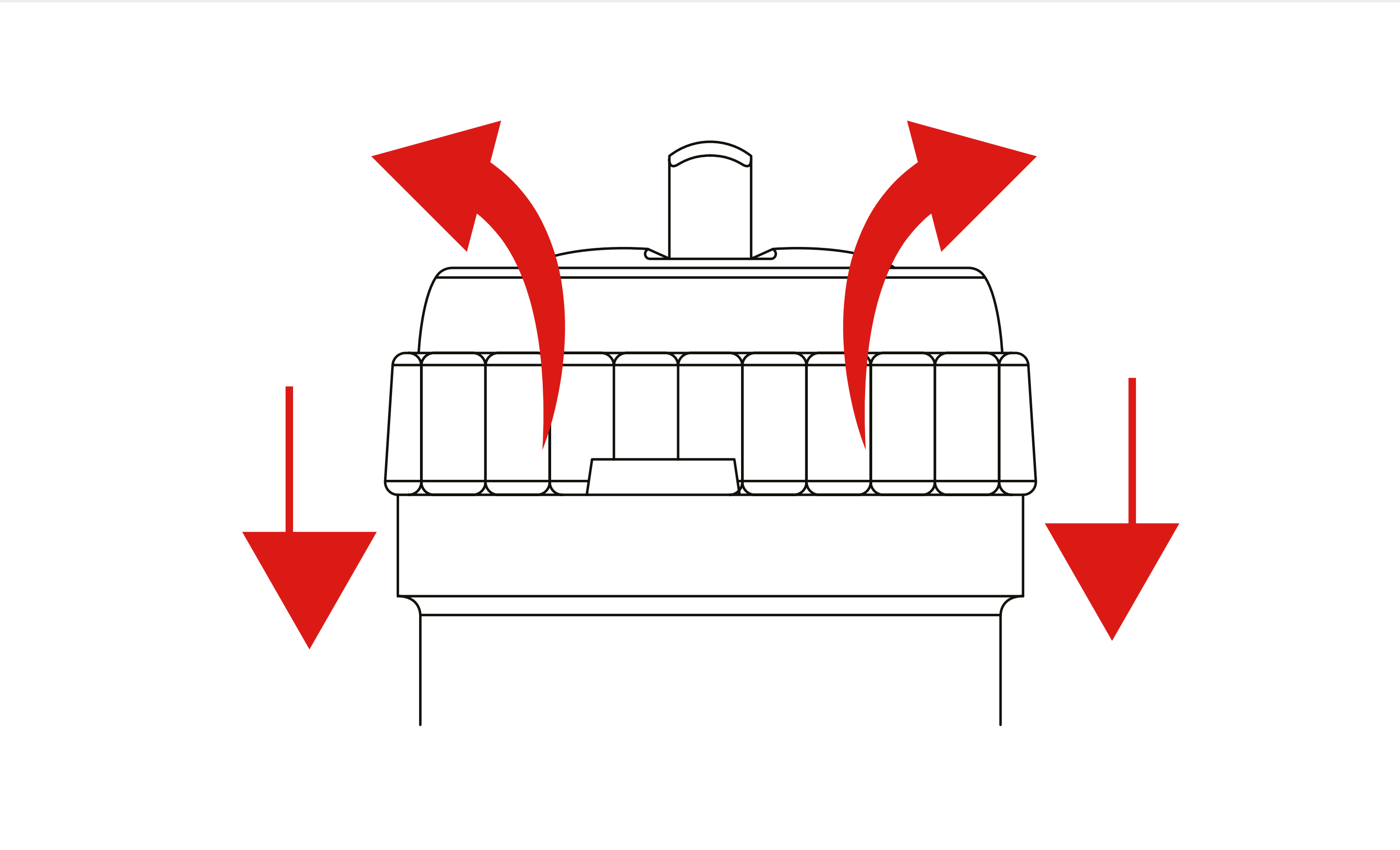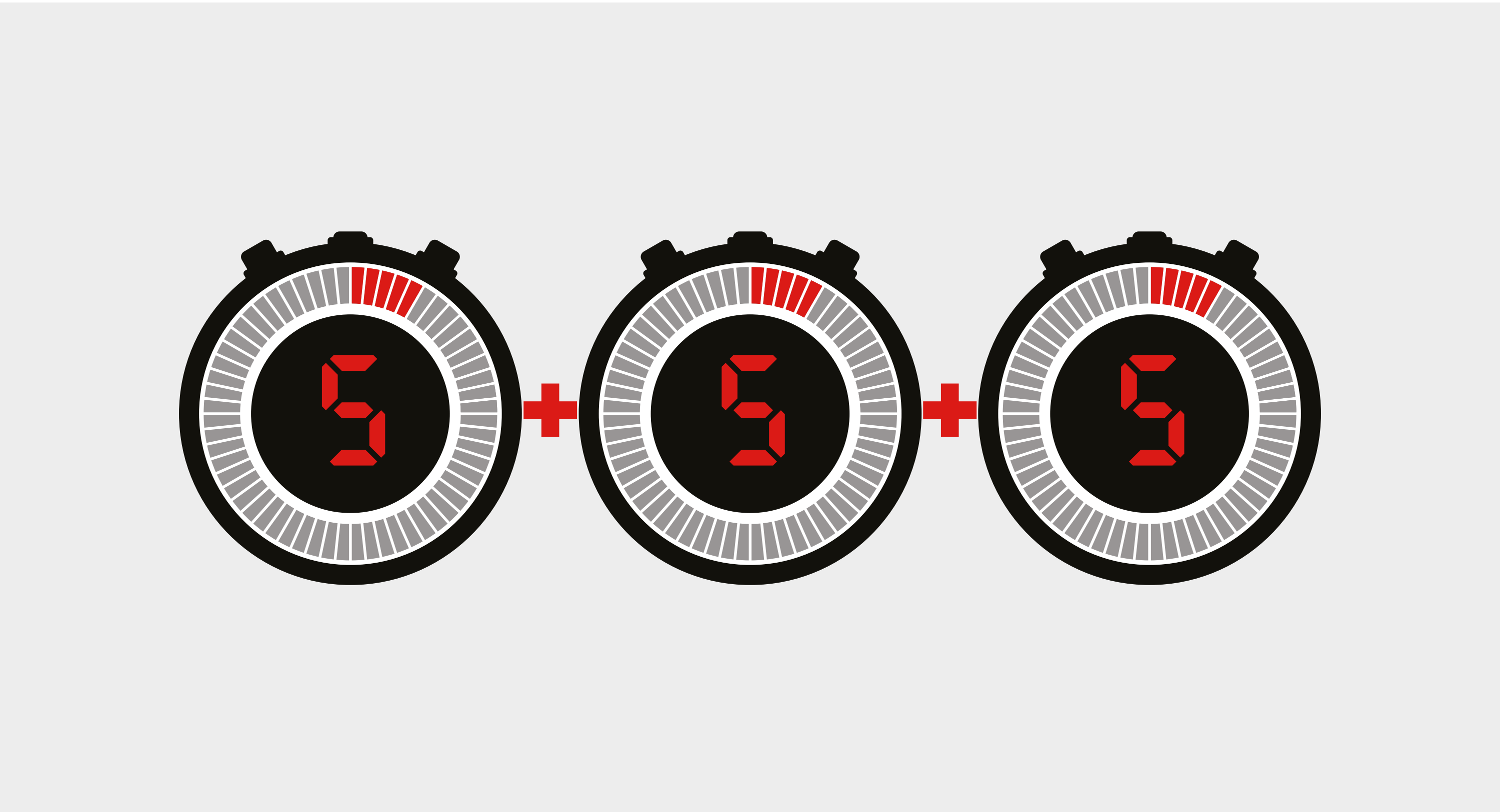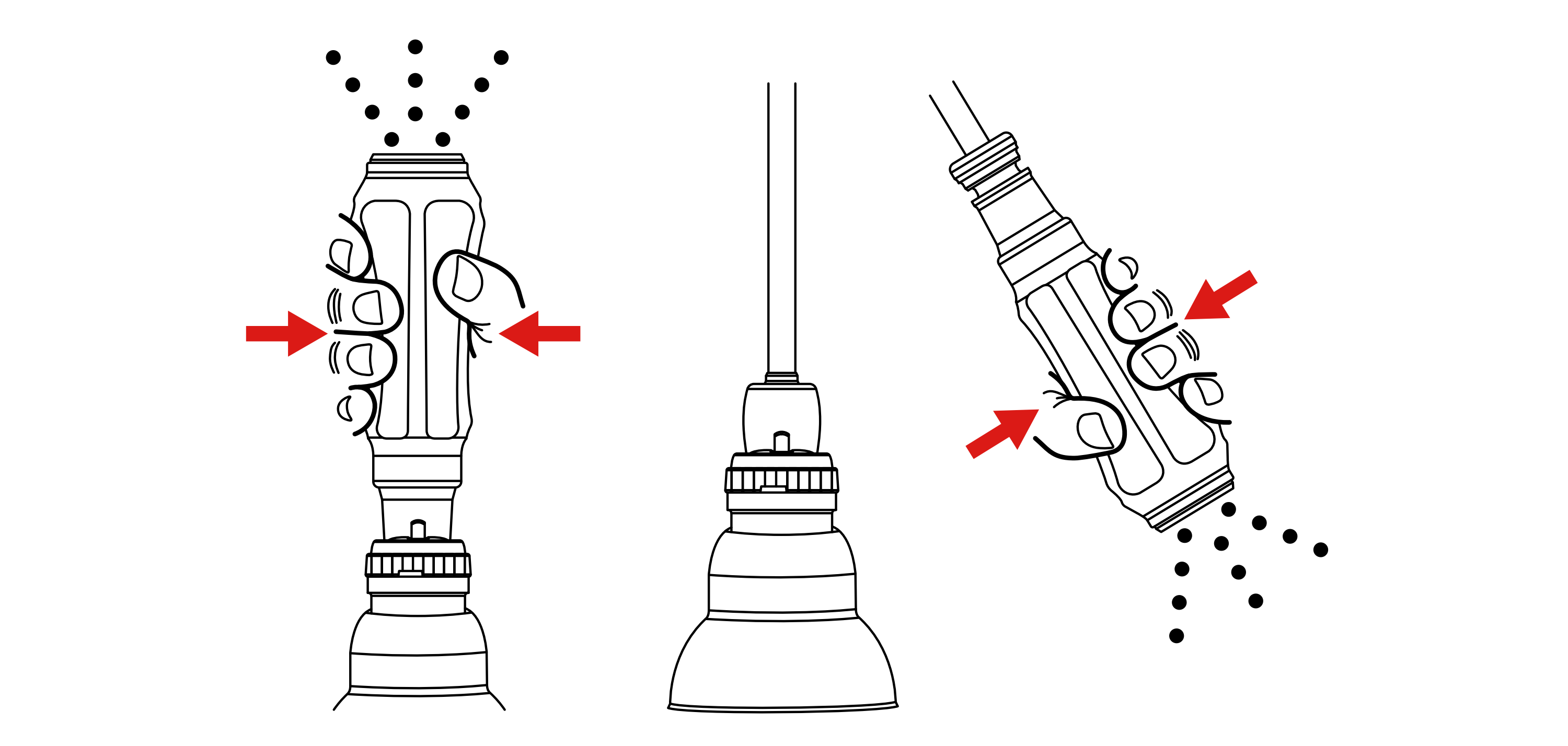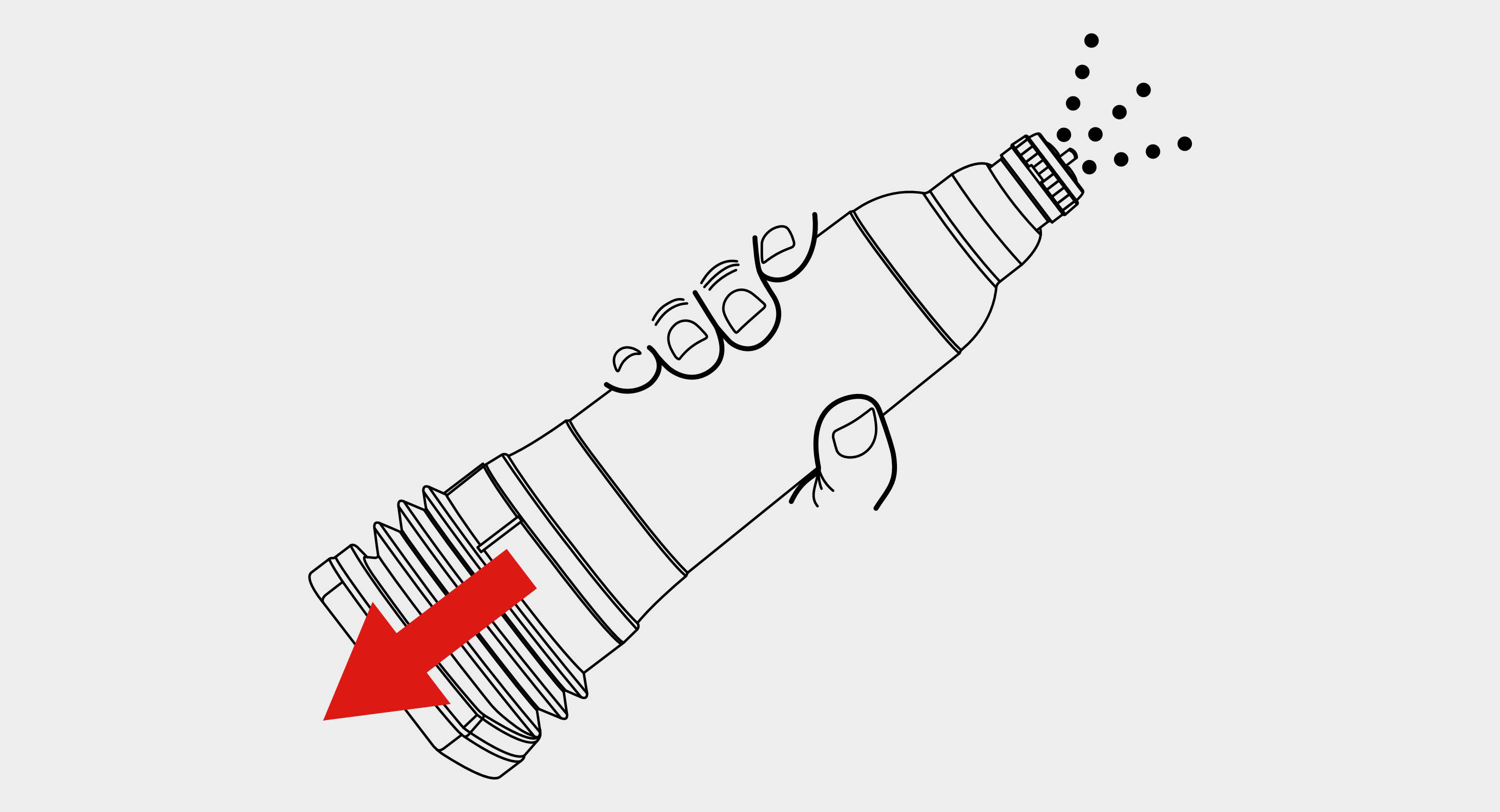

Jak prawidłowo zdjąć nakrętkę zaworu

Podczas zdejmowania kapturka zaworu do czyszczenia upewnij się, że śrubokręt jest przekręcony i NIE podważony.

