

bathmate®
J U S T A D D W A T E R

HYDROMAX

U S E R G U I D E

A Hidrobomba Bathmate é um dispositivo de rigidez peniana que utiliza tecnologia de vácuo para criar rigidez peniana suficiente necessária para o ato sexual. Por favor, leia atentamente as seguintes instruções.

ANTES DE COMEÇAR

Avisos de segurança importantes

- Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo caso apresente qualquer um dos seguintes: Sintomas de disfunção erétil, diabetes, esclerose múltipla, cirrose do fígado, insuficiência renal crónica, alcoolismo, aumento da frequência cardíaca ou respiratória, doença cardíaca ou pulmonar, hipertensão arterial, AVC, epilepsia, incontinência urinária (por exemplo, problemas renais, na bexiga ou genitais) ou leucemia.
- Não utilize este aparelho se:
 - Sofrer de anemia falciforme.
 - Apresentar um historial de ereções prolongadas.
 - Sofrer de distúrbios hemorrágicos ou estiver no momento a tomar medicação anticoagulante como aspirina.
- A Hidrobomba destina-se a ser utilizada por um único utilizador.
- As Hidrobombas Bathmate destinam-se a ser utilizadas dentro de água, como tal, o uso de qualquer lubrificante com este dispositivo não é aconselhado.
- Deve poder usar as mãos completamente, com força para utilizar o mecanismo de alívio de vácuo. Se tiver pouca força nas mãos, a remoção segura deste dispositivo pode tornar-se difícil.
- Necessita de ter permanentemente o produto sob controlo, evite adormecer enquanto utiliza a Hidrobomba.
- Não utilize este dispositivo enquanto estiver sob a influência de álcool ou de medicamentos, pois tal pode prejudicar o seu discernimento e aumentar o risco de lesão no seu pénis.
- Nunca deve utilizar este dispositivo se experienciar uma sensação de dor ligeira na área do pénis, pois tal pode prejudicar a sua capacidade de detetar qualquer potencial lesão causada pelo dispositivo.
- A utilização de uma bomba de vácuo pode causar hematomas ou romper os vasos sanguíneos dentro do pénis ou escroto, resultando em petéquias, hemorragia ou a formação de um hematoma.
- A utilização de uma bomba de vácuo pode agravar patologias pré-existentes como doença de Peyronie, priapismo e estenoses uretrais.
- A utilização incorreta deste dispositivo pode provocar lesões no pénis.
- Caso ocorra dor aguda ou desconforto, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte o seu médico.

COMEÇAR A UTILIZAR O PRODUTO

Uso recomendado

Para obter o máximo benefício da Hidrobomba e de modo a evitar o uso inapropriado, o qual pode causar desconforto, aconselhamo-lo veementemente a seguir as instruções conforme descritas em seguida:

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: Lave a sua hidrobomba com água morna limpa e sabão e enxugue-a muito bem.

- Assegure que a sua zona púbica está razoavelmente bem aparada. Isto facilitará a selagem de vácuo contra o assento pélvico.
- É necessário um período de relaxamento de alguns minutos num duche ou banho quente para permitir o amolecimento dos testículos, permitindo-lhes ficarem livres da área de selagem e evitando assim qualquer desconforto.
- Aplique apenas a quantidade mínima de pressão de vácuo necessária para atingir uma ereção. A pressão de vácuo excessiva e o bombeamento vigoroso excessivo podem resultar em hematomas ou lesões no pénis.
- Para beneficiar ao máximo na rigidez da ereção e no máximo fluxo sanguíneo, o melhor é remover o dispositivo a cada 2-3 minutos e deixar o pénis retrair. Massage o pénis quando este estiver flácido durante 2 minutos e, em seguida, volte a aplicar o dispositivo e repita o processo. Deve proceder desta forma no máximo 3 vezes em qualquer sessão de 15 minutos.
- Não utilize a Hidrobomba durante mais de 15 minutos em qualquer período de 24 horas.

Como funciona a Hidrobomba

A Hidrobomba funciona ao criar uma selagem de vácuo contra a área púbica do utilizador, envolvendo o pénis flácido. Quando a bomba é empurrada para baixo contra o corpo, os foles comprimem e a água é ejetada da extremidade da bomba através da válvula aberta. Quando aliviados, os foles expandem e a válvula fecha, criando um vácuo parcial no interior da bomba. Isto causa a expansão do pénis e enche de sangue, criando uma ereção. O rebombeamento aumenta o vácuo e aumenta assim o tamanho da ereção.

O utilizador controla o nível de vácuo ao pressionar a válvula para dentro contra a mola, abrindo a válvula e permitindo que o ar ou a água retornem ao corpo da bomba, aliviando assim o vácuo parcial ou totalmente.

O vácuo na Hidrobomba Bathmate é criado pela força de recuo elástica da bomba de foles, de modo que o utilizador não exceda os níveis de vácuo parcial seguro permitido ao abrigo das normas médicas europeias e norte-americanas.

IMPORTANTE

A pequena protuberância preta no topo da válvula é movida ao pressionar para dentro e movendo para a direita ou para a esquerda, onde deve encaixar na posição correta para fechar a válvula. A posição fechada apenas deve ser utilizada durante o enchimento da Hidrobomba com água no duche. Todas as restantes ocasiões, a pequena protuberância preta deve estar na posição central (aberta). Caso não verifique se a pequena protuberância preta está na posição central, tal impede a Hidrobomba de funcionar corretamente.

Utilizar a sua Hidrobomba no duche

1. Relaxe no duche durante alguns minutos.
2. Empurre a pequena protuberância preta até à posição fechada com o dedo, remova a inserção de conforto (para impedir ar retido) e, em seguida, inverta a Hidrobomba debaixo da pega do chuveiro até estar cheia de água.
3. Substitua a inserção de conforto.
4. Coloque a Hidrobomba sobre o pénis flácido apertada ao assento pélvico com a pequena protuberância preta na posição fechada. O chanfro pode ser posicionado virado quer para cima, quer para baixo, dependendo do seu nível de conforto.
5. Realize uma selagem contra o seu corpo, assegurando que o posicionamento é confortável e que os seus testículos estão bem afastados.
6. Com a Hidrobomba inclinada ligeiramente para cima, abra a válvula, empurrando a pequena protuberância preta até à posição central e comece a bombear.
7. Assegure que a pequena protuberância preta está na posição central (aberta) quando bombeia.
8. Bombeie ligeira e uniformemente até os foles permanecerem pressionados, indicando que atingiu o máximo vácuo.
9. Assegure que segue as instruções de utilização corretas recomendadas.
10. Para remover a Hidrobomba, alivie o vácuo ao pressionar a tampa da válvula para dentro para ativar o mecanismo de desbloqueio rápido e deslize a Hidrobomba para fora do pénis.

Utilizar a sua Hidrobomba no banho

1. Relaxe na banheira durante alguns minutos.
2. Remova a inserção de conforto (para impedir ar retido) e encha a Hidrobomba com água do banho.
3. Substitua a inserção de conforto.
4. Coloque a Hidrobomba sobre o pénis flácido apertada ao assento pélvico com a pequena protuberância preta na posição central (aberta). O chanfro pode ser posicionado virado quer para cima, quer para baixo, dependendo do seu nível de conforto.
5. Realize uma selagem contra o seu corpo, assegurando que o posicionamento é confortável e que os seus testículos estão bem afastados.
6. Com a Hidrobomba inclinada ligeiramente para cima, assegure que a pequena protuberância preta está na posição central (aberta) e comece a bombear.
7. Assegure que a pequena protuberância preta está na posição central (aberta) quando bombeia.
8. Bombeie ligeira e uniformemente até os foles permanecerem pressionados, indicando que atingiu o máximo vácuo.
9. Assegure que segue as instruções de utilização corretas recomendadas.
10. Para remover a Hidrobomba, alivie o vácuo ao pressionar a tampa da válvula para dentro para ativar o mecanismo de desbloqueio rápido e deslize a Hidrobomba para fora do pénis.

Limpeza e manutenção

Lave a sua Hidrobomba com água quente e sabão e enxagúe muito bem. Deixe a sua Hidrobomba secar e guarde-a num local seco afastado da luz solar direta.

Apoio ao cliente e garantia

A Hidrobomba Bathmate foi concebida para proporcionar muitos anos de utilização sem problemas. Possui cobertura de uma garantia de dois anos contra peças com defeito ou fraca mão-de-obra. Pode consultar o serviço de apoio ao cliente e os dados completos da garantia em: **www.bathmatedirect.com/support**

No caso improvável de uma reivindicação da garantia, a DX Products Ltd reserva o direito de solicitar a devolução da Hidrobomba ou o fornecimento de provas do dano.




Código de identificação do produto (PID)





A DX Products Ltd utiliza um código de identificação para todos os produtos. As Hidrobombas Bathmate possuem um código CIP único com 6 letras que se encontra na etiqueta da sua hidrobomba. Este código é a sua garantia de autenticidade e constitui prova de que está a adquirir um produto genuíno e não uma cópia falsificada de qualidade inferior. Por favor, utilize o seu CIP para autenticar o seu produto e registar a sua garantia online no nosso site:



www.bathmatedirect.com/support

Guia de resolução de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO	COMENTÁRIOS
Sem ereção / Ereção parcial	Sem vácuo devido a fuga de ar causada por má selagem	Certifique-se de que os pêlos púbicos estão bem aparados; remova e limpe a válvula	O problema está frequentemente associado à inexperiência; este soluciona-se à medida que se torna mais apto na utilização do dispositivo
Puxão da pele do escroto	Testículos muito perto da área de selagem	Suavize os testículos relaxando num banho ou duche morno por alguns minutos antes de bombear	Contacte o apoio ao cliente se o problema persistir: support@bathmatedirect.com
Desconforto ou dor			
Durante o bombeamento	Bombeamento demasiado rápido; arrastamento do tecido escrotal	Bombeamento mais lento; continue a usar o dispositivo	O problema geralmente é solucionado à medida que se torna mais apto na utilização do dispositivo
Vermelhidão, irritação ou hematoma	Bombeamento demasiado rápido; bombeamento excessivo	Bombeamento mais lento; menos bombeamentos	Consulte o seu médico caso este problema persista após as primeiras sessões de prática

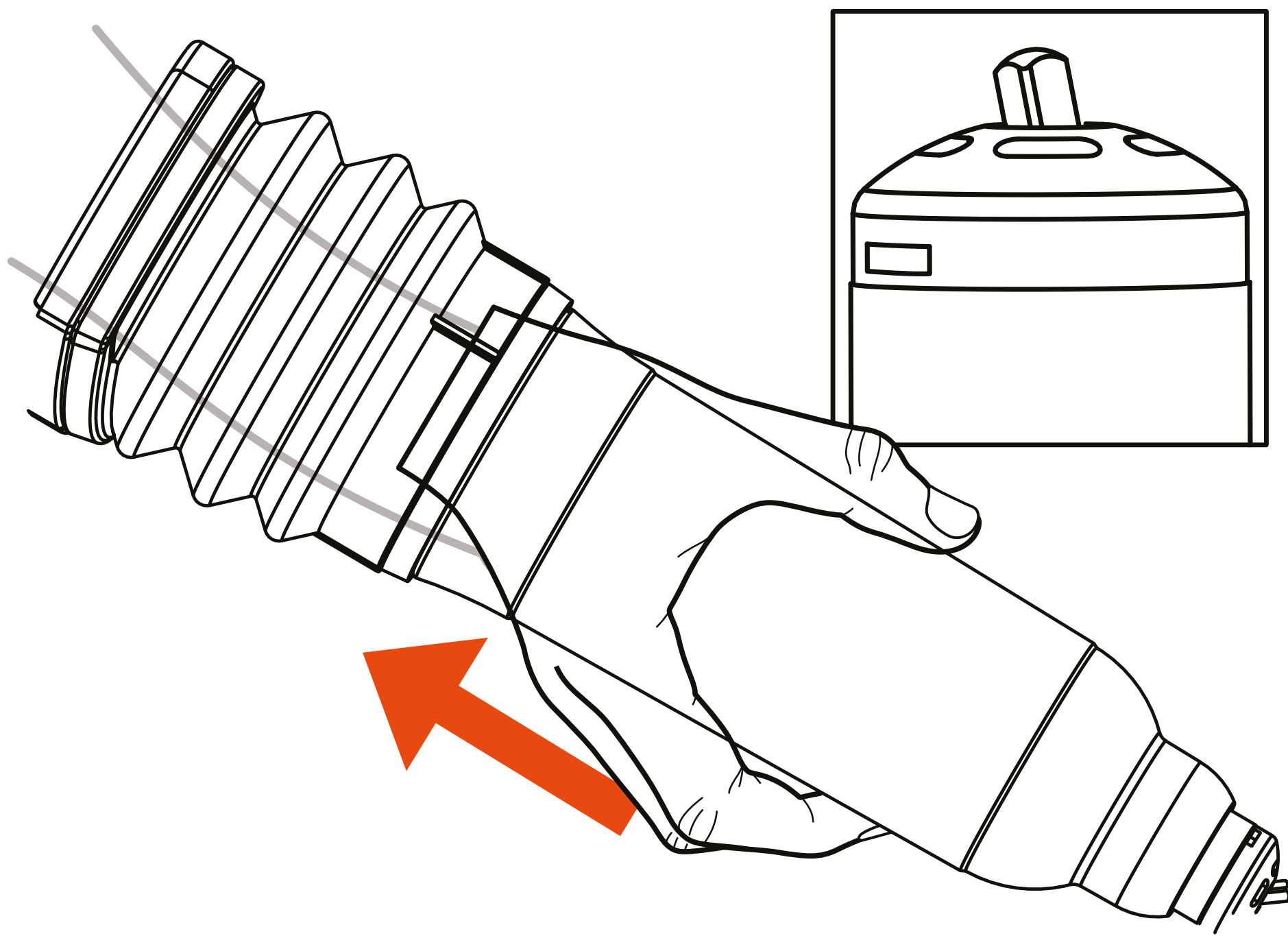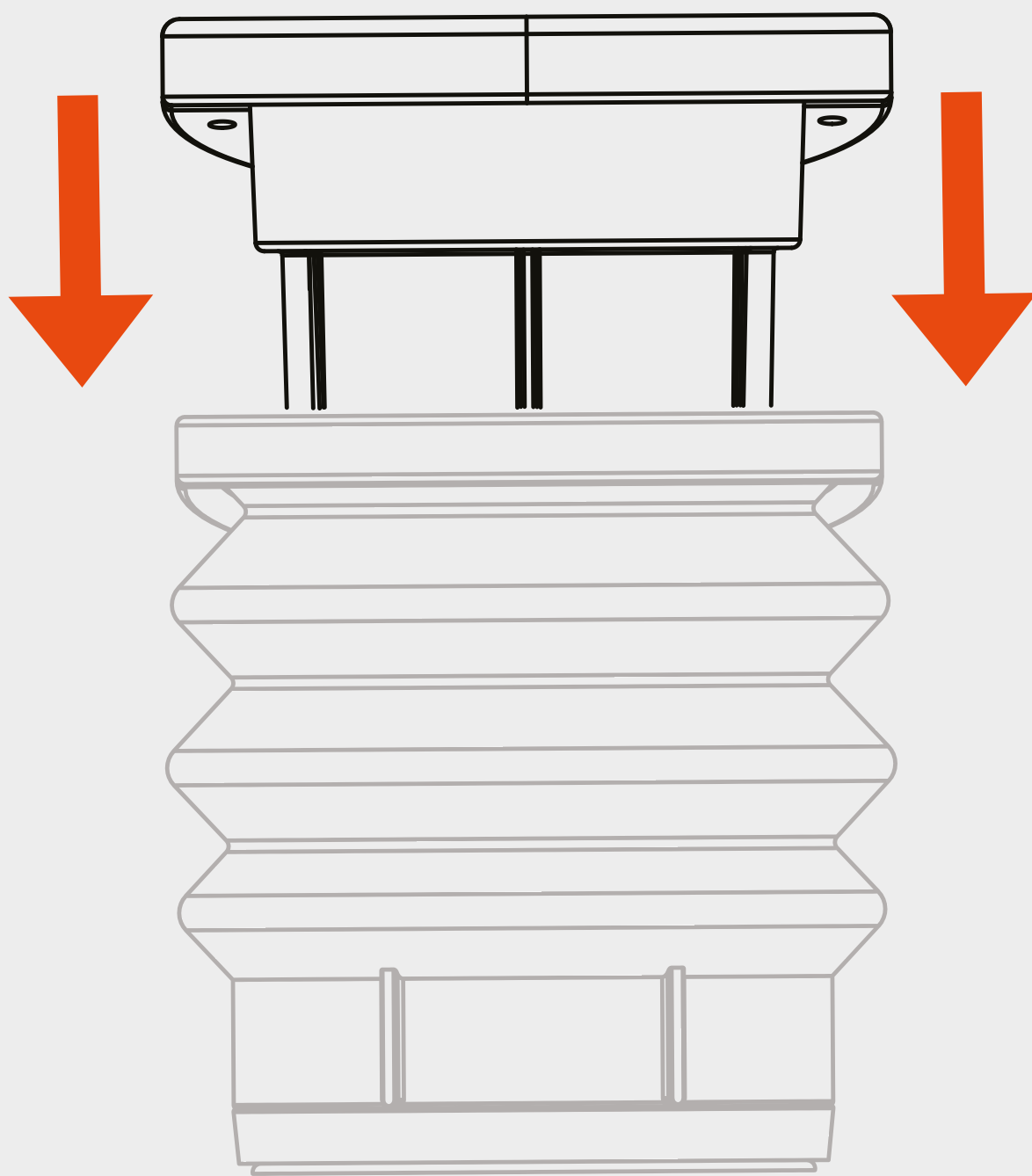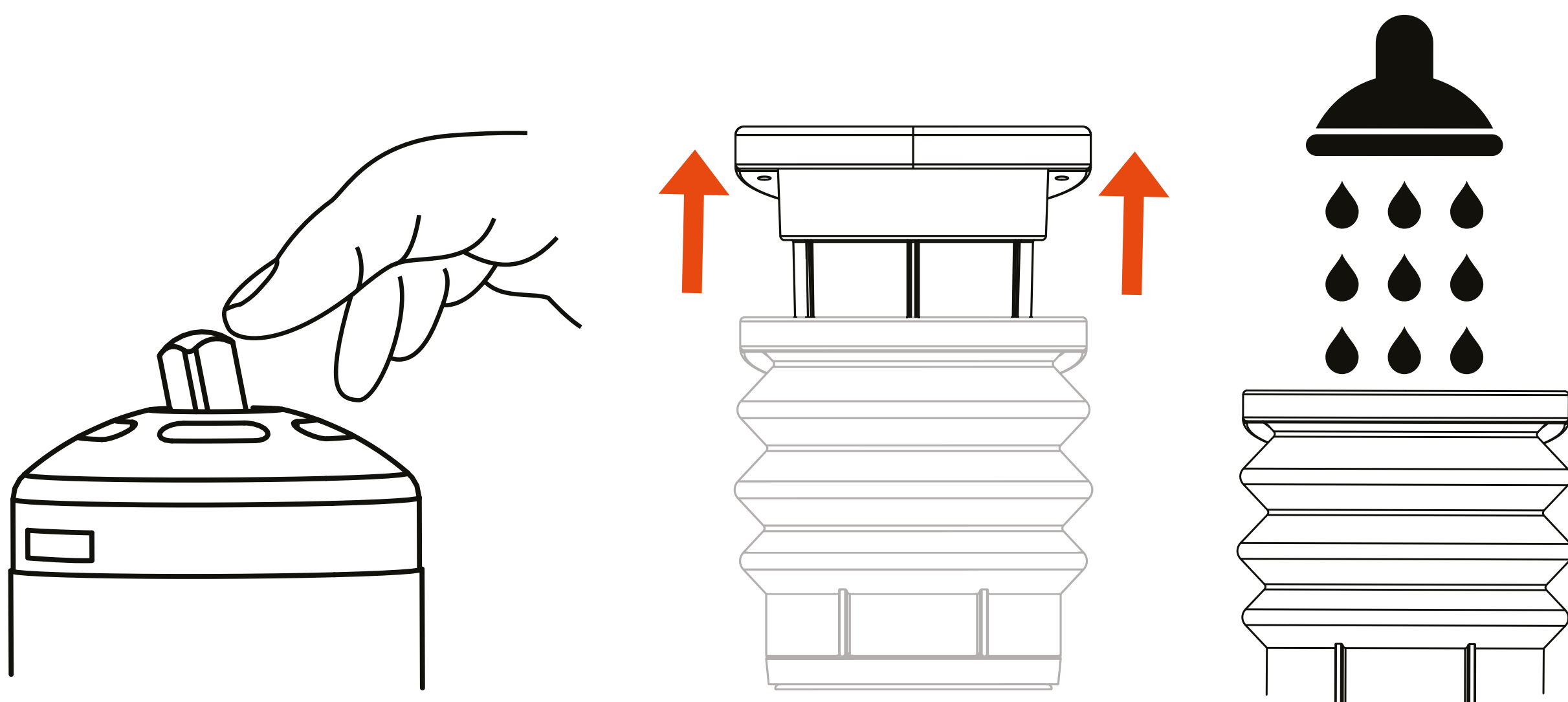

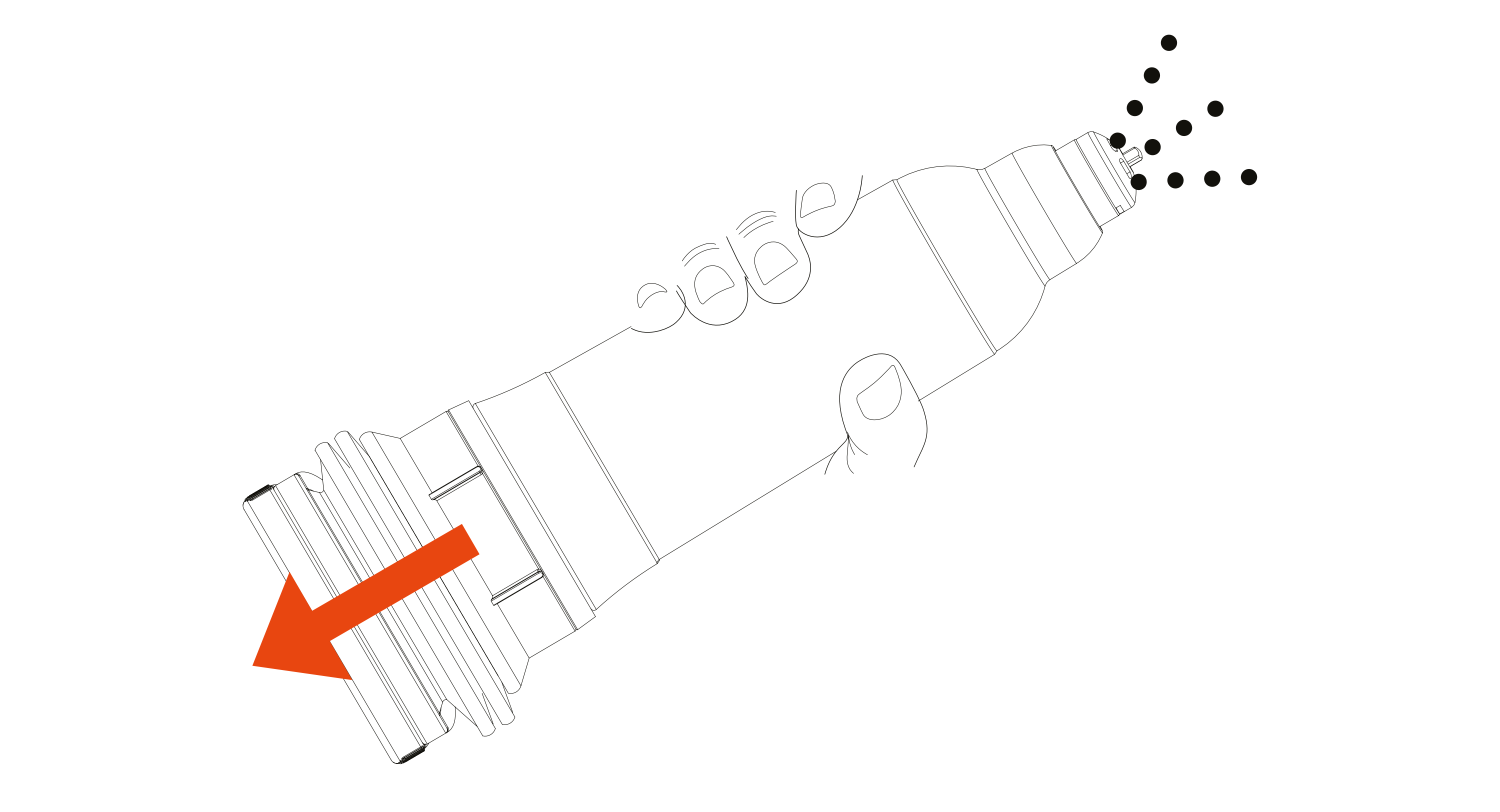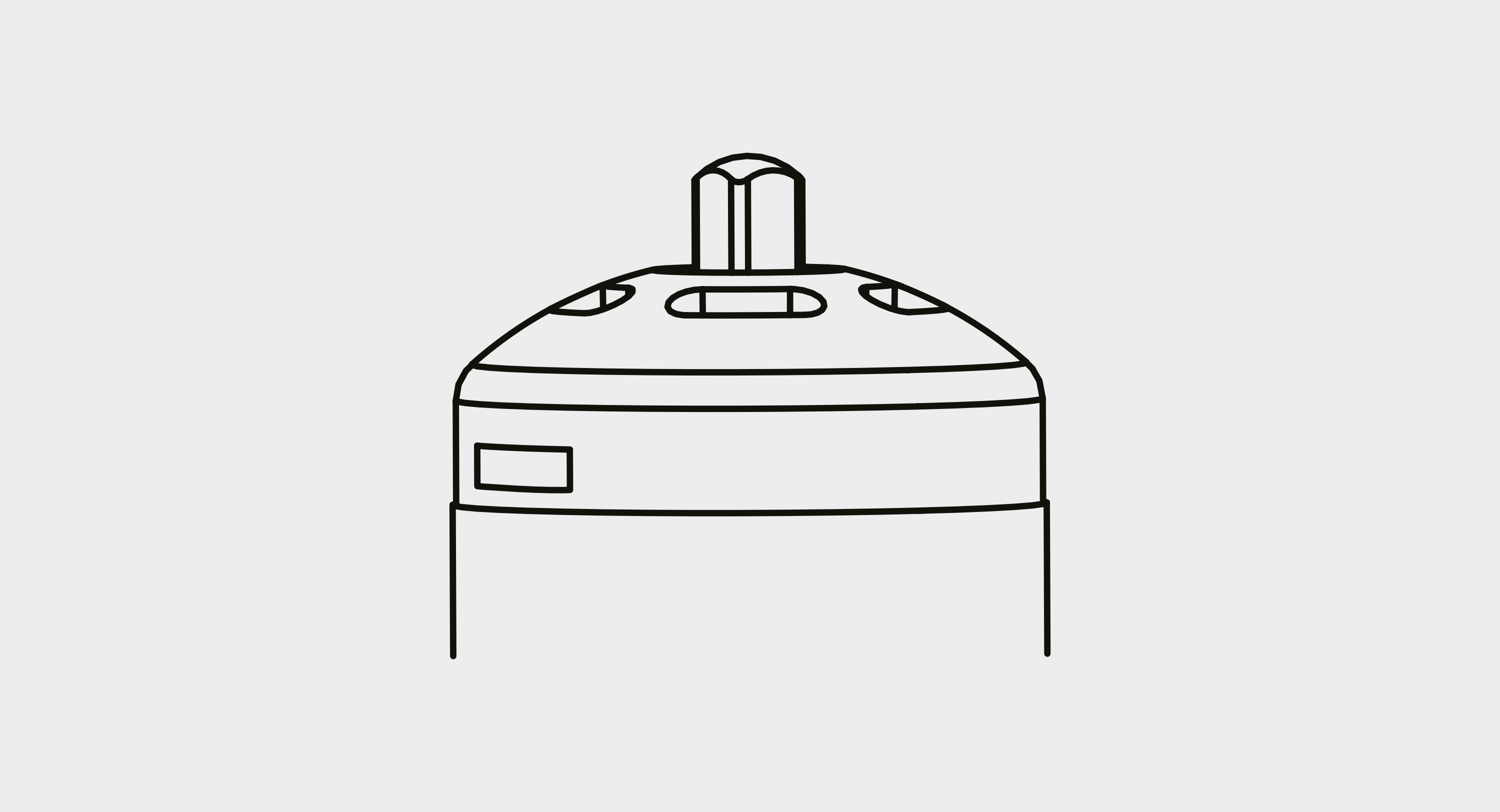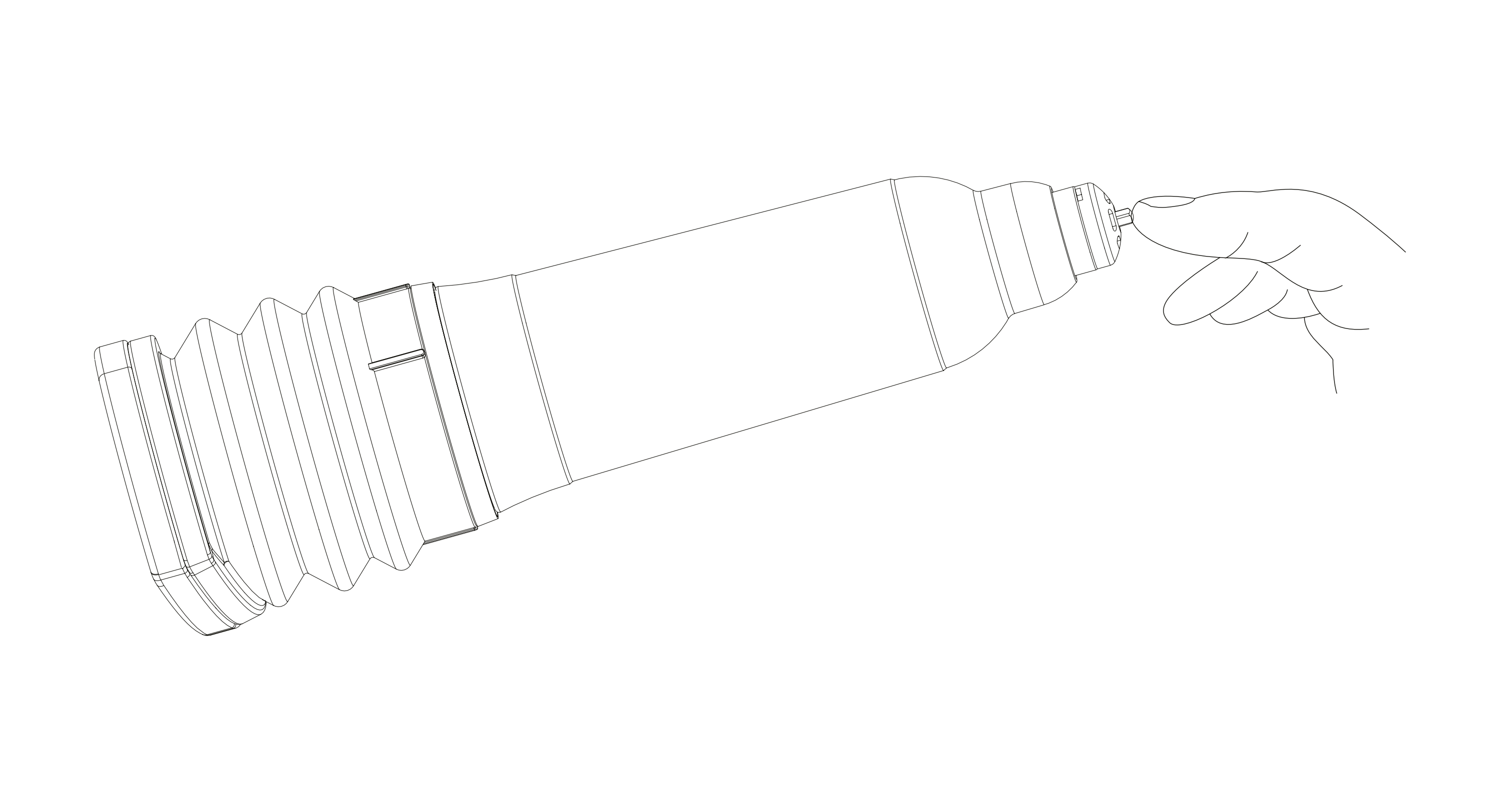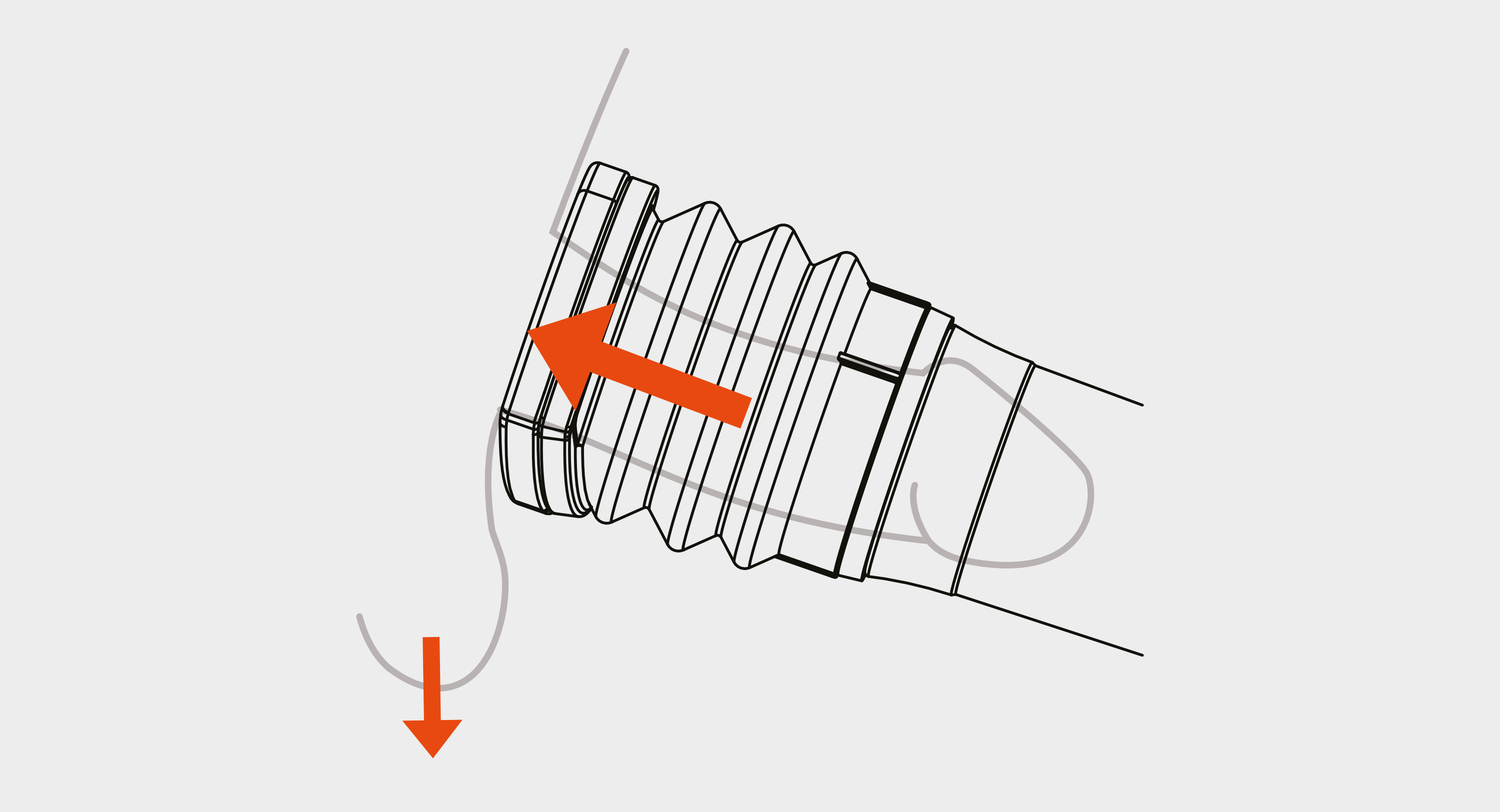

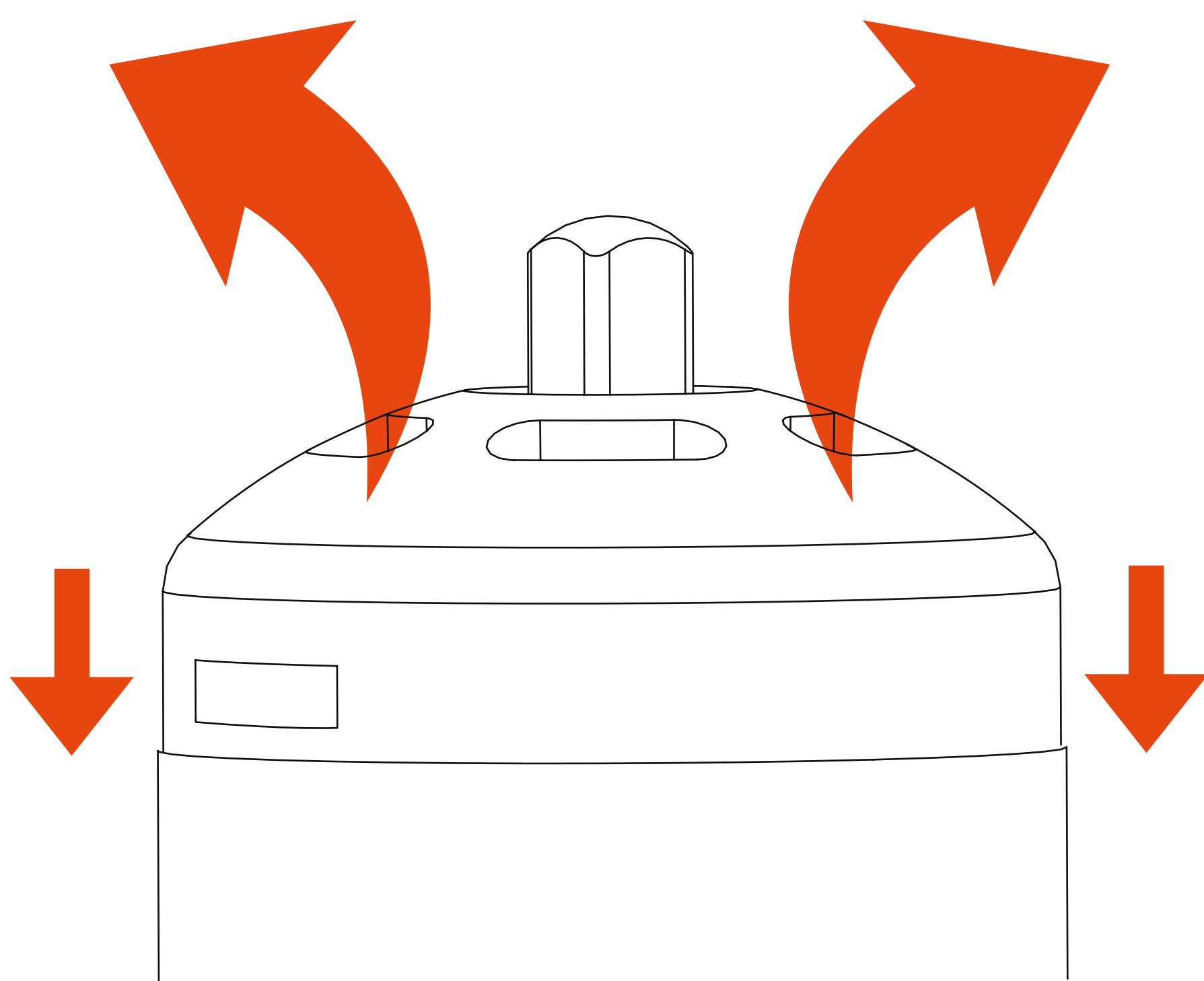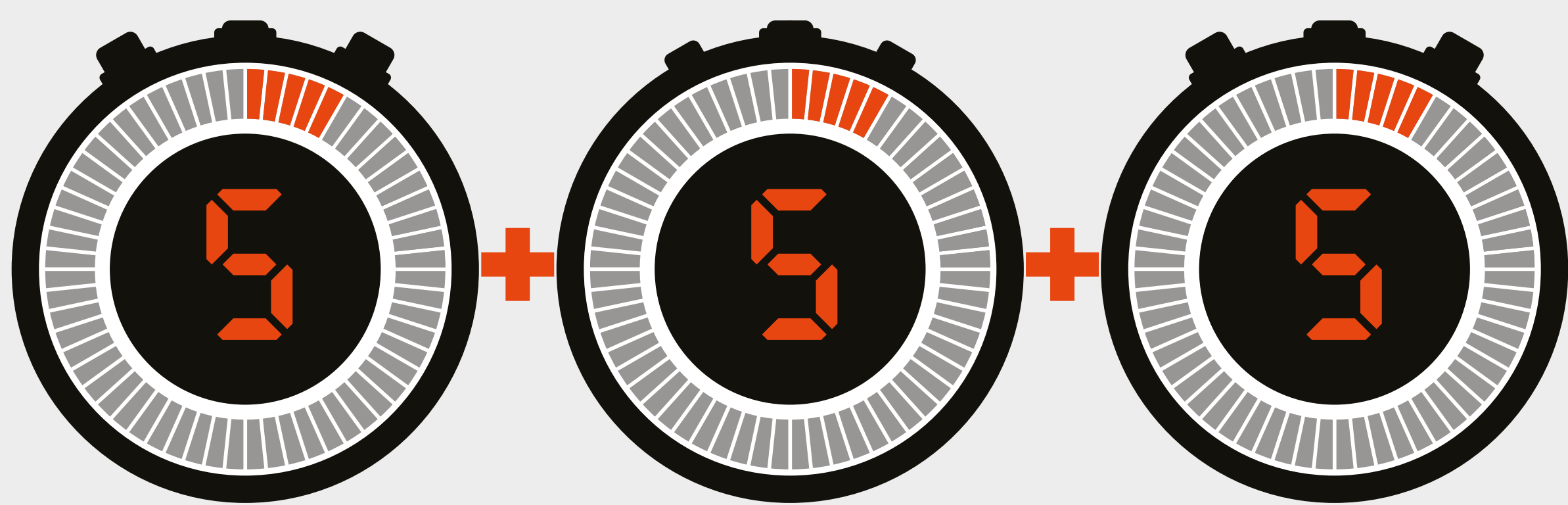

How to remove the valve cap correctly

Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to ensure that it functions to its full potential.

When removing your valve cap for cleaning ensure that the screwdriver is twisted and NOT prised.

