


bathmate®
J U S T A D D W A T E R

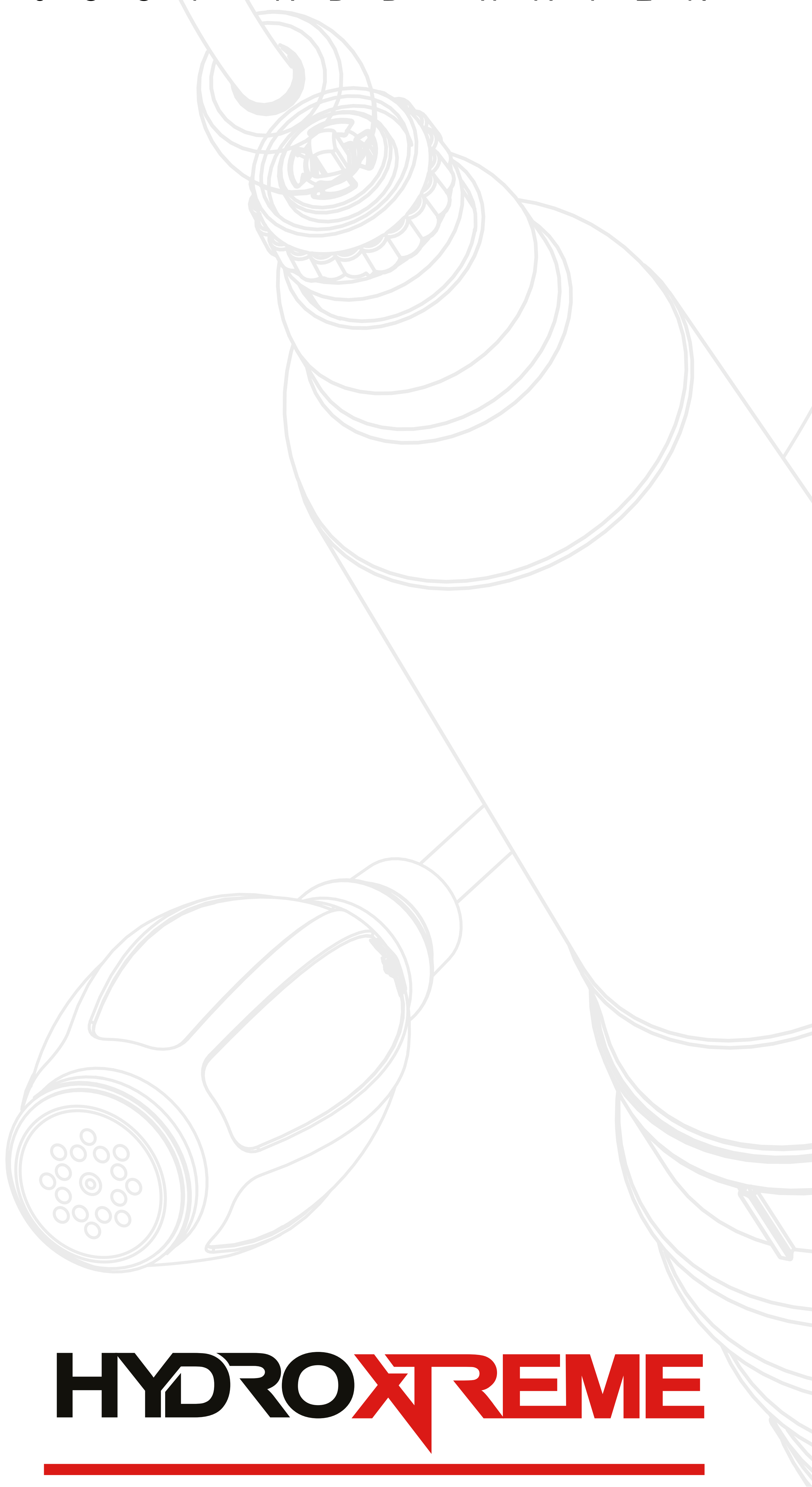

HYDROXTREME

U S E R G U I D E

Bathmate Hydropump представляет собой внешнее устройство на основе вакуумной технологии, обеспечивающее пенису достаточную жесткость, необходимую для полового акта. Внимательно прочтите следующие инструкции.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важные предупреждения о безопасности

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного устройства, если у вас наблюдается что-либо из нижеперечисленного: симптомы эректильной дисфункции, диабет, рассеянный склероз, цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, алкоголизм, увеличенная частота сердечных сокращений и дыхательных движений, болезнь сердца или легких, высокое артериальное давление, инсульт, эпилепсия, расстройство мочеиспускательной системы (например, проблемы с почками, мочевым пузырем или половыми органами) или лейкемия.
- Не используйте данное устройство, если:
 - Вы страдаете от серповидноклеточной анемии.
 - Вы неоднократно испытывали длительную эрекцию.
 - Вы страдаете от каких-либо нарушений гемостаза или в настоящий момент принимаете антикоагулянты, такие как аспирин.
- Устройство Hydropump рассчитано на применение одним пользователем.
- Устройство Bathmate Hydropump предназначено для использования в воде, поэтому не рекомендуется обрабатывать их какой-либо смазкой.
- Вы должны прилагать обеими руками достаточную силу, чтобы управлять механизмом сброса вакуума. Если она окажется недостаточной, снять безопасным образом данное устройство будет сложно.
- Вам необходимо постоянно контролировать продукт, не позволяйте себе засыпать с надетым устройством Hydropump.
- Не используйте данное устройство, находясь под действием алкоголя или наркотиков, поскольку вы не можете трезво оценивать ситуацию, а потому возрастает риск повреждения пениса.
- Никогда не используйте данное устройство, если у вас в области пениса наблюдается пониженная чувствительность к боли, т.к. это может ослабить вашу способность выявлять потенциальные травмы, причиненные устройством.
- Использование вакуумного насоса может вызвать повреждение или разрыв кровеносных сосудов в пенисе или мошонке и привести к петехии, геморрагии или образованию гематомы.
- Использование вакуумного насоса может усугубить хронические заболевания, такие как болезнь Пейрони,

приапизм и стриктуры уретры.

- Неправильное использование данного устройства может привести к травмированию пениса.
- В случае возникновения сильной боли или дискомфорта немедленно прекратите использование данного устройства и обратитесь к врачу.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуемое использование

Для извлечения оптимальной пользы из устройства Hydropump и предотвращения его ненадлежащего использования, которое может вызвать дискомфорт, вам настоятельно рекомендуется следовать изложенным ниже инструкциям:

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Помойте гидронасос в теплой чистой мыльной воде и тщательно его ополосните.

- Убедитесь, что вы достаточно хорошо подстригли лобковую область. Это обеспечит более плотное прилегание вакуумного уплотнения к тазу.
- Период расслабления в течение нескольких минут в душе необходим для того, чтобы яички размякли и не прилегали к области уплотнения, таким образом, вы не будете испытывать дискомфорт.
- Применяйте только минимальное давление вакуума, необходимое для достижения эрекции. Чрезмерное давление вакуума и слишком интенсивное накачивание может привести к повреждению или травмированию пениса.
- Для достижения наиболее сильной эрекции и оптимального притока крови лучше всего снимать устройство каждые 2-3 минуты и давать пенису опасть. Массируйте пенис в незарегистрированном состоянии в течение 2 минут, затем надевайте устройство и повторяйте процесс. Разрешается выполнять эту процедуру максимум 3 раза за 15-минутную сессию.
- Не используйте Hydropump более 15 минут в течение суток.

Как работает Hydropump

Принцип работы Hydropump заключается в создании в области таза пользователя вакуумного уплотнения, которое воздействует на пенис в незарегистрированном состоянии. Когда насос прижимают к телу, сильфон сокращается, а вода выходит из устройства через открытый клапан. Когда насос отпускают, сильфон расширяется, а клапан закрывается, создавая в устройстве частичный вакуум. Он заставляет пенис расширяться и наполняться кровью, приводя его в зарегистрированное состояние. Повторная накачка увеличивает вакуум и усиливает эрекцию.

Пользователь контролирует уровень вакуума путем нажатия на клапан и преодоления сопротивления пружины, через открытый клапан воздух и вода поступают обратно в корпус насоса, частично или полностью сбрасывая вакуум.

Вакуум в устройствах Bathmate Hydropump создается силой упругой отдачи насоса с сильфоном манжетного типа, поэтому пользователь не сможет превысить безопасный уровень частичного вакуума, установленный европейскими и американскими медицинскими правилами.

ВАЖНО

Черный дозатор в верхней части клапана двигается путем нажатия и поворота вправо или влево, где он должен «защелкнуться» на месте, закрыв клапан. Переводить его в закрытое положение следует только в случае наполнения Hydropump водой в душе. Все остальное время черный дозатор должен всегда находиться в центральном (открытом) положении. В противном случае Hydropump будет работать некорректно.

Использование Hydropump в душе

1. Расслабьтесь в душе в течение нескольких минут.
2. Закройте клапан, повернув его крышку по часовой стрелке.
3. Нажмите пальцем на черный дозатор, переводя его в закрытое положение, вытащите специальную вставку (чтобы обеспечить воздуху выход), затем переверните Hydropump и наполните водой из душевой лейки.
4. Установите вставку на место.
5. Поместите Hydropump на пенис в незарегистрированном состоянии так, чтобы сильфон плотно прилегал к тазу, а черный дозатор находился в закрытом положении. Камеру можно как приподнять, так и немного опустить – в зависимости от вашей степени комфорта.
6. Создайте герметичное уплотнение в области соприкосновения устройства с телом, убедившись, что положение первого не вызывает у вас дискомфорт и что яички не задействованы в процессе.
7. Немного приподнимите Hydropump, откройте клапан, переводя черный дозатор в центральное положение, и начинайте качать.
8. Убедитесь, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положении во время накачки.
9. Качайте медленно и плавно до тех пор, пока сильфон не останется в сжатом положении, указывая на то, что создан оптимальный вакуум.
10. Для увеличения вакуума и лучшего контроля используйте ручную грушу, которую можно подсоединять к насосу через шланг или напрямую. Помните о том, что соединение между ручной грушей для накачки и клапаном Hydropump не рассчитано на то, чтобы быть постоянным. По этой причине во время использования ручную грушу необходимо удерживать в одном положении, а после достижения оптимального вакуума – снимать. Для обеспечения более длительного соединения используйте соединительный шланг.

11. Убедитесь, что вы следуете рекомендуемым инструкциям.
12. Чтобы снять Hydropump, откройте клапан, повернув его крышку против часовой стрелки, сбросьте вакуум, нажав на крышку клапана для задействования быстродействующего механизма, а затем снимите Hydropump с пениса.

Использование Hydropump в ванной

1. Расслабьтесь в ванной в течение нескольких минут.
2. Вытащите специальную вставку (чтобы обеспечить воздуху выход) и наполните Hydropump водой из ванны.
3. Установите вставку на место.
4. Поместите Hydropump на пенис в незарегистрированном состоянии так, чтобы сильфон плотно прилегал к тазу, а черный дозатор находился в центральном (открытом) положении. Камеру можно как приподнять, так и немного опустить – в зависимости от вашей степени комфорта.
5. Создайте герметичное уплотнение в области соприкосновения устройства с телом, убедившись, что положение первого не вызывает у вас дискомфорт и что яички не задействованы в процессе.
6. Немного приподнимите Hydropump, убедившись, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положении, и начинайте качать.
7. Убедитесь, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положении во время накачки.
8. Качайте медленно и плавно до тех пор, пока сильфон не останется в сжатом положении, указывая на то, что создан оптимальный вакуум.
9. Для увеличения вакуума и лучшего контроля используйте ручную грушу, которую можно подсоединять к насосу через шланг или напрямую. Помните о том, что соединение между ручной грушей для накачки и клапаном Hydropump не рассчитано на то, чтобы быть постоянным. По этой причине во время использования ручную грушу необходимо удерживать в одном положении, а после достижения оптимального вакуума – снимать. Для обеспечения более длительного соединения используйте соединительный шланг.
10. Убедитесь, что вы следуете рекомендуемым инструкциям.
11. Чтобы снять Hydropump, откройте клапан, повернув его крышку против часовой стрелки, сбросьте вакуум, нажав на крышку клапана для задействования быстродействующего механизма, а затем снимите Hydropump с пениса.

Чистка и обслуживание

Мойте Hydropump в теплой чистой мыльной воде, а затем тщательно его ополаскивайте. Давайте Hydropump высохнуть и храните его в сухом месте, защищенном от прям солнечных лучей.

Обслуживание клиентов и гарантия

Bathmate Hydropump рассчитан на долгие годы безотказной работы. На него распространяется двухгодичная гарантия при обнаружении дефектных деталей или некачественной сборки. С условиями обслуживания клиентов и гарантии можно ознакомиться на сайте: www.bathmatedirect.com/support.






В случае маловероятного возникновения претензий по гарантии DX Products Ltd оставляет за собой право требовать возврата Hydropump и предъявления доказательств по факту повреждений.





Код идентификации продукта (PID)





DX Products Ltd использует код идентификации на всех своих продуктах. На этикетке каждого устройства Bathmate Hydropump вы найдете уникальный PID-код из 6 букв. Данный код является гарантией подлинности и доказательством того, что вы покупаете настоящий продукт, а не его некачественную поддельную копию. Просьба использовать PID-код для проверки подлинности продукта и регистрации гарантии в режиме онлайн на нашем сайте: www.bathmatedirect.com/support.

Руководство по устранению неполадок

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ	КОММЕНТАРИИ
Отсутствует эрекция / Частичная эрекция	Отсутствует вакуум из-за утечки воздуха, вызванной плохим уплотнением	Убедитесь, что лобковая область хорошо подстрижена; снимите и очистите клапан	Проблема чаще всего вызвана отсутствием опыта использования устройства, она разрешается по мере того, как вы приноравливаетесь его применять
Втягивание кожи мошонки при накачке	Яички слишком близко к области сдавливания	Прежде чем приступить к пампингу, дайте мошонке размякнуть в течение нескольких минут, пока вы принимаете теплую ванну или душ	В случае если проблему не удастся решить, просьба обращаться в службу клиентской поддержки: support@bathmatedirect.com
Дискомфорт или боль			
Во время накачки	Слишком быстрая накачка, втягивание ткани мошонки	Замедлите накачку, продолжайте использовать устройство	Как правило, проблема исчезает, когда вы приноравливаетесь использовать устройство
Покраснение, раздражение или синяки	Слишком быстрая и чрезмерная накачка	Замедлите накачку, реже пользуйтесь устройством	Проконсультируйтесь с врачом, если проблема не исчезнет через несколько практических сессий

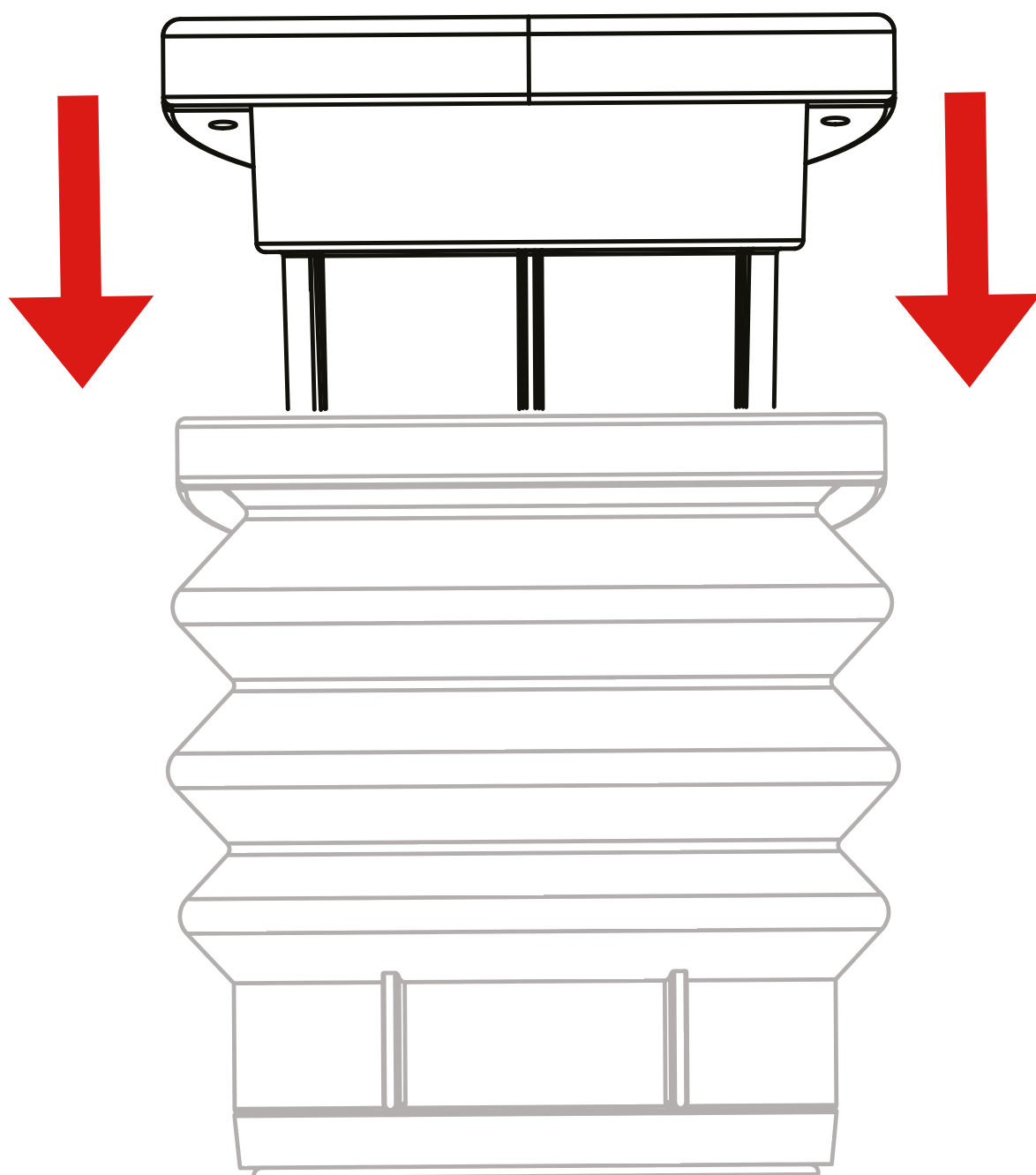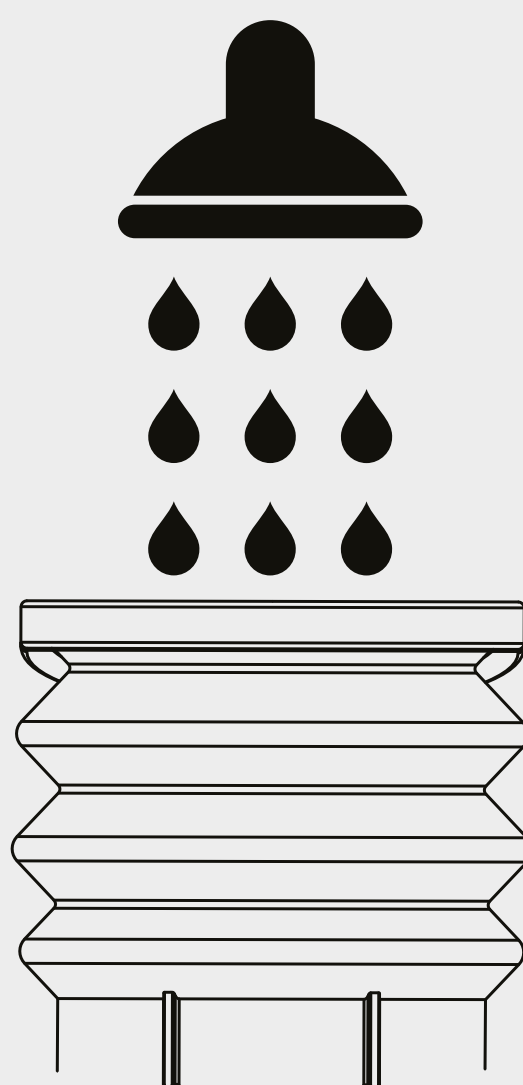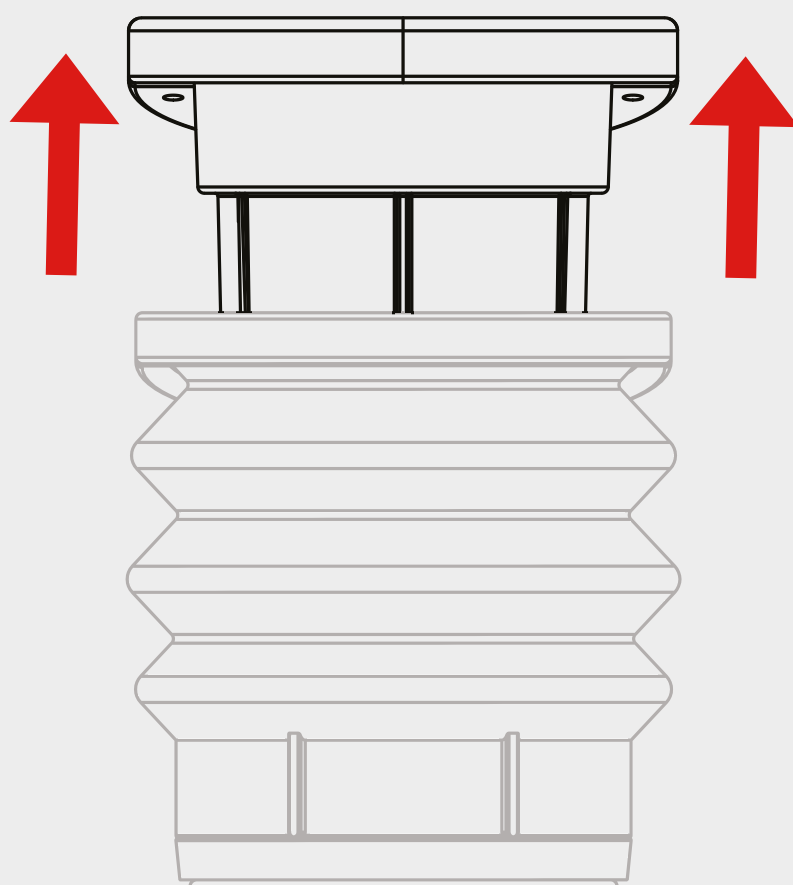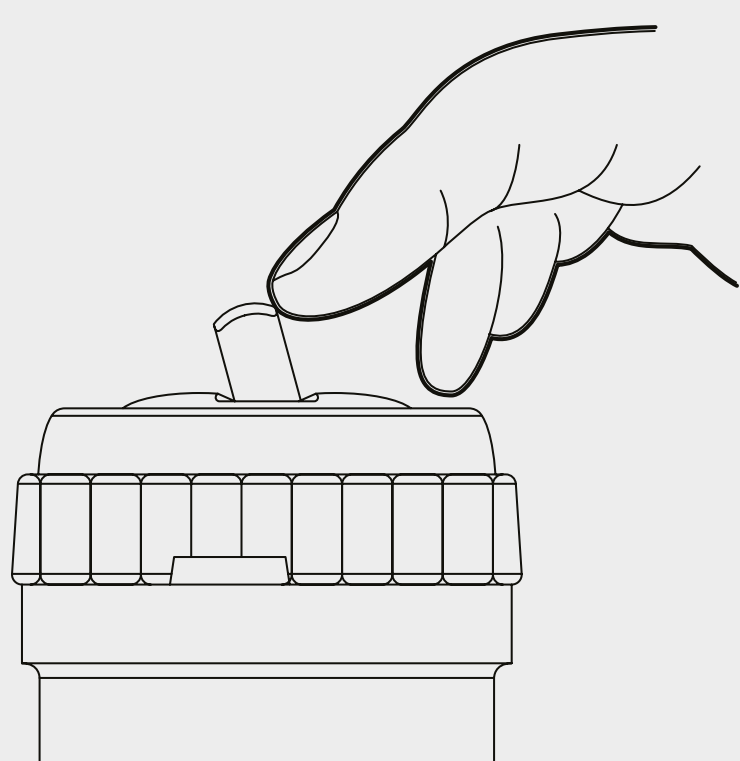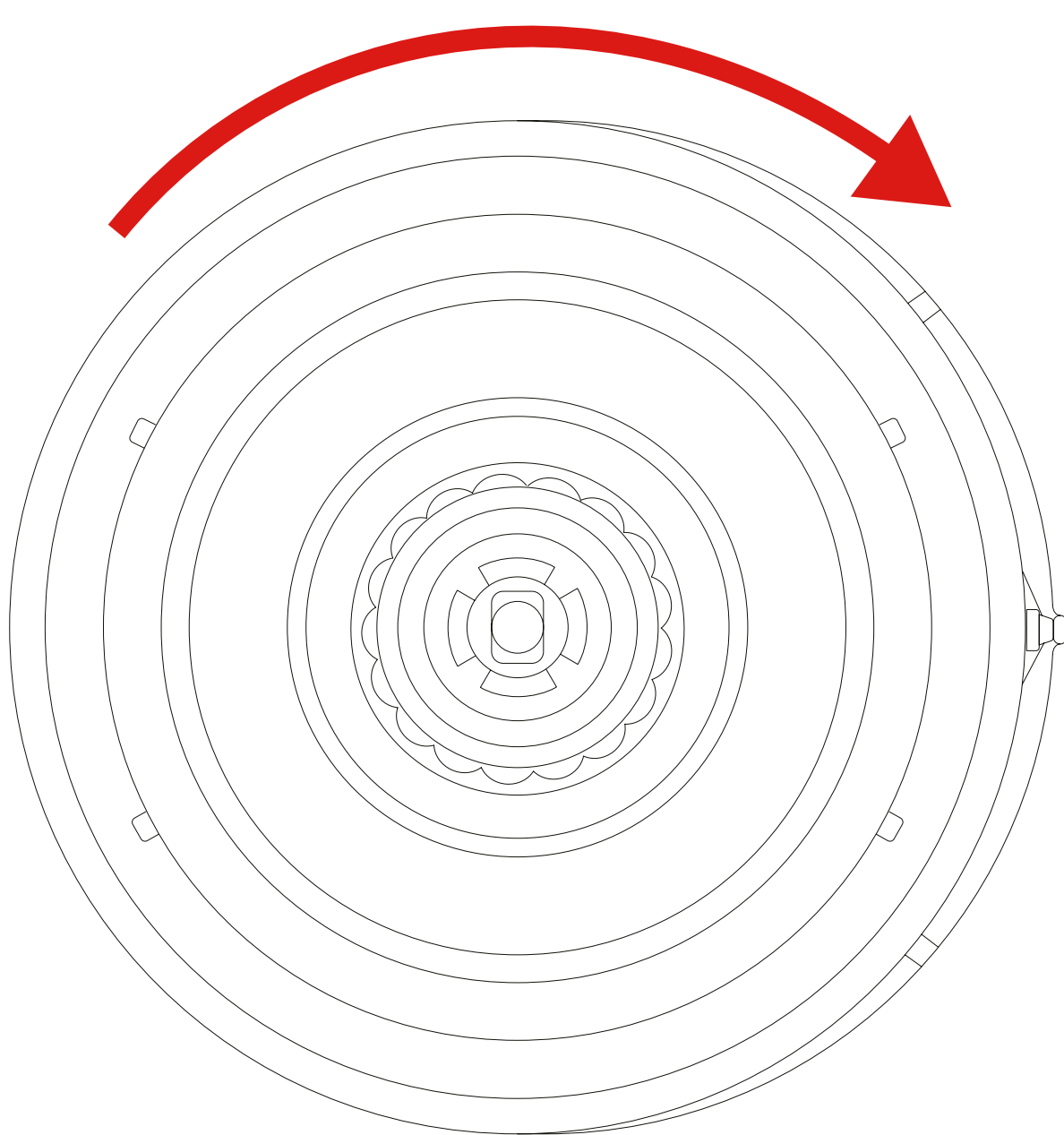

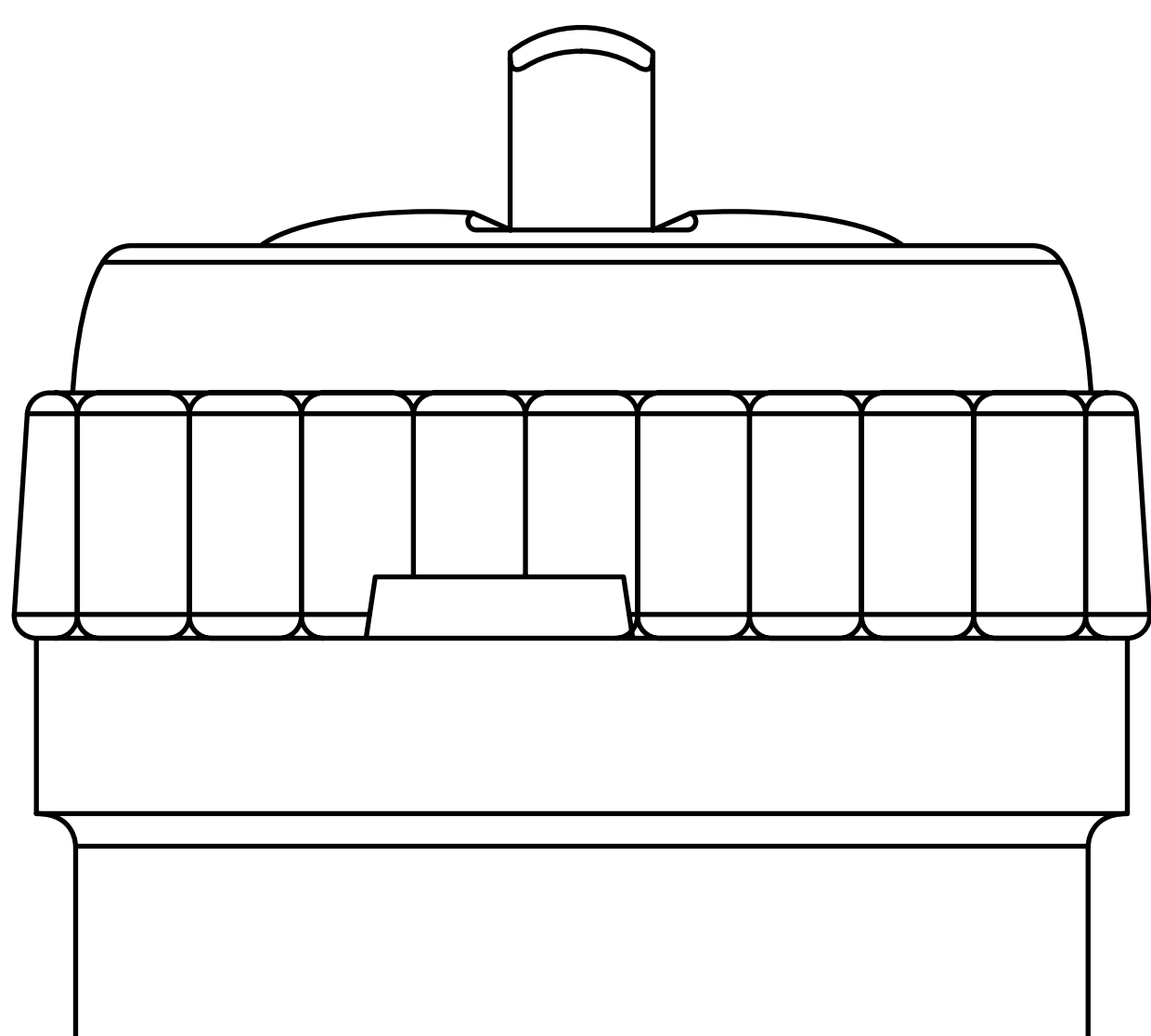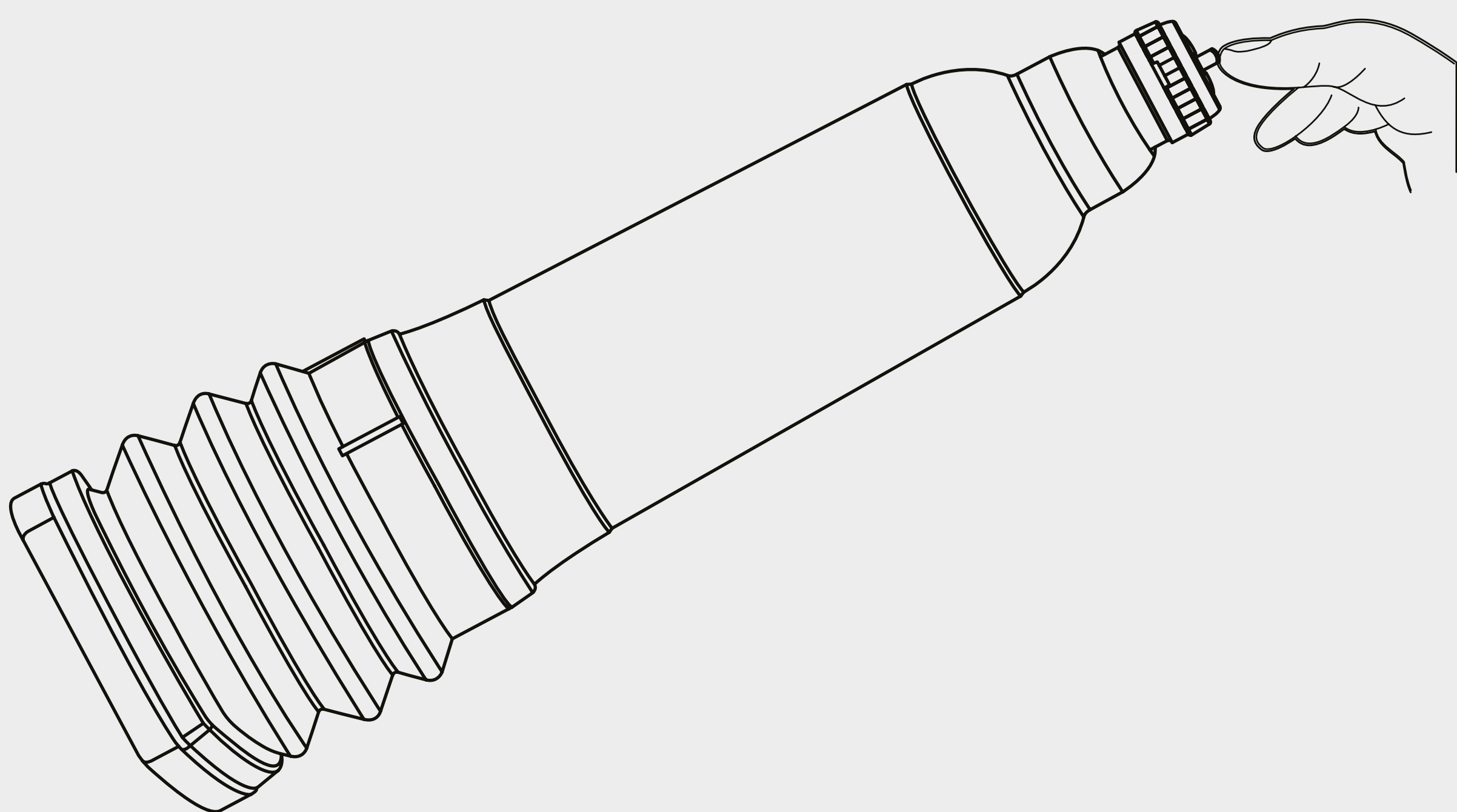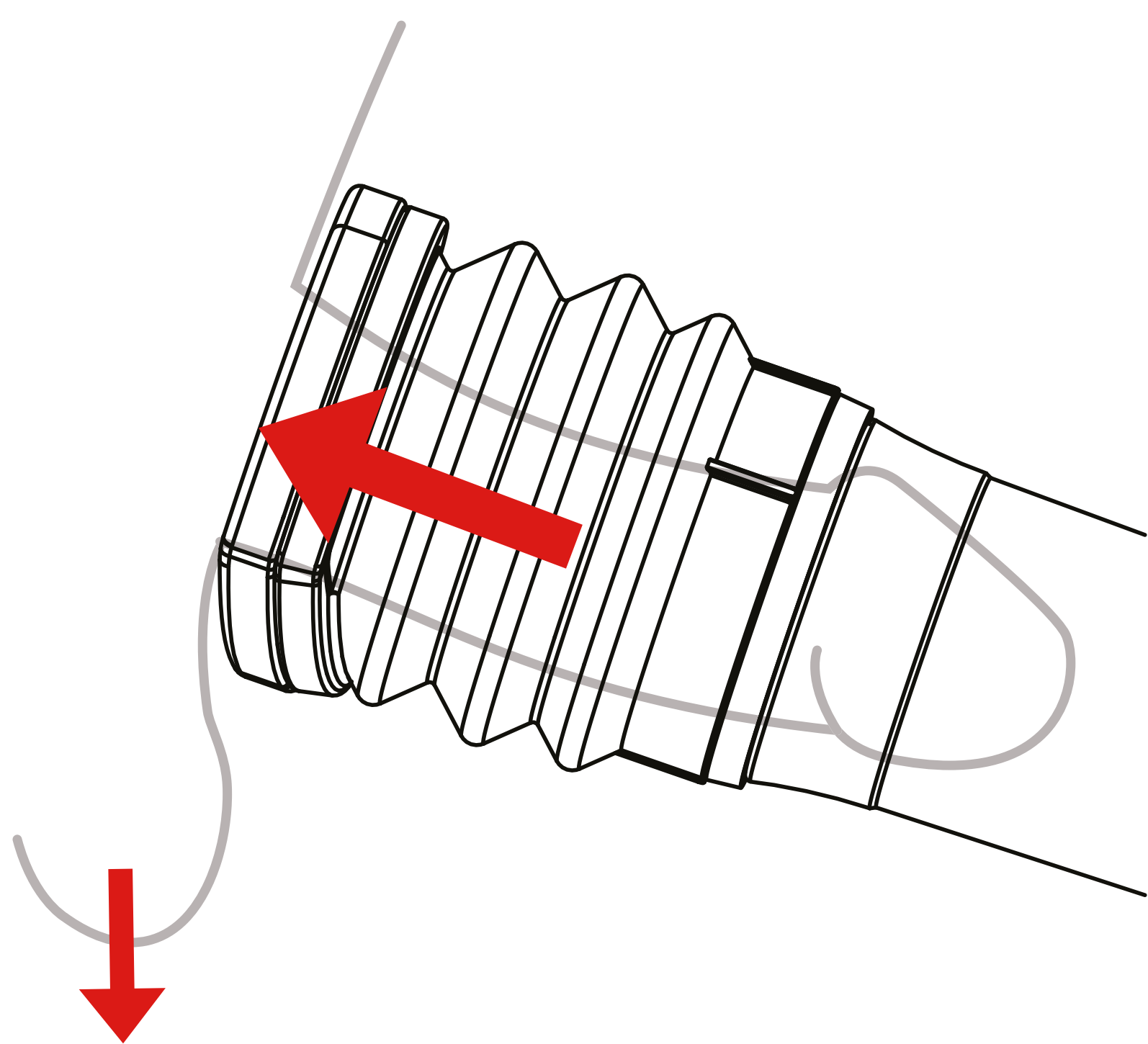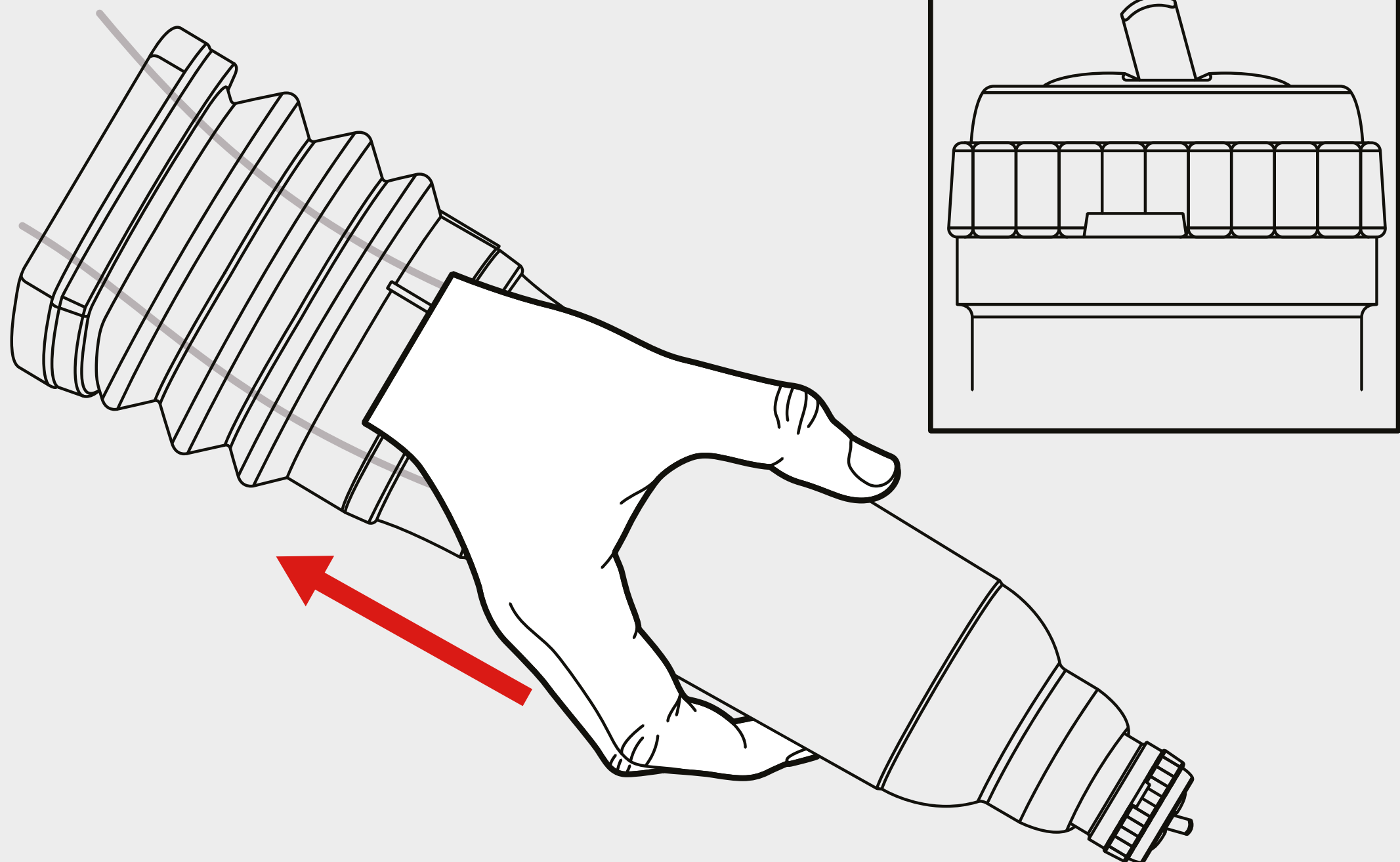

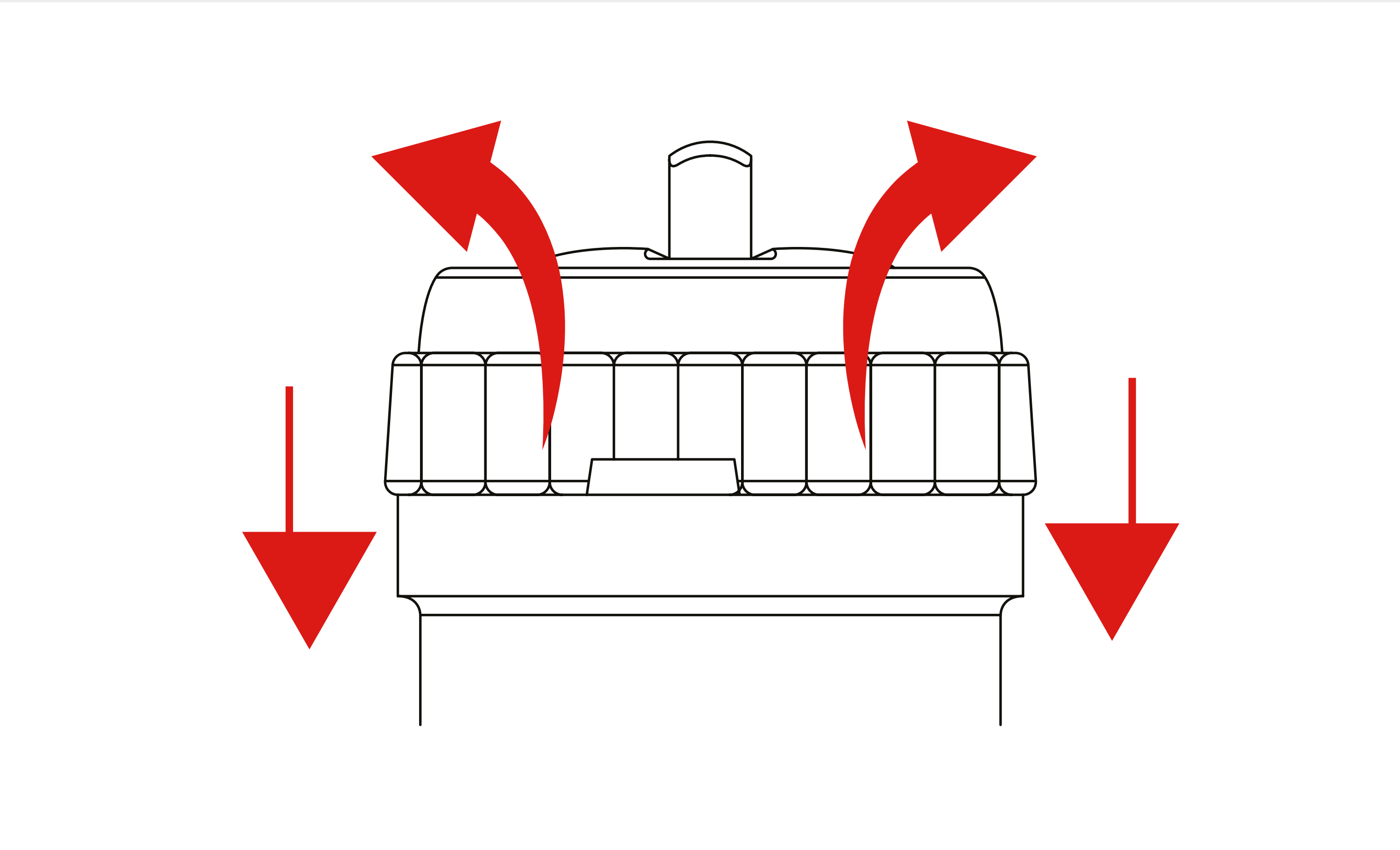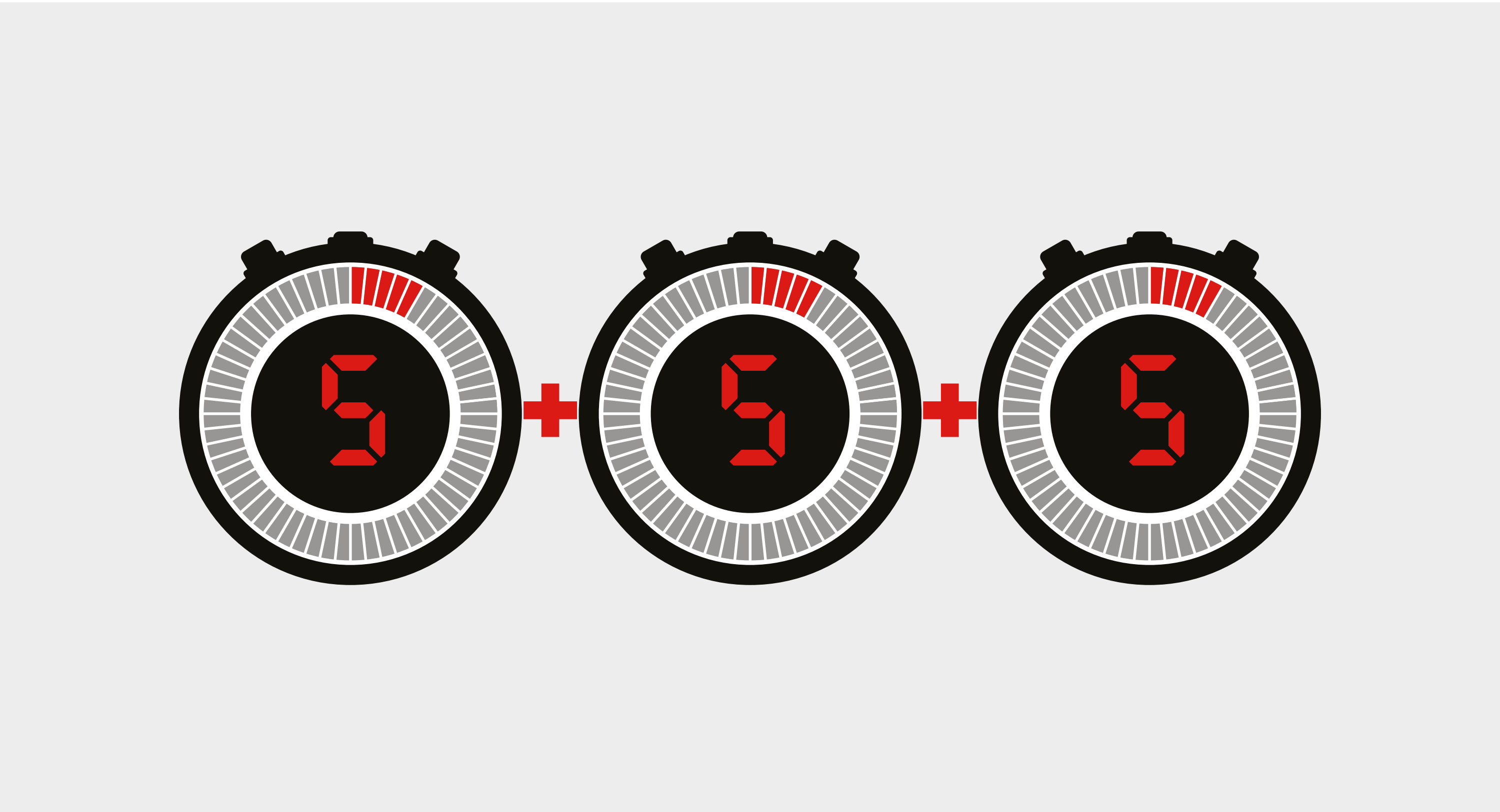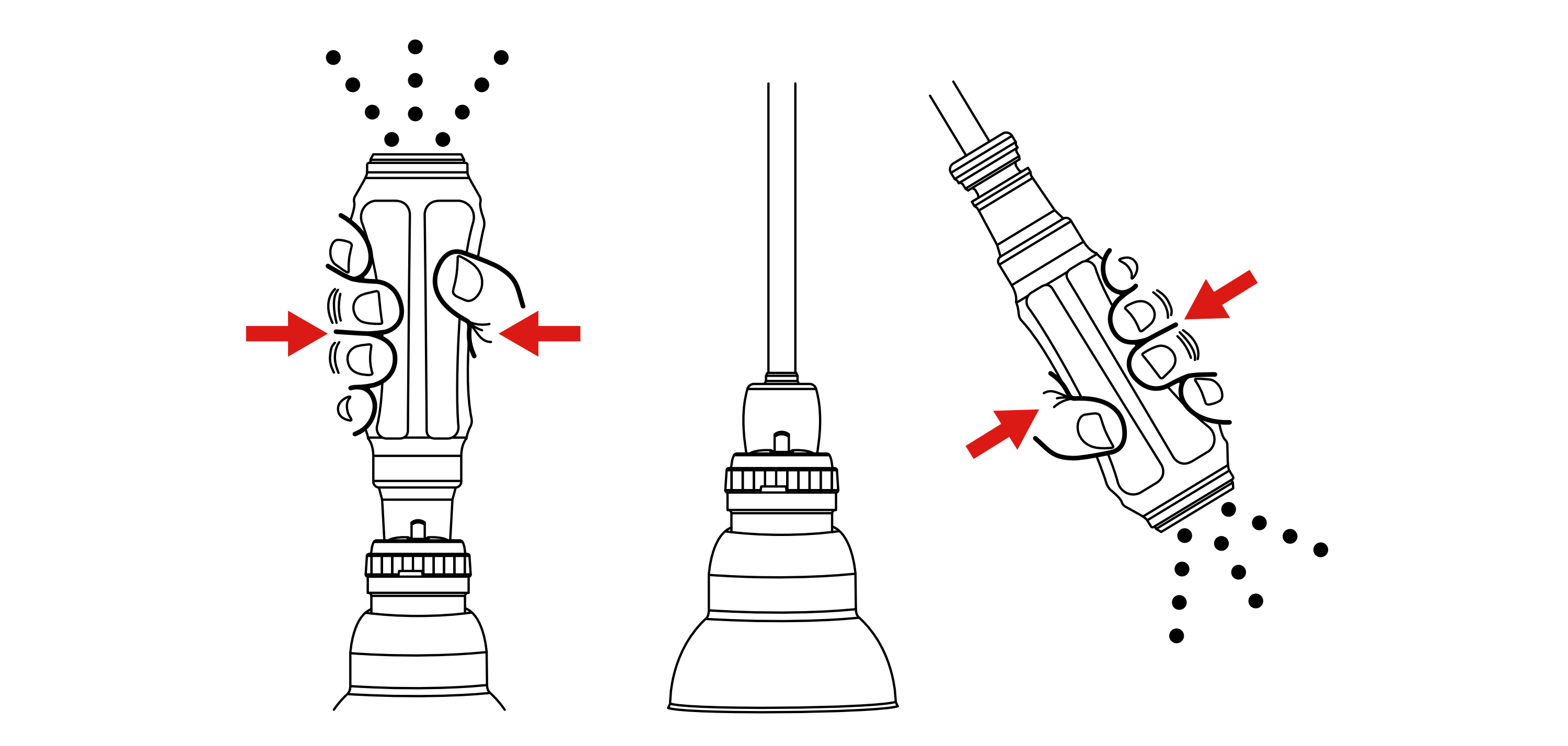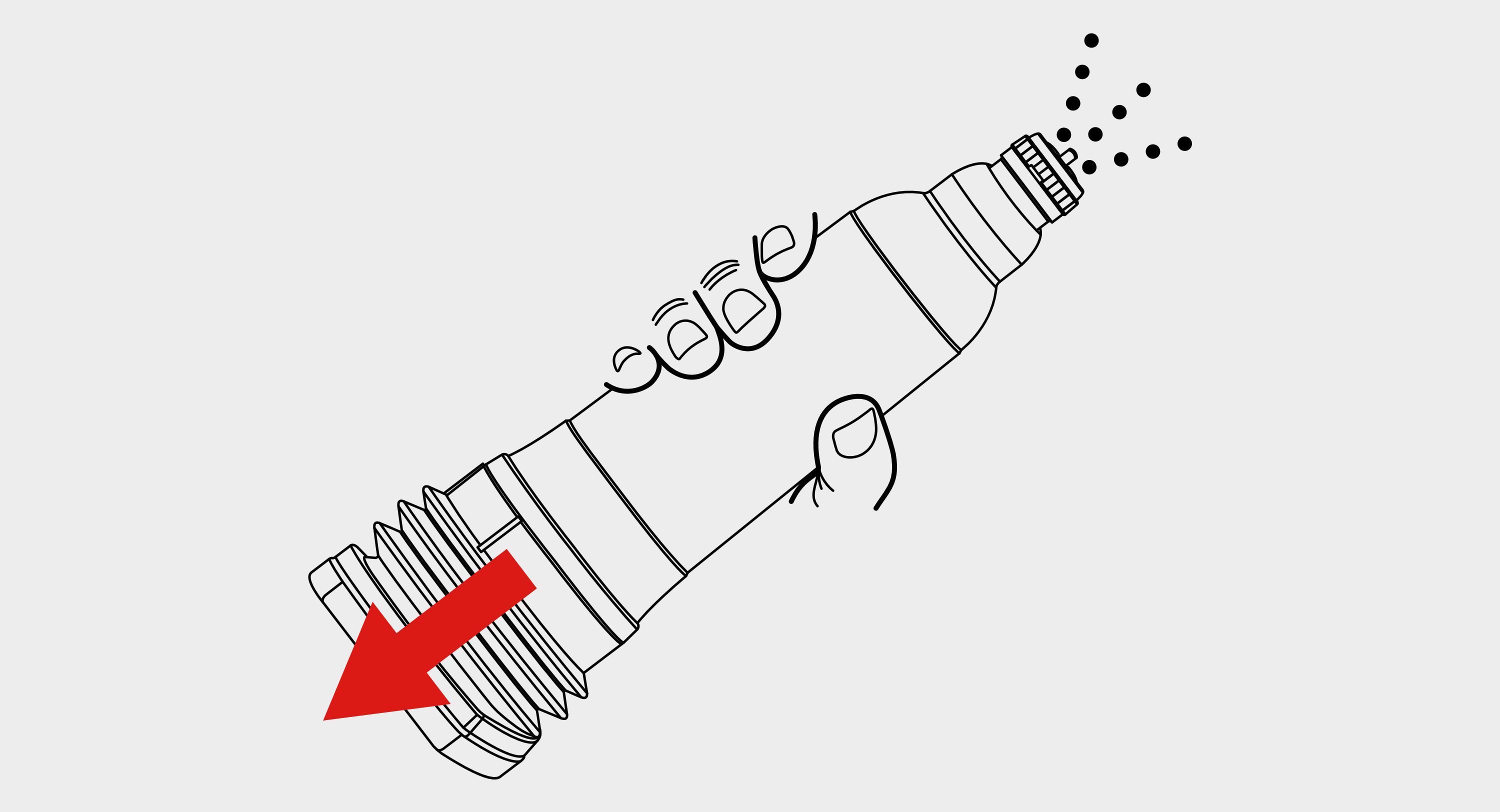

How to remove the valve cap correctly

Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to ensure that it functions to its full potential.

When removing your valve cap for cleaning ensure that the screwdriver is twisted and NOT prised.

